

SAFE RELAX[®] SAFE REMOVER[®]



HANDMATIGE/AUTOMATISCHE KROONVERWIJDERAAR

NL - HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

- I. VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN
- II. TOEPASSINGSGBIED
- III. ALGEMENE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE
- IV. TECHNISCHE KENMERKEN
- V. PRODUCTBESCHRIJVING
- VI. INSTALLATIE VAN HET MH
- VII. HYGIENE EN ONDERHOUD
- VIII. REPARATIE
- IX. ACCESSOIRES
- X. GARANTIES
- XI. OPSLAG- EN TRANSPORTVOORWAARDEN
- XII. PRODUCTVERWIJDERING

I. VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

- ⚠ LET OP: belangrijke informatie!
- 👁 Visueel onderzoek
- 🔥 NIET-STERIEL
- 🧤 Gebruik handschoenen
- 📖 Opmerking van algemene aard (geen gevaar)
- 📖 Goed doorlezen alstublieft!
- 🌡 Autoclaf 135°C
- 📄 Referentie
- 📄 Serienummer
- 🏭 Fabrikant
- 🩺 **MH** Medisch hulpmiddel

II. TOEPASSINGSGBIED

Dit **MH** is bestemd voor tandheelkundige zorg op het gebied van tandheelkundige chirurgie, en in het bijzonder voor het verwijderen van vaste prothesen (enkelvoudig of meervoudig, bruggen). Elke andere vorm van gebruik is niet toegestaan en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Geldende Richtlijn:

Richtlijn 93/42/EEG, geamendeerd in Richtlijn 2007/47/EEG en omgezet in het Franse reglement van **MH** [Officieel bulletin — L169 — 12 juli 1993].

Overeenkomstig deze voorschriften mag het **MH** uitsluitend worden gebruikt door een gebruiker met ervaring in de beschreven toepassing binnen de tandheelkunde, met inachtneming van de geldende voorschriften met betrekking tot het voorkomen van arbeidsongevallen, arbeidsbescherming en de in deze gebruiks-aanwijzing genoemde indicaties. Dit **MH** mag uitsluitend worden geprepareerd en onderhouden door personen met een opleiding op het gebied van infectiepreventie, zelfbescherming en bescherming van patiënten.

Ooreenkomstig deze voorschriften is de gebruiker verplicht:

- uitsluitend tandheelkundige instrumenten te gebruiken die geen gebreken vertonen;
- het **MH** uitsluitend te gebruiken op aandrijfeenheden die voldoen aan de normen EN 60601 en 93/42/EEG;
- het instrument alleen te gebruiken voor de genoemde doeleinden;
- zowel zichzelf als patiënten en evt. derden te beschermen tegen alle mogelijke gevaren;
- elke besmetting door het product te voorkomen.

III. ALGEMENE VEILIGHEIDSGEINFORMATIE

Controleer voor gebruik of het **MH** niet beschadigd is en of er geen onderdelen ontbreken.

- Gebruik handschoenen, een veiligheidsbril en een gezichtsmasker.
- Controleer het aansluiten van een instrument of het goed is geplaatst door er voorzichtig aan te trekken.

Uitsluitend voor de Safe Relax®:

- Controleer bij het aansluiten of verwisselen van een instrument of het **MH** goed is uitgeschakeld.
- Raak het instrument niet aan als het in bedrijf is.
- Verander de snelheidsinstelling alleen als de motor is uitgeschakeld.
- Koppel de instrumenten uitsluitend buiten de mond van de patiënt aan of af.

- Koppel het **MH** alleen van de motor aan of af als deze is uitgeschakeld. Als het instrument niet goed functioneert of zichtbaar beschadigd is, stop dan onmiddellijk het gebruik en informeer bij uw erkende leverancier of de fabrikant.

Neem ook bij andere vragen over het instrument contact op met uw erkende leverancier of de fabrikant. Zonder uitdrukkelijke toestemming van ANTHOGRYR mag geen enkele verandering van of toevoeging aan het apparaat worden uitgevoerd. Gebruik uitsluitend accessoires die bestemd zijn voor dit **MH**. Gebruik de accessoires van dit **MH** niet op een ander type **MH**, een **MH** van een ander merk of enig ander apparaat.

IV. TECHNISCHE KENMERKEN

4.1 AUTOMATISCHE kroonverwijderaar (Safe Relax®):


REFERENCE	6950C	6961C
Gewicht (g)	260	288
Minimumlengte/maximumlengte (mm) van kroonverwijderaar (zonder instrument)	132 / 140	
Maximumdiameter (mm)	Ø 20	
Norm motoraansluiting	NF EN 23964	
Aanbevolen minimumsnelheid van de motor (tpm)	5 000	
Aanbevolen maximumsnelheid van de motor (tpm)	25 000	
Minimumslagfrequentie bij 5000 tpm	200 slagen/min	
Maximumslagfrequentie bij 25.000 tpm	1 000 slagen/min	
Aantal snelheidsstanden	5	
Aantal haken	4	
Aantal opzetstukken met draad	0	3
Te gebruiken instrumenten	Uitsluitend van Anthogyr!	
Instrumentaansluiting	Eigendom van Anthogyr	
Afmeting van de koppeling (NF EN ISO 3964 :2016)	Lang	
Koppelingstype (NF EN ISO 3964 :2016)	Type 1	

4.2 HANDMATIGE kroonverwijderaar (Safe Remover®):

REFERENCE	1820A	ATD310B
Gewicht (g)	177	279
Maximumlengte (mm) van kroonverwijderaar	190	
Aantal haken	4	
Aantal opzetstukken met draad	0	
Te gebruiken instrumenten	Uitsluitend van Anthogyr!	
Instrumentaansluiting	Eigendom van Anthogyr	


V. PRODUCTBESCHRIJVING

5.1 AUTOMATISCHE kroonverwijderaar (Safe Relax®):

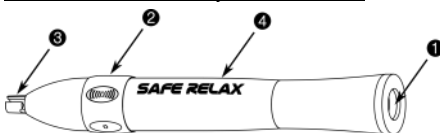

- 1 Motoraansluiting
- 2 Ring voor snelheidsinstelling
- 3 Instrumentaansluiting (bajonetsluiting)
- 4 Greep

5.2 HANDMATIGE kroonverwijderaar (Safe Remover®):

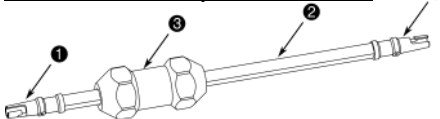

- 1 Instrumentaansluiting (bajonetsluiting)
- 2 Stang
- 3 Romp

VI. INSTALLATIE VAN HET MH


⚠ Het **MH** wordt **niet-gesmeerd*** en **niet-steriel** geleverd. Daarom moet het **MH** voor het eerste gebruik worden **gereinigd, gedesinfecteerd, gesmeerd*** en **gesteriliseerd** (zie paragraaf VII: 'Hygiëne en onderhoud')

⚠ Controleer voor gebruik of het **MH** niet beschadigd is en of er geen onderdelen ontbreken.

*Uitsluitend voor de Safe Relax®

6.1 Aansluiten van de motor (Uitsluitend voor de Safe Relax®):

⚠ LET OP: het **MH** mag alleen buiten de mond van de patiënt op de motor worden aangesloten en alleen als de motor is uitgeschakeld.

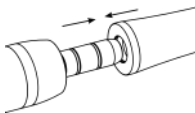


Steek het **MH** in het aansluitingspunt van de motor (overeenkomstig norm EN 23964) tot het vast klikt. Houd de motor en het **MH** hiervoor in elkaars verlengde.

Bij sommige motoren moet de knop aan de zijkant worden ingedrukt om te kunnen worden aangesloten. Trek voor elk gebruik voorzichtig aan het **MH** om te controleren of deze correct is aangesloten op het aansluitpunt van de motor.

Functietest


⚠ Laat de motor in de normale richting draaien (het **MH** functioneert niet als de motor in tegengestelde richting draait), en trek voorzichtig aan het van te voren aangekoppelde instrument (zie paragraaf 6.4: 'Aan- en loskoppelen van een instrument') totdat u een lichte klik voelt om het systeem te vergrendelen. Controleer of het **MH** gelijkmatig loopt.

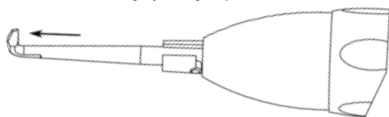

⚠ LET OP: als u merkt dat het **MH** tijdens het gebruik warm wordt, onregelmatigheden vertoont, trilt en/of abnormale geluiden maakt, neem dan onmiddellijk contact op met uw erkende reparateur.

6.2 Ontkoppelen van de motor (Uitsluitend voor de Safe Relax®):

⚠ LET OP: het **MH** mag alleen buiten de mond van de patiënt van de motor worden afgehaald en alleen als de motor is uitgeschakeld.

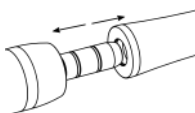

Trek het **MH** uit de motor en houd de instrumenten daarbij in elkaars verlengde.

Voor het ontkoppelen van het **MH** moet bij sommige motoren de knop aan de zijkant worden ingedrukt.

⚠ LET OP: als het **MH** lange tijd niet wordt gebruikt, laat het dan niet aan de motor worden aangesloten zitten om te voorkomen dat er olie in de motor druipt.

6.3 Instelmogelijkheden (Uitsluitend voor de Safe Relax®):

Instellen van slagfrequentie:

De slagfrequentie houdt direct verband met de rotatiesnelheid van de motor. Maximumsnelheid: 25.000 tpm. Hoe hoger de aandrijfsnelheid, des te hoger de slagfrequentie (de slagen volgen elkaar snel op). Omgekeerd leidt verlaging van de motorsnelheid ertoe dat de slagen elkaar langzamer opvolgen.


Het overzicht hieronder geeft een indicatie van de verhouding toerental van motor/slagfrequentie:

tpm	10000	12000	15000	20000	25000
slagen/min	400	500	600	800	1000

Instellen van slagfrequentie:

De automatische kroonverwijderaar is voorzien van een ring voor snelheidsinstelling. Hiermee kunnen vijf standen worden ingesteld, zodat de snelheid kan worden afgestemd voor elk klinisch geval.

De snelheidsstanden als volgt gedefinieerd, van lage tot hoge snelheid:

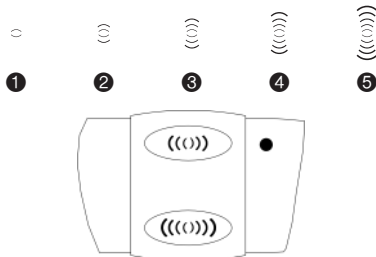

LET OP: de gewenste stand (hier 5) moet worden geplaatst tegenover het Safe Relax-logo.

⚠ Wij raden u aan om na analyse van het klinische geval de behandeling te plannen met ruime tussenpozen en een beperkte intensiteit, en deze parameters daarna indien nodig op te voeren.

Het is belangrijk om voor elke ingreep te controleren of het **MH** goed functioneert; doe dit buiten de mond van de patiënt.

6.4 Aan- en loskoppelen van een instrument:

(Gemeenschappelijke voor Safe Relax® en Safe Remover®)


ⓘ Draag bij elk gebruik van instrumenten zo veel mogelijk beschermende handschoenen (ter voorkoming van letsel).

⚠ Controleer de staat van de gebruikte instrumenten en behandel ze voorzichtig en op de juiste manier.


Bij het aan- of loskoppelen van een instrument moet de motor altijd zijn uitgeschakeld* en zich buiten de mond van de patiënt bevinden (met uitzondering van de kabels).

*Uitsluitend voor de Safe Relax®

Plaatsen en vastklikken van het instrument:

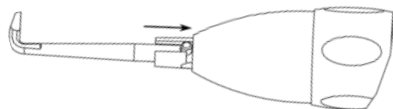

• Steek het instrument (ATD-opzetstuk met haak of draad) zo diep mogelijk in de bajonetsluiting van de kroonverwijderaar.

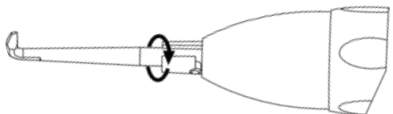


• Draai een kwart slag naar links om de pin in blokkeerstand te brengen.


• Controleer bij elke instrumentwissel of het instrument goed is geplaatst door er voorzichtig aan te trekken.

6.5 Gebruik van de haken:


(Gemeenschappelijke voor Safe Relax® en Safe Remover®)

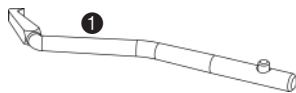


1. Contra-gebogen haak voor achterste elementen: ref. 5928

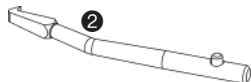

2. Eenvoudige haak voor voorste elementen: ref. 5927

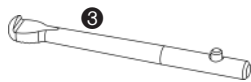

3. Platte haak met met antislipgroeven: ref. 5929

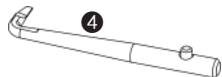

4. Haak voor bruggen: ref. 5925

6.6 Gebruik van ATD-opzetstuk met draad:



(Gemeenschappelijke voor Safe Relax® en Safe Remover®)

Brug:

1. Steek de draad in de interdental opening, in de buurt van de ondersteunde pijler en laat de draad er aan de andere kant (bij het gehemelte of de lippen/wangen) weer uitkomen.



Sluit de lus door het puntige draaduiteinde in de daarvoor bestemde groeve te steken. Kabel van 50 mm: voor snij- en hoektanden

Kabel van 60 mm: voor kiezen

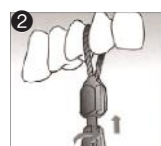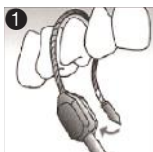

2. Sluit het opzetstuk met draad aan op de kroonverwijderaar. (Zie paragraaf 6.4: 'Aankoppelen van een instrument')

3. Zet de kroonverwijderaar aan.

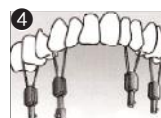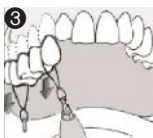

4. Voor het plaatsen van een grote brug:

- Gebruik meerdere opzetstukken met draad zodat deze niet steeds verplaatst hoeven te worden.
- Verplaats de kroonverwijderaar van het ene opzetstuk met draad naar het andere

in de aangegeven richting om de trekkracht over de verschillende pijlers te verdelen.

Inlay-core:


Boor voor het verwijderen van een inlay-core een horizontaal gat met een diameter van ten minste 1 mm (vanaf de lippen/wangen naar de tong/het gehemelte).

Steek de draad erdoor en volg verder de procedure voor de verwijdering van een brug.



Richmond:

Voer voor het verwijderen van een Richmond (stiftand) dezelfde procedure uit als het voor het verwijderen van een inlay-core.

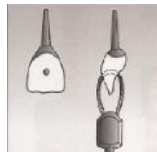


CERAM-opzetstuk met draad:

Voor het verwijderen van een keramische brug (zonder metalen armatuur), een keramisch-metalen brug of een tijdelijke brug op evenwijdig geplaatste pijlers:

Neem een CERAM-opzetstuk voorzien van een draad van 95 mm voor het verwijderen van een brug met 3 elementen of van 150 mm voor een brug met 4 elementen.


- Steek de draad vanaf de lippen/wangen of vanaf het gehemelte/de tong door de eerste interdental ruimte, te beginnen bij het voorste element van de brug.

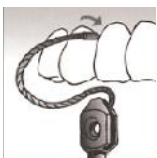


- Steek de draad van voor naar achter door de opening van het opzetstuk.




- Steek de draad in de volgende interdental ruimte naar de lippen/wangen of het gehemelte/de tong.

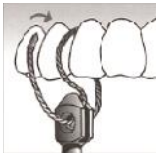

- Sluit de lus door het puntige draaduiteinde in de daarvoor bestemde groeve te steken.

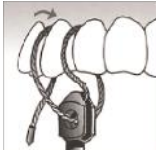

- Doe dit indien nodig nog een derde keer. Sluit het opzetstuk met draad aan op de kroonverwijderaar en zet het systeem aan.

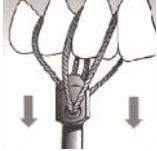

Wisselen van de kabel:

- Draai de schroef los (bij voorkeur boven een blad om kwijtraken te voorkomen).

- Plaats het korte, niet-puntige uiteinde van de nieuwe draad in de schroefdraadopening (gemarkeerd met 0) en draai de schroef weer zover mogelijk aan.

Levensduur van de MH

Alle onderdelen van de **MH**, hebben onder voorwaarde dat ze voor correct worden gebruikt, een levensduur van 250 sterilisatiecycli. Deze aanwijzingen vormen echter gezamenlijk een bindende garantie, want slijtage kan afhankelijk van de manier waarop het **MH** is onderhouden, vroegtijdiger optreden (schoonmaken en sterilisatie)

VII. HYGIËNE EN ONDERHOUD

⚠ Sterilisatie van herbruikbare **MH** moet worden gedaan door goed opgeleid en beschermd personeel, waarbij de geldende voorschriften in acht moeten worden genomen. Het sterilisatieprotocol moet zijn afgestemd op het infectierisico.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

- Raadpleeg voor elk gebruik product de instructies van de fabrikant.
- Let daarbij vooral op de instructies met betrekking tot concentraties, inwerkingstijd, vervanging van oplossingen en levensduur van producten.
- Gebruik uitsluitend producten die bestemd zijn voor het onderhoud van medisch-chirurgische materialen.
- Gebruik geen ontsmettingsmiddelen bestemd voor de huid en slijmvliezen. Gebruik uitsluitend producten met een neutrale of licht basische pH. Gebruik geen producten met aldehyden, alcoholen of andere stoffen die eiwitten zouden kunnen doen stollen.
- Gebruik uitsluitend producten die compatibel zijn met roestvrij staal [vrij van chloorverbindingen].
- Draag geschikte beschermende kleding. Om elk risico van besmetting en verwonding te vermijden is het absoluut noodzakelijk beschermende handschoenen te dragen.
- Meng in geen geval producten met elkaar. Neem voor alle gebruikte producten de nationaal geldende verwijderingsvoorschriften in acht.
- Prepareer voor desinfectie, reinig, desinfecteer, smeer* en steriliseer het **MH** na elke ingreep.

*Uitsluitend voor de Safe Relax®

7.1 Preparatie voor desinfectie:

(uit te voeren direct na de ingreep) Alle handelingen met betrekking tot het **MH** moeten worden uitgevoerd met uitgeschakelde of niet-aangesloten motor.

- Prepareer het Safe Relax® voor desinfectie door middel van vaporisatie of met behulp van doekjes doordrenkt met een microbiologisch gecontroleerd detergens/desinfectans.
- Het Safe Relax® niet onderdompelen in desinfectie- of ultrasone baden.
- Voor de Safe Remover®, door middel van onderdompeling in een desinfectiebad of in een bak met ultrasone geluiden.

7.2 Reiniging:

- Borstel en spoel elk onderdeel van het **MH** onder gedemineraliseerd water.
- Droog het **MH** met een absorberende doek of perslucht.

7.3 Desinfectie:

- Desinfecteer het **MH** met behulp van desinfecterende doekjes (bij voorkeur) of vaporisatie.
- Neem hierbij de instructies van de fabrikant in acht.

7.4 Smeren (Uitsluitend voor de Safe Relax®):

• Smeer het **MH** na elke ontsmetting en voor elke sterilisatie (herhalen bij langdurig gebruik).

- Houd verwijderd van elke warmte- en ontstekingsbron. Let op dat u hierbij niet mag roken!
- Gebruik een beschermend gezichtsmasker.
- Koppel het instrument los van het **MH**.
- Steek de spuitbus aan de achterkant in het **MH**.
- Controleer of u het juiste opzetstuk van de spuitbus voor dit **MH** gebruikt.
- Bedek de kop van het **MH** met een vochtige doekje.
- Richt de kop van het **MH** naar beneden.
- Houd het **MH** goed vast en spuit er een aantal keer in totdat de naar buiten stromende vloeistof helder is.
- Veeg overtollige olie met een zachte of vochtige doek weg.

7.5 Functietest (Uitsluitend voor de Safe Relax®):

☐ Voor de functietest uit voor elke sterilisatie.

Sluit het **MH** aan op de motor en richt de kop naar beneden. Laat de motor eerst gedurende 30 seconden op lage snelheid (5000 tpm) draaien om overtollige olie af te voeren en vervolgens gedurende 30 seconden op volle snelheid (25.000 tpm). Veeg het **MH** af met een desinfecterend doekje als er olie uitkomt.

LET OP: als u merkt dat het **MH** tijdens het gebruik warm wordt, onregelmatigheden vertoont, trilt en/of abnormale geluiden maakt, neem dan onmiddellijk contact op met uw erkende reparateur.

7.6 Sterilisatie:

☐ Het **MH** wordt niet-steriel geleverd. Het moet voor het eerste gebruik en vervolgens ook na elk gebruik worden gesteriliseerd.

- Steriliseer alleen instrumenten die vooraf zijn geprepareerd voor desinfectie, gereinigd, ontsmet, gesmeerd* en getest.
- Het instrument mag uitsluitend in een stoomautoclaf worden gesteriliseerd bij 135 °C en 2,13 bar (275 °F en 30,88 psi) gedurende 20 minuten (duur van de sterilisatie).
- Wij raden u dringend aan een klasse-B-autoclaf te gebruiken.
- Elke andere manier van sterilisatie moet worden vermeden.

☐ Lees de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de autoclaaf.

- Koppel het instrument los van het **MH** voor de sterilisatie.
- Gebruik sterilisatiezakjes die overeenkomstig de geldende norm zijn aangepast voor het **MH** en de autoclaaf. Gebruik altijd voor elk **MH** een apart zakje.
- Zorg voor voldoende ruimte tussen de zakjes en belast de autoclaaf niet te zwaar.
- Controleer of het instrument geen roestplekjes of barstjes vertoont, en of het goed functioneert. Verzeker u ervan dat het instrument goed droog is. Verwijder eventueel achtergebleven vocht met medische perslucht.
- Controleer na elke sterilisatieprocedure of er geen water in of op het zakje is achtergebleven. Verifieer of de kleurindicator van de doorstroming correct is veranderd.
- Om het achterblijven van water te voorkomen: plaats het zakje dusdanig in de autoclaaf dat alle holle delen naar beneden gericht zijn.
- Bescherm de instrumenten in de sterilisatiezakjes tegen licht, vocht en besmetting van welke aard ook. Volg de instructies van de fabrikant van de sterilisatiezakjes.
- De bewaarperiode van het instrument na sterilisatie is maximaal 1 maand. Voorzie de instrumenten van een etiket met de vervaldatum. Herhaal na de vervaldatum de reinigings- en sterilisatieprocedure.

*Uitsluitend voor de Safe Relax®

VIII. REPARATIE

Neem als het instrument kapot gaat contact op met uw erkende leverancier of rechtstreeks met onze klantenservice.

⚠ Bij reparaties moeten altijd door de fabrikant goedgekeurde onderdelen en samenvoegingen worden gebruikt. De reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende leverancier of door de klantenservice van Anthogry.

Voor elke revisie of reparatie moet het instrument in zijn geheel en steriel worden teruggestuurd met een bewijs van sterilisatie.

Daarnaast moet er een document worden bijgevoegd met een beschrijving van het probleem en alle contactgegevens van de tandarts.

Voor het in behandeling nemen van garantieaanvragen moet bij het instrument een kopie van de factuur of een vrachtbrief worden gevoegd.

Voor elke revisie of reparatie moet het complete **MH** worden opgestuurd.

Losse vervangingsonderdelen zijn gegarandeerd verkrijgbaar tot 7 jaar na het uit de handel nemen van het product.

CONTACTGEGEVENS KLANTENSERVICE

Klantenservice

Anthogyr

2237, Avenue André Lasquin - 74700 Sallanches - FRANKRIJK

Telefoonnummer: +33 (0)4 50 58 50 53

E-mail: s.serra.sav@anthogyr.com

IX. ACCESSOIRES

 Te bestellen bij uw erkende leverancier. Gebruik UITSLUITEND accessoires van Anthogyr.

Beschrijving	Ref.
Eenvoudig ATD-opzetstuk met draad	ATD012
CERAM ATD-opzetstuk	ATD022
ATD-kabels 50 en 60 mm (per 4)	ATD014
ATD-kabels 95 en 150 mm (per 4)	ATD024
M2x3-schroeven voor opzetstuk met draad	ATD080
Schroeven voor opzetstuk met draad	ATD082
Set van 4 kabels lg 50 mm	ATD014-50
Set van 4 kabels lg 60 mm	ATD014-60
Set van 4 kabels lg 95 mm	ATD014-95
Set van 4 kabels lg 150 mm	ATD014-150
Haak voor bruggen	5925
Eenvoudige haak voor kronen op voorste elementen	5927
Contra-gebogen haak voor kronen op achterste elementen	5928
Platte haak met antislipgroeven	5929
Demontagesleutel voor kop	87M

X. GARANTIES

Op dit **MH** wordt garantie geboden tegen materialen fabricagefouten voor een periode van 12 maanden met ingang van de factuurdatum.

Deze garantie geldt niet voor aan slijtage onderhevige onderdelen.

Elke verandering of toevoeging die zonder uitdrukkelijke toestemming van Anthogyr aan het product is aangebracht leidt tot nietigverklaring van deze garantie.

Bij het niet naleven van de technische instructies die bij de apparatuur werden geleverd, vervalt de garantie.

Anthogyr kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade en de consequenties daarvan die het gevolg (kunnen) zijn van normale slijtage, incorrecte toepassing, reiniging of onderhoud, het niet navolgen van de instructies met betrekking tot gebruik of aansluiting, kalkaanslag of roest, verontreiniging in het systeem van watertoevoer, abnormale chemische of elektrische invloeden, of het niet naleven van de instructies voor gebruik, onderhoud en montage van Anthogyr en andere instructies van de fabrikant.

De vervoerskosten voor het terugsturen van goederen naar Anthogyr zijn voor rekening van de klant, zelfs als de reparatie onder de garantie valt.

De garantie dekt wel de kosten voor het terugsturen van het materiaal naar de klant.

Voor het in behandeling nemen van garantieaanvragen moet bij het instrument een kopie van de factuur of een vrachtbrief worden toegevoegd.

XI. VOORWAARDEN VOOR OPSLAG EN VERVOER



XII. PRODUCTVERWIJDERING

Volgens de huidige stand van de kennis bevat het product geen milieuvriendelijke stoffen.

Het product moet voor verwijdering worden gesteriliseerd.

Neem hierbij de nationaal geldende verwijderingsvoorschriften voor medisch-chirurgische apparatuur en instrumenten in acht.

2237 avenue André Lasquin
74700 SALLANCHES - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 50 58 02 37
Fax +33 (0) 4 50 93 78 60
N°SAV / Repairs :
+33 (0) 4 50 58 50 53
E-mail : sales@anthogyr.com
www.anthogyr.com