

per la scelta della tinta opaca più idonea **(O1-05)**. Utilizzare l'area incisale, occlusale o prossimale del dente naturale come orientamento per la scelta della tinta traslucente **(TL/TN/TD)**.

Nota: Iniziare applicando uno strato della tinta opaca prescelta al difetto (in direzione vestibolare) in cavità di classe III, IV, e V. L'aspetto globale della tinta del restauro può essere influenzato e progettato mediante la scelta delle tinte traslucenti per lo strato vestibolare di finitura. La tinta base opaca può essere **scurita** applicando uno strato di tinta traslucente **TL** scurita con **TL**.

Applicare uno strato di tinta opaca corrispondente secondo l'usuale tecnica di stratificazione in cavità di classe I e II. Dopo di che, applicare una tinta traslucente come strato di smalto a conclusione del restauro.

