

#whdentalwerk



video.wh.com

Jetzt bei Ihrem
Fachhändler oder
auf **wh.com**



Neue Adapterlösung

„**QUICK CONNECT BY W&H**“

für Assistina Twin

Sehr geehrte Damen und Herren!

Wir dürfen Ihnen mitteilen, dass wir im Zuge der Reparatur Ihr Gerät auf unser neues innovatives Adaptersystem zur noch effizienteren Gestaltung Ihres Workflows angepasst haben. **Diese Anpassung ist für Sie völlig kostenlos!**


Das Gerät wurde mit 2 neuen Pumpen (1 Pumpe pro Kammer), welche als Anschluss das neue Kupplungssystem „Quick Connect by W&H“ haben, ausgestattet. Zudem erhalten Sie zwei Adapter „Quick RM“ und einen Adapter „Quick ISO“ gratis, um auch mit dem geänderten Gerät sofort einsatzfähig zu sein.



1 Anpassungen

Die Anpassung am Gerät und bei den Adaptern kann aus der folgenden Tabelle entnommen werden:

NEU

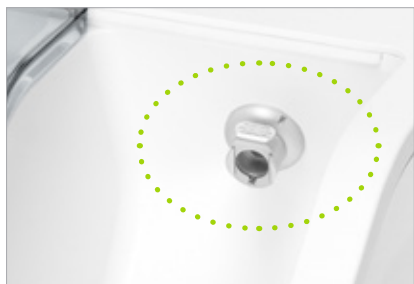

Assistina Twin
mit **Quick
Connect by
W&H**

ALT



Assistina Twin
alte Version



Kupplungs-
system mit 2
Adaptern
**Quick RM und
Quick ISO**



RM-Anschlüsse
am Kupplungs-
system der
Kammern und
HPI Adapter

2 Vorteile

Mit dieser neuen Ausstattung können wir Ihnen folgende Vorteile liefern:

- › **Einfache Bedienung** – dank einfacherem und noch schnellerem Aufstecken/Entnehmen von Übertragungsinstrumenten mittels Entriegelungsknopf
- › **Mehr Flexibilität** – dank der Möglichkeit mehrere Adapter bereits im Vorfeld und außerhalb des Gerätes vorzubereiten, um danach einen schnellen Adapterwechsel zu gewährleisten
- › **Verbesserte Arbeitsabläufe** – dank schneller Anbindung mit Quick ISO- oder Quick RM-Adapter
- › **Individualisierung** – dank individueller Zusammenstellung nur derer Adapter, die wirklich benötigt werden
- › **Universeller Einsatz** – für Turbinen, Hand- und Winkelstücke von W&H und auch anderer Hersteller (siehe Systemübersicht Adapterportfolio)
- › **Kompatibilität** – künftige Anbindungsmöglichkeiten bei anderen Aufbereitungsgeräten

3 Handling


Die detaillierten Erläuterungen zum Bestücken und Entnehmen mit Quick ISO sowie Quick RM entnehmen Sie bitte den folgenden – ebenfalls beigelegten – Dokumenten:

- › Gebrauchsanweisung: Kapitel „Betrieb“
- › Quick Start Manual

4 Adapterportfolio

Aus den beiden neuen Adaptern in Kombination mit den weiteren bereits bestehenden W&H Adaptern ergibt sich für die Assistina Twin ein neues Adapterportfolio, das in der folgenden Systemübersicht dargestellt ist:

Hand- und Winkelstücke

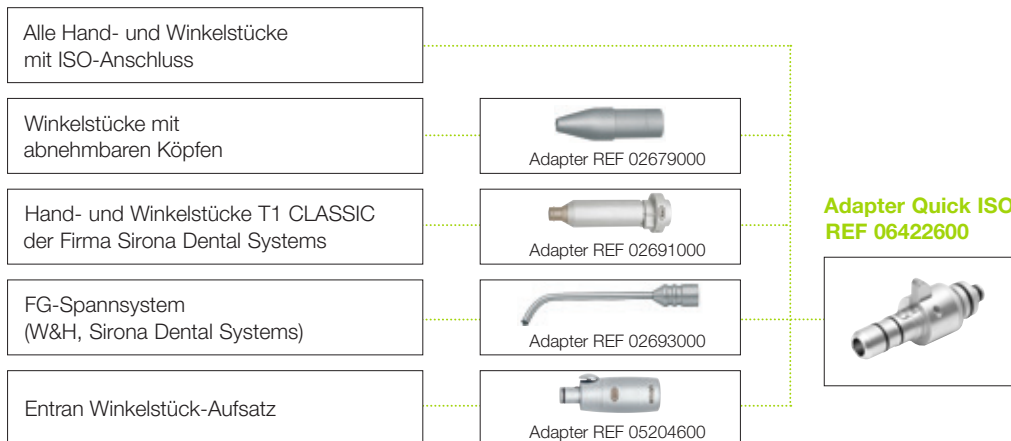

Turbinen

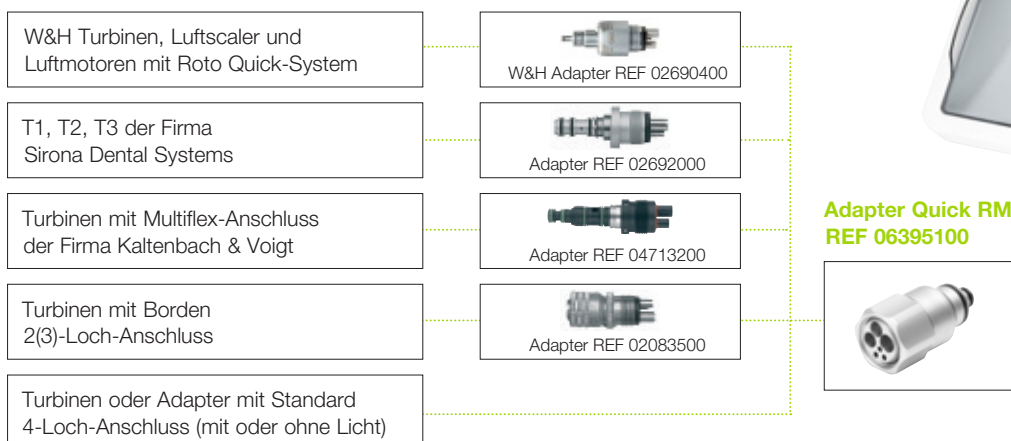


Abb. Symbolfotos. Zusatzausstattung und Inhalt der gezeigten Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang enthalten.

20533 ADT Rev. 000 / 25.05.2020
Änderungen vorbehalten