

Wissen wie's geht – optimale Hygiene und Pflege



Aufbereitung von W&H Chirurgie Hand-/Winkelstücken und Chirurgie-Motoren

Hinweise zur Aufbereitung



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Übertragungsinstrumente und Dentalmotoren sind für die Sterilisation zugelassen.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Übertragungsinstrumente und Motoren können im RDG (Reinigungs- und Desinfektionsgerät) thermisch gereinigt und desinfiziert werden.

Diese Hygiene- und Pflegeempfehlungen gelten insbesondere für W&H Übertragungsinstrumente und Chirurgie-Motoren.

Allgemeine Hinweise

- › Reinigen und desinfizieren Sie das Hand-/Winkelstück sofort nach jeder Behandlung.
- › Benutzung von Schutzkleidung (reißfeste Handschuhe, Brille, evtl. Mundschutz) wird empfohlen.
- › Detaillierte Angaben in der Gebrauchsanweisung der Hersteller beachten.
- › Für W&H Übertragungsinstrumente und Chirurgie Motoren zertifizierte, geprüfte Desinfektionsmittel verwenden und die entsprechende Dosierung und Einwirkzeit beachten. Das verwendete Desinfektionsmittel darf kein Chlor enthalten.
- › Saubere, trockene Antriebsluft verwenden.
- › W&H empfiehlt die Verwendung von demineralisiertem Wasser.
- › Bitte beachten Sie die detaillierten Informationen unter wh.com

1

Vorbereiten



2

Reinigen / Trocknen

Manuell



Maschinell



3

Desinfizieren / Trocknen



Sichtkontrolle



Hinweise des RDG-Herstellers beachten!
 Zusammengebaute Übertragungsinstrumente auf entsprechenden Adaptern oder im zerlegten Zustand in den RDG geben.



4

Ölpflegen

Manuell



Häufigkeit der Pflege:

- › Nach jeder Innenreinigung
- › vor jeder Sterilisation

Maschinell



5

Verpacken / Sterilisieren



W&H empfiehlt Sterilisatoren nach EN 13060. Bitte achten Sie darauf, dass das Ladegut nach der Thermodesinfektion/Sterilisation trocken ist!

6

Freigeben



7

Lagern



Staubfrei, sauber und trocken.

Nähere Information unter wh.com/hygiene

Hersteller:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
 51111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-0
 f +43 6274 6236-55
 office@wh.com
wh.com

Vertrieb:

W&H Deutschland GmbH
 Raiffeisenstraße 3b
 83410 Laufen, **Deutschland**
 t +49 8682 8967-0
 f +49 8682 8967-11
 office.de@wh.com
wh.com

W&H Austria GmbH
 Ignaz-Glaser-Straße 53
 51111 Bürmoos, **Austria**
 t +43 6274 6236-239
 f +43 6274 6236-890
 office.at@wh.com
wh.com

W&H CH-AG
 Industriepark 9
 8610 Uster, **Schweiz**
 t +41 43 4978484
 f +41 43 4978488
 info.ch@wh.com
wh.com