

BEAUTIFIL Flow Plus

Injizierbares Hybrid-Komposit
für den Front- und Seitenzahn



PRG
Technology
Giomer




Stark wie ein Hybrid-Komposit...


Das Beautifil-Restaurationssystem überzeugt vor allem durch seine schmelz- und dentinähnliche Diffusion und Transmission des Lichts, seine hervorragende Modellierbarkeit und seine Fähigkeit zur Abgabe und Aufnahme von Fluorid dank patentierter Füllertechnologie.

Beautifil Flow Plus ist der nächste Schritt bei der Entwicklung restaurativer Werkstoffe und verbindet die Applikationseigenschaften eines Flows mit der Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Ästhetik von stopfbaren Hybrid-Kompositen.

Beautifil Flow Plus ist für jede Indikation freigegeben – einschließlich okklusale belasteter Flächen und approximaler Ränder. Mit verbesserten Handling-Eigenschaften, die eine injizierbare Applikation erlauben, war die Restauration von Seitenzähnen nie einfacher. Zudem reduziert die Fähigkeit zur Freisetzung und Aufnahme von Fluorid sowie die Widerstandsfähigkeit gegen bakterielle Besiedlung das Auftreten von Sekundärkaries.

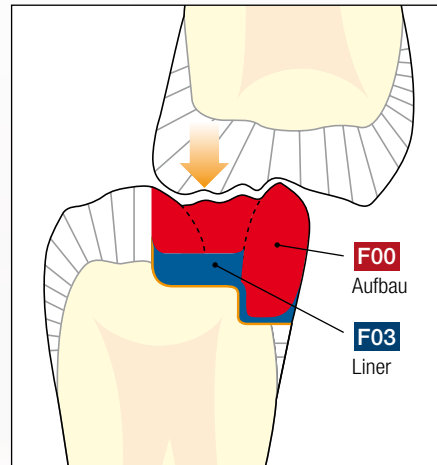


Okklusale Belastung

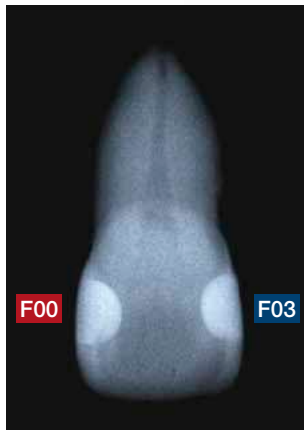

Die Plus-Punkte für Sie

- Restorationen Klasse I bis Klasse V
- Geeignet für Okklusalfächen
- Leichtes, injizierbares Auftragen
- Chamäleoneffekt für natürliche Ästhetik
- Nachhaltige Fluoridfreigabe und -aufnahme
- Außergewöhnliche Röntgenopazität

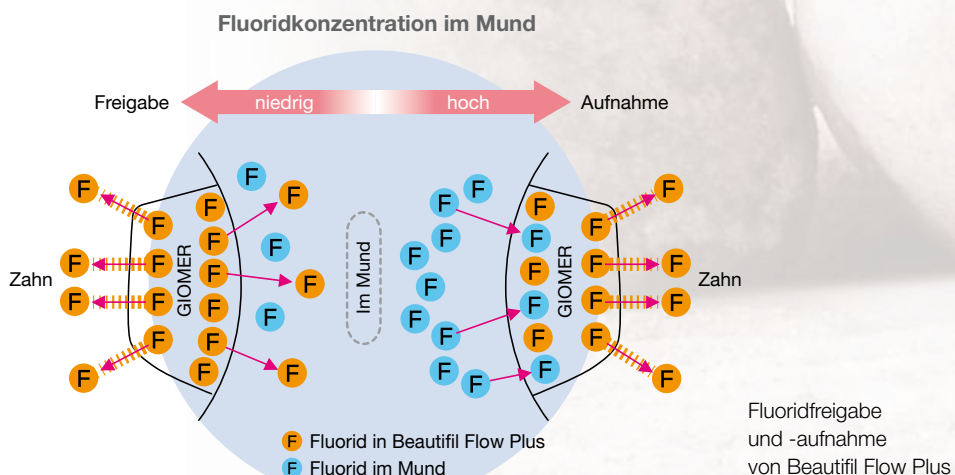

...applizierbar wie ein Flow

Fall 1 – Klasse-I-Restauration



Vorher



Nachher

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ken Kobayashi

Fall 2 – Restauration einer defekten Goldinlay-Versorgung



Vorher



Nachher

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Naohiko Akimoto, Tsunami Universität, Japan

Natürliche Ästhetik mit hervorragender Polierbarkeit

Dank der großen Farbpalette können Sie Ihren Patienten ein rundum sicheres, fluoridabgebendes Kompositssystem mit exzellenter Ästhetik bieten. Die für einen Chamäleoneffekt optimierten Grundfarben fügen sich harmonisch in die umgebende Zahnschubstanz ein.

Die einzigartige Ausgewogenheit von Matrix und Füllkörpern sorgt für eine hervorragende Polierbarkeit, die einen lang anhaltenden Glanz garantiert.

F00

A1	A2	A3	A3,5	A4	
B1	B2	C2	D2		
SA0,5	SA0,50	A10	A20	Inc	BW

F03


A1	A2	A3	A3,5	A4		
B1	B2	C2	D2			
SA0,5	A20	A30	Inc	BW	MI	CV



„Resin Cone“-Technik

Präparieren Sie den Zahn einfach in der Technik Ihrer Wahl, wenden Sie ein Adhäsiv an (z.B. BeautiBond Universal, BeautiBond oder FL-Bond II), applizieren Sie Low Flow als Liner und bauen Sie die Okklusalfäche mit Zero Flow auf.

Mit dem selbstnivellierenden Beautifil Flow Plus gelingen Applikation und Politur leichter als je zuvor!

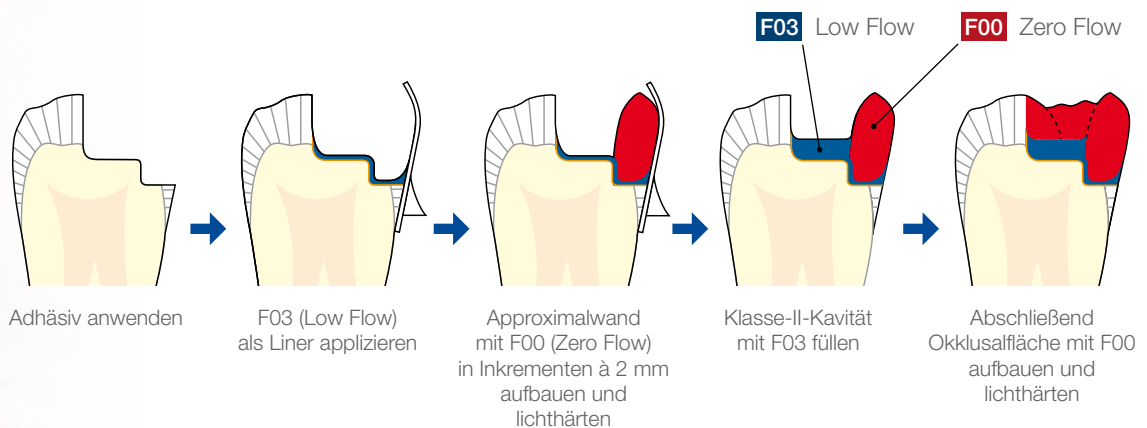


Zuverlässige Festigkeit und Dauerhaftigkeit

Auf der Grundlage der Druckbelastungsfähigkeit von Beautifil Flow Plus kann das Material sowohl in klassischer Flow-Indikation wie auch als finale Materialschicht für die okklusale Oberfläche eines Zahns verwendet werden.


BEAUTIFIL Flow Plus im Vergleich zu stopfbaren Hybrid-Kompositen

Druckfestigkeit

Die Druckfestigkeit von Beautifil Flow Plus ist gleich oder besser als die führender Hybrid-Komposite und ideal für Restaurationen der Klasse I und Klasse II.

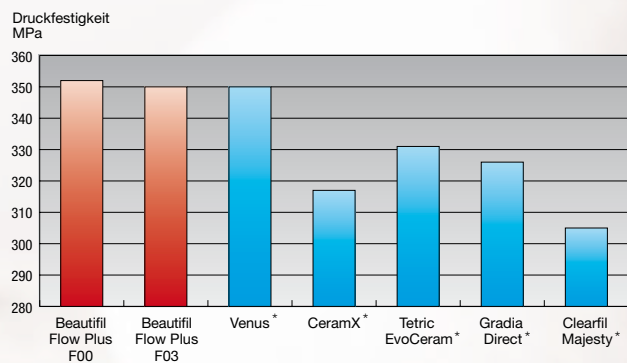

Zahnbürsten-Abrasionstest
Gew.-%

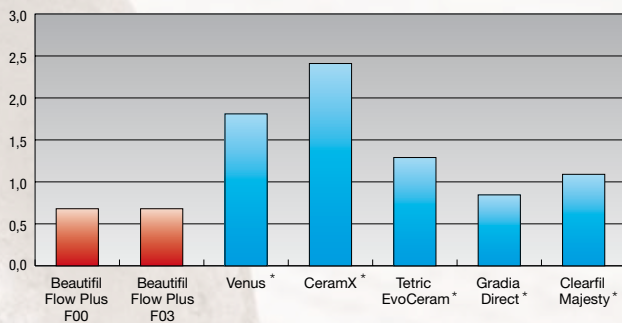


Abriebfestigkeit

Eine extrem hohe Verschleißfestigkeit sorgt für beständige Ästhetik mit hohem Glanz über die gesamte Lebensdauer der Restauration.

Biegefestigkeit

Aufgrund hoher Biegefestigkeit und entsprechender Widerstandsfähigkeit gegen plastische und elastische Deformation eignet sich Beautifil Flow Plus ideal zur Gestaltung okklusal belasteter Oberflächen.

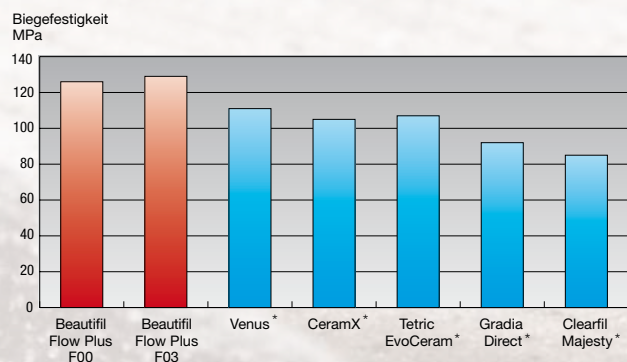

Bestellinformationen



BEAUTIFIL Flow Plus F00

Injizierbares Hybrid-Komposit, Spritzen mit jeweils 2,2 g und Tips mit 0,21 g in den Farben SA0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, SA0,5O, A1O, A2O, Incisal, Bleaching White



BEAUTIFIL Flow Plus F03

Injizierbares Hybrid-Komposit, Spritzen mit jeweils 2,2 g und Tips mit 0,21 g in den Farben SA0,5, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2, D2, A2O, A3O, Incisal, Bleaching White, Milky, Cervical



BEAUTIFIL Flow F02

Fluorid freisetzendes Flow-Komposit, Spritzen mit jeweils 2 g in den Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, A3O, G (Gum)



BEAUTIFIL Flow F10

Fluorid freisetzendes Flow-Komposit, Spritzen mit jeweils 2 g in den Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, A3O, A3T



BEAUTIFIL II

Fluorid freisetzendes Komposit, Spritzen mit jeweils 4,5 g und Tips mit 0,25 g in den Farben A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, Incisal, Bleaching White, A2O, A3O (Tips nicht in B3, C3)



BEAUTIFIL OPAQUER

Fluorid freisetzendes, stark deckendes Flow-Komposit, Spritzen mit jeweils 2 g in den Farben UO (Universal Opaque) und LO (Light Opaque)



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL GmbH Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany, www.shofu.de

SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.

Official Partner



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry

410201 - 08/2019