



Bisi-White Office

Professional In-Office Teeth Whitening System

Bisi-White Office ist ein leistungsstarkes, professionelles In-Office Bleaching-System für Zahnarztpraxen, das schnelle und sichtbare Aufhellungsergebnisse ermöglicht - ganz ohne Lampe. Das komplette System bietet eine einfache Anwendung, maximale Effizienz und überzeugende ästhetische Resultate für Ihre Patienten.

Dank der hochwirksamen 35 % Wasserstoffperoxid-Formel werden selbst starke Verfärbungen zuverlässig aufgehellt. Die Behandlung erfolgt in nur 30 Minuten (3 × 10 Minuten) und lässt sich problemlos in den Praxisalltag integrieren.



Komplettsset



Keine Lampe



Geringer
Investitionsaufwand



Made in Germany



Warum Bisi-White Office?

Professionelles Bleaching in nur 30 Minuten

Effektive Aufhellung in drei kurzen Behandlungszyklen.

Kein Lampen erforderlich

Die Aufhellung funktioniert vollständig ohne Lichtaktivierung – dadurch entstehen keine zusätzlichen Geräteinvestitionen.

Automix-System für einfache Anwendung

Das Gel wird automatisch gemischt und kann präzise und direkt appliziert werden – ohne manuelles Anmischen.



Schonende, optimierte Formel

Neutraler pH-Wert und ideale Konsistenz sorgen für effektives, gleichzeitig zahnschonendes Bleaching.

Behandlungsablauf

- 1. Gingiva Protector auftragen**
und 20–40 Sekunden polymerisieren.
- 2. Bisi-White Whitening Gel applizieren**
und nach 10 Minuten entfernen (max. 3 Zyklen).
- 3. After-Bleaching Care auftragen**
zur Remineralisierung und Sensitivitätsprophylaxe.



Set Inhalt:

1,5g Bisi-Gingiva Protector inkl. 3 Appli Tips
5g Bisi-White Office 35% inkl. 3 Mixing-Tips
2ml Bisi-After Care

bisico[®]

