



Un sorriso attraente in totale sicurezza ed affidabilità

Fabbricato in materiale chiaro/trasparente, l'allineatore CA® CLEAR ALIGNER è appena percettibile alla vista. Permette il trattamento ortodontico riducendo al minimo problemi di fonazione e non toglie il sorriso. È facilmente tollerabile nel cavo orale grazie alla sua morbidezza ed alla sua forma.

L'allineatore è liscio e confortevole, non ci sono attacchi e fili d'acciaio. Non ostacola i pasti e l'igiene orale perchè puoi togliere il tuo CA® CLEAR ALIGNER per mangiare e per lavarti i denti.

Il diagramma di flusso per ottenere risultati ottimali nel trattamento.

1 Consiglio

Parlane con il tuo Dentista circa le possibilità di trattamento del tuo problema ortodontico con il sistema CA® CLEAR ALIGNER.

2 Impronte/Scansione

Le impronte/scansione delle tue arcate dentali superiori ed inferiori sono indispensabili per il progetto clinico ed il preventivo economico.

3 Fabbricazione dell'allineatore

Il laboratorio certificato, con l'ausilio di un software di ultima generazione, esegue la progettazione tecnica del trattamento, su indicazione del tuo Dentista e gliela sottopone per l'approvazione finale.

4 Trattamento

Il tuo Dentista, responsabile del trattamento, controlla regolarmente i progressi ottenuti con gli allineatori, adatta la terapia alle tue esigenze, decide quando rilevare le impronte per fabbricare gli allineatori successivi.

 CLEAR ALIGNER



Liberate il vostro sorriso in ogni situazione.

L'arte della correzione dentale trasparente

Maggiori informazioni su:

www.ca-clear-aligner.com

IT 1.000/12/20 G REF 0159.04



Delicatamente efficace e tempestivo.

La correzione delle malocclusioni con gli allineatori estetici CA® CLEAR ALIGNER è una importante forma di terapia nella moderna ortodonzia, particolarmente nel trattamento delle malocclusioni negli adulti. Consente una terapia ottimale associata ad elevato confort del paziente.

Le possibilità di utilizzo degli innovativi allineatori CA® CLEAR ALIGNER sono molto versatili:

I vantaggi in un colpo d'occhio.

efficace

Risultato preciso ed ottimale riducendo i tempi del trattamento.

igienico

Disinseribile per la sua pulizia, ottieni un risultato perfetto con l'ausilio di CETRON® polvere igienizzante.

economico

I costi della terapia con CA® CLEAR ALIGNER sono inferiori rispetto ad altri sistemi di trattamento delle malocclusioni con allineatori trasparenti.


CLEAR ALIGNER



rimovibile

L'allineatore è facilmente rimovibile in ogni momento: per esempio per mangiare o per lavarsi i denti.

trasparente

Puoi tranquillamente parlare e sorridere.

confortevole

L'allineatore è morbido e privo di parti metalliche.

Il sistema con 3 allineatori per ogni step.

Tre spessori differenti, quattro settimane di trattamento, un sorriso smagliante.

Il trattamento è costituito da 3 allineatori di diverso spessore che si indossano per 4 settimane.


Durante questo periodo l'allineatore fornisce una forza via via più energica che favorisce la correzione della malocclusione in maniera efficace, ma delicata, secondo la più aggiornata tecnica dell'arte di allineamento dentale con dispositivi trasparenti.

Caso studio 1

prima



dopo

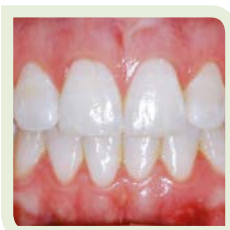

Caso studio 2



STEP 1

settimana 1

soft

settimana 2

medium

settimana 3

hard

settimana 4

hard

soft
0,5 mm



STEP 2

settimana 5

soft

settimana 6

medium

settimana 7

hard

settimana 8

hard

medium
0,625 mm



STEP 3

settimana 9

soft

settimana 10

medium

settimana 11

hard

settimana 12

hard

hard
0,75 mm



Chiedi informazioni al tuo Dentista.
Ti consiglierà al meglio.

www.ca-clear-aligner.com