

cetron®



Produit de soins et de nettoyage

pour plaques d'ortho, gouttières,
prothèses dentaires et protège-dents

Le soins spécifique

**pour plaques d'ortho, gouttières,
prothèses dentaires et protège-dents.**

Le contact avec les aliments, boissons et médicaments ainsi que le milieu buccal entraîne avec le temps des dépôts, changements de couleur et laisse un mauvais goût et de mauvaises odeurs sur vos gouttières, plaques d'orthodontie et prothèses dentaires.



Nettoyer et soigner professionnellement avec CETRON®

En achetant le **poudre de nettoyage CETRON®**, vous obtenez le produit de nettoyage optimum pour nettoyer vos appareils de façon rapide douce et permanente, tout en éliminant tous les dépôts. Vous pouvez l'utiliser pour le nettoyage des dépôts et le rafraîchissement de tous les appareils d'orthodontie ainsi que les prothèses dentaires. De plus, vous pouvez utiliser le **spray de soins CETRON®** immédiatement avant d'insérer votre appareil pour lui donner un gout encore plus fraîche au citron.




Le spray de soins à appliquer directement avant d'insérer votre appareil.

Les sachets pratiques de 15 g pour l'usage par le patient.


Application simple




Diluer le contenu du sachet dans 150 ml d'eau. Rincer l'appareil à nettoyer à l'eau claire et le mettre dans la solution.

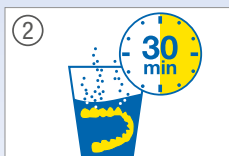

Laisser tremper pendant environ 30 min. La solution reste active pendant 3 à 4 jours au maximum.

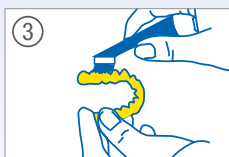

Enlever les dépôts restants avec une brosse à dents, puis rincer de nouveau à l'eau claire.

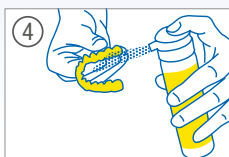

Appliquer le spray de soins CETRON® avant d'insérer l'appareil - pour un gout encore plus rafraîchissant au citron!

Remis par :

