



CleanJoy®

FLUORIDHALTIGE ZAHNREINIGUNGS- UND
POLIERPASTE IN DREI REINIGUNGSSTÄRKEN

Effektive Reinigung und dabei besonders schonend

Die Basis der Karies-, Parodontitis- und Periimplantitisprophylaxe ist neben der gründlichen häuslichen Mundhygiene eine regelmäßige, nach Bedarf abgestimmte, professionelle Zahnreinigung (PZR). CleanJoy, das Prophylaxe- und Reinigungspastensystem von VOCO, wurde entwickelt, um den Behandlungsablauf der Zahnreinigung so weit wie möglich zu vereinfachen und um dem Patienten abschließend ein positives Erlebnis zu vermitteln. CleanJoy ist in drei angenehmen Geschmacksrichtungen erhältlich: Kirsche, insbesondere für Kinder, Minze als klassischer Geschmack und Karamell als cremige Variante. Mit diesem System können gründlich und zugleich schonend sowohl harte als auch weiche Zahnbeläge und Verfärbungen von Zahnhartsubstanzen, Füllungen und prothetischen Restaurationen entfernt werden. Die kaum abrasive Paste „fein“ ist auch zur Politur nach dem Einsatz von Pulverstrahlgeräten geeignet. Durch die Verwendung von CleanJoy werden so spürbar glatte Oberflächen geschaffen, wodurch eine erneute Anhaftung von plaquebildenden Bakterien und Verfärbungen erschwert wird. Dies sind perfekte Voraussetzungen für eine langanhaltende Mundgesundheit.

Handling und Konsistenz

CleanJoy zeichnet sich durch seine gut angepasste Konsistenz und Homogenität aus. Die Prophylaxepaste ist standfest und zugleich weich. Dies ermöglicht eine exakte Dosierung und verhindert ein Spritzen der Paste bei ihrer Verwendung, unabhängig davon, ob mit Bürstchen oder Kelch gearbeitet wird. Die homogene Konsistenz und Standfestigkeit garantieren eine gute Benetzbarkeit und ein Verbleiben auf den zu behandelnden Oberflächen. Auch die abschließende Entfernung der Paste mit dem Wasserstrahl ist einfach durchführbar.

Das Ampelsystem – Drei Körnungen für optimale Ergebnisse

CleanJoy ist ein Reinigungssystem mit drei aufeinander abgestimmten Pasten, die auch einzeln durch Effektivität und Schonung der Zahnhartsubstanz überzeugen. Je nach Schweregrad der Ablagerungen und Verfärbungen kann entweder die „grobe“, „mittlere“ oder „feine“ Paste zum Einsatz kommen. Als abschließende Politur ist jedoch in jedem Fall die Anwendung der feinen Polierpaste erforderlich. Der jeweilige Abrasionsgrad ist dem Ampelsystem angepasst:

Rote Paste (grob – RDA-Wert* = 195): entfernt vor allem starke, hartnäckige Beläge und Verfärbungen effektiv und gleichzeitig schonend.

Gelbe Paste (mittel – RDA-Wert* = 127): optimale Beseitigung leichter bis mittlerer Beläge.

Grüne Paste (fein – RDA-Wert* = 16): entfernt leichte Beläge. Die grüne Paste ist zur abschließenden Politur nach Verwendung der roten und / oder gelben Paste/n erforderlich. Desweiteren kann sie auch nach dem Gebrauch eines Pulverstrahlgerätes angewendet werden.

* RDA-Wert gemäß DIN EN ISO 11609

Fluorid und Xylitol als optimale Grundlage bis zur nächsten PZR

Die CleanJoy Prophylaxepasten enthalten in jeder Abrasionsstufe Fluorid (700 ppm) und Xylitol. Das Fluorid hilft, die Zahnhartsubstanz zu stärken und wirkt remineralisierend. Glatte Oberflächen in Verbindung mit Xylitol erschweren die Ablagerung bzw. Ansiedlung von plaquebildenden Bakterien.

CleanJoy®

INDIVIDUELL ABSTIMMBAR

Fall 1



Leichte extrinsische Verfärbungen im Unterkiefer-Frontzahnbereich



Einsatz der gelben Reinigungspaste



Abschließende Politur mit der grünen Polierpaste



Saubere und glatte Zahnoberflächen

Fall 2



Starke extrinsische Verfärbungen im Unterkiefer-Frontzahnbereich



Bearbeitung der Zahnoberflächen mit der roten Paste



Abschließende Politur mit der grünen Polierpaste



Saubere und glatte Zahnoberflächen

Quelle: Dr. Sanzio Marques, Passos, Brasilien



Foto: Bonn Medien

Andrea Beyer, Zahnmedizinische Fachangestellte mit Schwerpunkt Prophylaxe und Kieferorthopädie, Münchhausen (Deutschland): „*Professionelle Zahnreinigungen werden von Patienten aller Altersgruppen immer stärker nachgefragt. Deshalb waren wir im Team lange auf der Suche nach einer Reinigungspaste, die hartnäckige Belege entfernt und sanft den Zahn reinigt. Außerdem wünschten wir uns mit Blick auf unsere jungen Patienten eine Prophylaxepaste, die sowohl bei Kindern im Allgemeinen als auch im Besonderen bei Kindern, die Multiband tragen, bedenkenlos angewendet werden kann. Eine Paste, die reinigt, ohne ein raues Gefühl zu hinterlassen oder die Brackets zu beschädigen.*

Mit CleanJoy von VOCO haben wir jetzt eine Paste gefunden, deren Anwendung Spaß macht und die dank der „Ampelfarben“ für jeden Patienten individuell nach Verfärbungsgrad der Zähne eingesetzt werden kann. Durch das Arbeiten von Rot (für größere Verfärbungen) nach Grün (für kleinere Verfärbungen) bleibt ein samtiges Gefühl ohne raue Stellen. Die besten Erfahrungen haben wir mit CleanJoy in Kombination mit Silikon-Reinigungskelchen gemacht.“

CleanJoy®

EINFACH PRAKTISCH

Indikationen

Entfernung oberflächlicher, weicher und harter Zahnbeläge

Entfernung extrinsischer Verfärbungen (z.B. Kaffee-, Tee- bzw. Tabakbeläge)

Politur von Zahnoberflächen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung, vor dem Bleichen und nach der Entfernung von KFO-Geräten

Reinigung und Politur von Füllungen im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung

Entfernen von Resten von temporärem Befestigungsmaterial vor dem definitiven Einkleben (Zementieren)



Vorteile

- Standfeste, homogene Konsistenz
- Spritzt nicht (2.000 - 3.000 U / Min.)
- Ohne Parabene
- In drei Abrasionsstufen erhältlich, dadurch auf die jeweilige Situation individuell abstimmbare
- Ampelkodierung: einfach und unverwechselbar anwendbar
- Mit allen handelsüblichen Instrumenten anzuwenden (Bürstchen, Kelch, etc.)
- Enthält Fluorid (700 ppm) und Xylitol
- Drei angenehme Geschmacksrichtungen: Kirsche, Minze und Karamell



Handelsformen

Grob (rot)		Mittel (gelb)		Fein (grün)		
Geschmack	Tube 100 g	Geschmack	Tube 100 g	Geschmack	Tube 100 g	Tube 4 x 100 g
Minze	REF 2092	Minze	REF 2091	Minze	REF 2090	REF 2089
Karamell	REF 6092	Karamell	REF 6091	Karamell	REF 6090	–
Kirsche	REF 6100	Kirsche	REF 6099	Kirsche	REF 6098	–

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice
Freecall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721-719-2931
service@voco.de

Zu beziehen durch:

