

Das cocogeniale Desinfektions- und Reinigungsmittel.



KaVo. Dental Excellence.

Achtung,

Klipp & Klarheit im Erreger-Dschungel.

Gefahrenzone: Absauganlage. Schmutz setzt sich fest, Bakterien, Pilze und Viren nisten sich ein und machen Jagd auf die Gesundheit. Schlagen Sie die Keime mit den Waffen der Natur!

Der Hauptwirkstoff von DEKASEPTOL ist Glucoprotamin – ein Derivat aus den Inhaltsstoffen der Kokosnuss. Glucoprotamin ist ein antimikrobieller Wirkstoff, der Biguanide oder Phenolderivate an Kraft und Gründlichkeit weit übertrifft. Eine saubere, hygienische Sache für Absauganlage, Abfluss und Speischale.

Und für Sie ein Grund zum Strahlen: Denn was den Bakterien und Viren das Leben schwer macht, macht Ihnen die Arbeit so richtig leicht. Aber schauen Sie einfach selbst!

Sicher – sauber – sparsam – schnell:

- hoch wirksam: bakterizid, tuberkulozid, viruzid, fungizid
- wirtschaftlich: der 6-Liter-Nachfüllkanister
- umweltfreundlich: frei von Aldehyd, Phenol, Chlor
- zeitsparend: dank Dosierpumpe direkt einsatzbereit
- praktisch: kein Anmischen
- angemeldet zur DGHM-Listung

DEKASEPTOL wirkt:

- **reinigend**
- **desodorierend**
- **desinfizierend:**

bakterizid	✓	tuberkulozid	✓
fungizid	✓	HBV-wirksam	✓
viruzid	✓	HIV-wirksam	✓

First choice – best value.



Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss.

Fertig,

Kein Rühren, kein Schütteln, kein Mixen.

Sparen Sie sich zeitraubendes Anmischen und umständliches Anwenden! DEKASEPTOL ist eine fertige Mischung und direkt einsatzbereit: von jetzt auf gleich.

Schonen Sie sich und die Geräte. Kein Anmischen heißt auch: keine Mischungsfehler, kein Kontakt mit den empfindlichen Händen, keine verschmutzten Arbeitsflächen, kein Materialstress. Eine rundum saubere Sache.

Echt sparsam. Wo dank der wirtschaftlichen Dosiervorrichtung nichts daneben geht, wird auch nichts verschwendet. Auftanken können Sie am besten mit dem günstigen 6-Liter-Nachfüllkanister.

Entsorgen ohne Sorgen. Was aus der Natur kommt, verträgt sich auch mit ihr. DEKASEPTOL ist ökologisch unbedenklich und gemäß OECD Richtlinien leicht und schnell biologisch abbaubar.




Los!

Früher fertig – froher Feierabend.

Gewinnen Sie Zeit! DEKASEPTOL ist nicht nur handlich, sondern auch schnell. Das Gel einfach in die Schläuche einsaugen und in die Speischale geben. Einwirken lassen. Das war's.

Nach 18 Uhr im Urwald? Jetzt nicht mehr! Denn mit DEKASEPTOL sparen Sie pro Absauganlage wertvolle Minuten.

„Peanuts“, sagen Sie? „Große, dicke Kokosnüsse“, sagen wir. Denn wenn Sie einmal nachrechnen, werden Sie schnell auf eine Zeiterparnis von 20 Minuten in der Woche kommen.

Macht 2 ganze Arbeitstage im Jahr. Zeit, die Sie dank DEKASEPTOL wirklich besser nutzen können. Früher raus, schneller zu Haus. 



**Gemeinsame
Forschungsarbeit von
KaVo und Henkel-ECOLAB**




Hurra, da ist die Kokosnuss!


In Null Komma nichts fertig.



Speichelzieher- bzw. Spraynebelschlauch

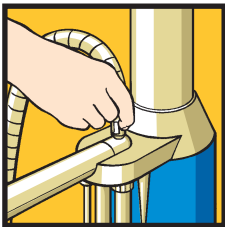


1. Wasser stoßweise über KaVo AQUA-mat ansaugen...

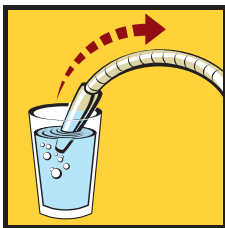

... oder, falls nicht vorhanden, über einen Plastikbecher



2. Mit aufgesetztem Saughandstück Dosiervorrichtung einmal herunterdrücken

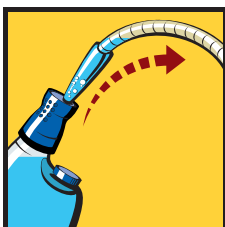


3. DEKASEPTOL Gel aus der Dosiervorrichtung absaugen; Schritte 1-3 wiederholen




4. Schlauch abnehmen und in die Halterung zurücklegen

Speischale

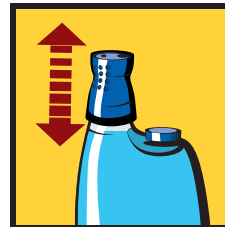

1. Dosiervorrichtung einmal herunterdrücken

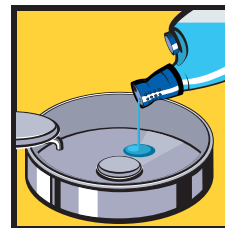

2. DEKASEPTOL Gel in die Speischale gießen



3. DEKASEPTOL Gel mit einer Bürste verteilen und 5 Minuten einwirken lassen



4. Anschließend mit der Schalen- spülung und einer Bürste ausspülen



Mit freundlicher Empfehlung:

Wir beraten Sie fachkundig, umfassend, professionell. Und gerne.
Informationen jetzt auch im Internet: www.kavo.com



KaVo. Dental Excellence.