



Klart på nolltid.


Salivsugslang och grovsugslang

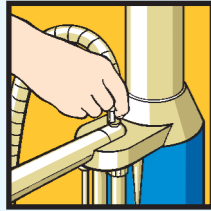


1. Sug upp kallt vatten stötvis, t.ex. med KaVo Aquamat® eller ur en plastmugg

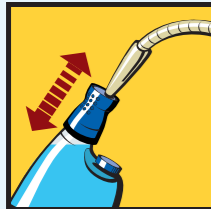

2. Tryck ned doseringsanordningen en gång, med sugadaptorn eller för hand

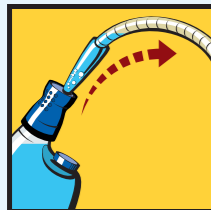

3. Sug upp DEKASEPTOL gel ur doseringsanordningen*
*Med grovsugslangen upprepas steg 1

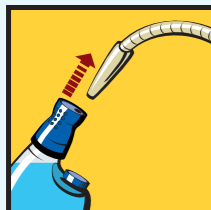

4. Sätt tillbaka slangen

Fontänskål



1. Tryck ned doseringsanordningen en gång



2. Häll DEKASEPTOL gel i fontänskålen



3. Sprid DEKASEPTOL gel med en borste och låt verka



4. Borsta och skölj



Desinfektions- och rengöringsmedel, i ett nötskal.



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.

Klara,

Enkelt & klart i den patogena djungeln.

Farlig zon: Suganläggningen. Smuts fastnar, bakterier, svamp och virus kryper in i smutsen och lägger sig på lur mot hälsan. Bekämpa bakterierna med ett vapen från naturen!

Den aktiva substansen i DEKASEPTOL är glukoprotamin – utvunnet ur kokosmjölk. Glukoprotamin har starkare antimikrobiell verkan än biguanider och fenolderivat. Rent och hygieniskt i suganläggning, avlopp och salivskål.

Och för dig, en trivselfaktor: För det som gör livet svårt för bakterier och virus gör arbetet lättare för dig. Bedöm själv!

Säkert – rent – billigt – snabbt:

- hög effekt: mot baktericid, tuberculocid, virucid, fungicid
- ekonomiskt: påfyllning ur sexlitersdunk
- miljövänligt: ingen formaldehyd, fenol eller klor
- tidsbesparande: klar att använda direkt tack vare doseringspumpen
- praktiskt: ingen spädning
- anmält för DGHM-registrering

DEKASEPTOL är:

- rengörande
- lukt borttagande
- desinficerande:

baktericid	✓	tuberculocid	✓
fungicid	✓	verkan mot HBV	✓
virucid	✓	verkan mot HIV	✓

First choice – best value.



Apmamman sitter vid floden och metar kokosnöter.

färdiga,

Ingen spädning, ingen skakning, ingen omrörning.

Du slipper tidsödande spädning och omständiga rutiner! DEKASEPTOL är en färdig blandning som du kan börja använda direkt.

Skonsamt mot dig och mot utrustningen. Ingen spädning innebär också: inga blandningsfel, ingen kontakt med känslig hud, inga nedkladdade arbetsytor, ingen materialstress. Rent på alla sätt.

Ekonomiskt. Doseringsanordningen gör att ingenting spills vid sidan om, alltså kommer hela mängden till nytta. Påfyllning sker enklast från den praktiska sexlitersdunken.

Ofarligt avfall. Det som kommer från naturen är också förenligt med naturen. DEKASEPTOL är oskadligt för miljön och bryts ned biologiskt på kort tid enligt OECD:s riktlinjer.



gå!

Snabbare klar – tidigare hem.

Spara tid! Det går inte bara lätt med DEKASEPTOL, det går snabbt också. Sug bara in gelen i slangen eller sprid ut den i fontänskaalen. Låt gelen verka. Saken är klar.

Kvar i djungeln efter klockan sex? Inte nu längre! DEKASEPTOL ger en tidsbesparing på flera värdefulla minuter per suganläggning.

"Peanuts", säger du? „Stora kokosnöter“, säger vi. För om man räknar efter upptäcker man att man lätt sparar 20 minuter i veckan.

Det blir två arbetsdagar på ett år. Den tiden kan du tack vare DEKASEPTOL använda på ett bättre sätt. Snabbare klar, tidigare hem.

