


DEKASEPTOL Gel


# Listo en un abrir y cerrar de ojos.




## Salivador ó manguera flexible de neblina de spray

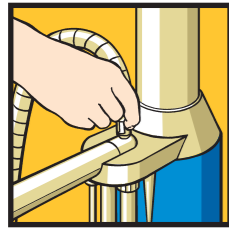


1. Aspirar agua fría de forma intermitente, p. ej. por medio del AQUAmat® de KaVo ...

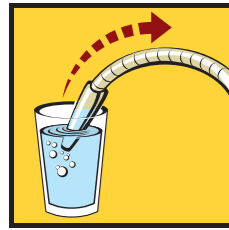


... ó de un vaso de plástico

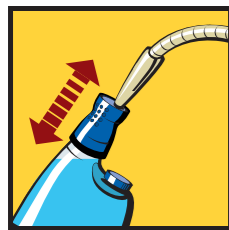

2. Con la pieza de mano de aspiración ó con la mano presionar una vez hacia abajo el dispositivo de dosificación

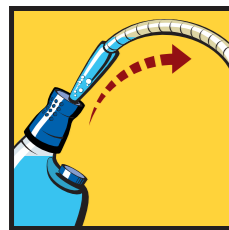

3. Aspirar DEKASEPTOL Gel del dispositivo de dosificación\*  
\*con la manguera flexible gruesa de neblina de spray repetir los pasos 1-3

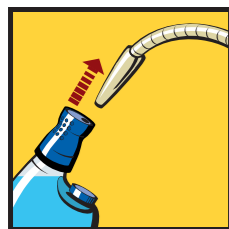

4. Retirar la manguera flexible y devolverla al soporte

## Taza de escupidera



1. Presionar hacia abajo el dispositivo de dosificación



2. Verter DEKASEPTOL Gel en la taza de escupidera



3. Distribuir DEKASEPTOL Gel mediante un cepillo y dejar actuar



4. A continuación limpiar con el enjuague de taza y un cepillo



KaVo DEKASEPTOL Gel

Su depósito de confianza:

Le asesoramos de forma detallada y profesional. Y con mucho gusto.  
Información también en Internet: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)



Met.-Nr. 1xxxxxx 10/04-II es. Se reserva el derecho a modificaciones técnicas. Ligeros diferencias respecto a los colores se deben a la impresión. © Copyright: KaVo Dental GmbH.

KaVo DEKASEPTOL Gel

# Das cocogéniale Desinfektions- und Reinigungsmittel.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH, D-88400 Biberach/Riß - Telefon +49 73 51 56-0 - Fax +49 73 51 56-1488 - Internet: [www.kavo.com](http://www.kavo.com)



KaVo. Dental Excellence.



DEKASEPTOL Gel

# Atención,

## Orden en la jungla de los gérmenes.

Zona de peligro: Unidad de aspiración. La suciedad se establece, bacterias, hongos y virus se extienden y dan caza a su salud. ¡Combata Vd. los gérmenes con las armas de la naturaleza!

El agente principal del DEKASEPTOL es la glucoptamina – un derivado de las sustancias contenidas en el coco. La glucoptamina es un agente anti-microbio que supera con creces a biguanidas o derivados del fenol respecto a fuerza y profundidad. Limpieza e higiene para la unidad de aspiración, el desagüe y la taza de escupidera.

Y para Vd. una razón para estar radiante: Porque lo que complica la vida a las bacterias y virus le facilita a Vd. el trabajo. ¡Pero mire Vd. mismo!

## Seguro – limpio – económico – rápido:

- Altamente eficaz: Bactericida, tuberculocida, virucida, fungicida
- Económico: El bidón de relleno de 6 litros
- No contaminante: Libre de aldehído, fenol, cloro
- Ahorra tiempo: Directamente listo para el empleo gracias a la bomba de dosificación
- Práctico: Sin mezcla
- Solicitada la inclusión en la lista – DGHM

## DEKASEPTOL:

- **limpia**
- **desodoriza**
- **desinfecta:**

bactericida	✓	tuberculocida	✓
fungicida	✓	HBV - activo	✓
virucida	✓	HIV - activo	✓

## First choice – best value.



¿Dónde está el coco?



La mamá mona quiere pescar el coco.



¿Dónde está el coco?

¡Hurra, por fin hemos encontrado el coco!

DEKASEPTOL Gel

# Listo,

## Sin remover, sin agitar, sin mezclar.

¡Olvídense Vd. de la mezcla laboriosa y la aplicación complicada! DEKASEPTOL es una mezcla ya preparada y se puede aplicar directamente: Inmediatamente.

**Cuidese Vd. y sus aparatos:** Sin mezclar significa también sin errores de mezcla, sin contacto con manos sensibles, sin superficies de trabajo sucias, sin muchos materiales. Un asunto limpio desde todos los puntos de vista.

**Realmente económico.** Gracias al dispositivo de dosificación económico no pierde y malgasta nada. Relleno fácil con el ventajoso bidón de 6 litros.

**Evacuación sin problemas.** Lo que procede de la naturaleza también está en armonía con ella. DEKASEPTOL es ecológicamente inofensivo y según las normas de la OCDE es biodegradable de forma sencilla y rápida.



DEKASEPTOL Gel

# ¡Ya!

## Terminar antes – disfrutar más.

¡Gane Vd. tiempo! DEKASEPTOL no sólo es fácil de manejar sino también rápido. Aspirar el gel sencillamente en las mangueras flexibles y distribuirlo en la taza de escupidera. Dejar actuar. Esto es todo.

**¿En la jungla después de las 20 horas?** Ya no más. Porque con DEKASEPTOL Vd. ahorra minutos valiosos en cada unidad de aspiración.

**¿„Pequeñeces” dice Vd.?** „Nada de eso”, decimos nosotros. Por si Vd. hace un cálculo rápido, verá que el resultado es un ahorro de tiempo de 20 minutos a la semana.

Resulta que son dos días laborales completos al año. Tiempo que puede aprovechar mejor gracias a DEKASEPTOL. Acabar antes – disfrutar más.

Trabajo de investigación común entre KaVo y Henkel-ECOLAB

