

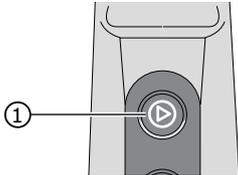
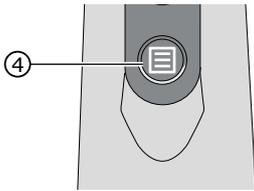


Instrucciones de manejo abreviadas - DIAGNOcam Vision Full HD

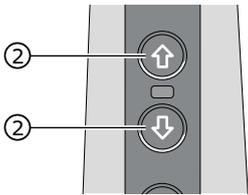

DIAGNOcam Vision Full HD		
Instalación / Inicio del programa		► Para la instalación y el inicio del programa, tenga en cuenta las instrucciones de uso y las instrucciones de instalación del software usado.
Encendido de la cámara		La cámara se puede encender mediante las siguientes posibilidades: <ul style="list-style-type: none"> • durante el inicio del sistema del software de imagenología • pulsando una tecla cualquier en el panel de control • quitándola del soporte de mesa o del soporte de la pared
Captura de imágenes Inicio/detención de vídeo		► Pulsar la tecla de disparo ① para tomar una imagen o para iniciar / o detener una captura de vídeo.
Cambio de modo		► Pulsar la tecla de menú ④ y cambiar entre los modos (intraoral, fluorescencia y transiluminación).
Navegación en el esquema dental		► Pulsar las teclas de navegación ② para navegar en el esquema dental (siempre que esté disponible en el software).
LED de estado		El LED de estado ③ muestra el estado actual de la cámara: <ul style="list-style-type: none"> • Blanco = la cámara está activa • Azul = modo de espera • Rojo = Error
Apagado de la cámara		La cámara se puede apagar mediante las siguientes posibilidades: <ul style="list-style-type: none"> • Quitándola del soporte de mesa o del soporte de pared • Tiempo prolongado sin usarse

Instrucciones de manejo abreviadas - DIAGNOcam Vision Full HD

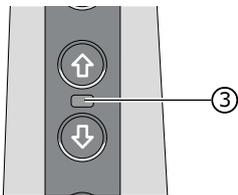

Usando la funda protectora desechable		
Colocación de la funda protectora desechable		▶ Introducir la cámara lentamente en la funda protectora desechable de manera que el aire pueda salir.
		▶ Retirar el papel protector externo.
		▶ Tensar la ventana transparente situada delante de la ventana de captura de imagen de la cámara. ▶ La ventana transparente de la funda protectora de un solo uso debe situarse justo encima de la ventana de imagen de la cámara.
Retirada de la funda protectora desechable		▶ Retirar con cuidado la funda protectora desechable de la cámara después de cada uso y desecharla.
Encajar la punta y soltar		
Encajar la punta		▶ Colgar la punta en un lado de la carcasa y encajar con cuidado el lado opuesto. ▶ Comprobar que la punta está bien sujeta.
Soltar la punta		▶ Soltar con cuidado la punta con un movimiento de giro unilateral presionado la punta en la cavidad prevista y sin sujetarla por las patas blandas de silicona. ▶ Reacondicionar la punta después de cada uso según las instrucciones de uso.
Conexión y retirada del Fluorescence Cover		
Conexión del Fluorescence Cover		▶ Conectar el Fluorescence Cover a la cámara. ▶ Comprobar que el Fluorescence Cover está bien sujeto.
Retirada del Fluorescence Cover		▶ Retirar el Fluorescence Cover con cuidado. ▶ Reacondicionar el Fluorescence Cover después de cada uso según las instrucciones de uso.