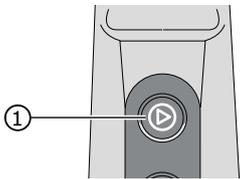
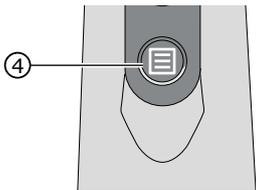
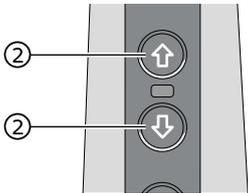
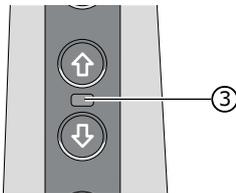


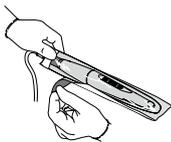
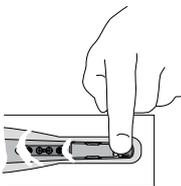
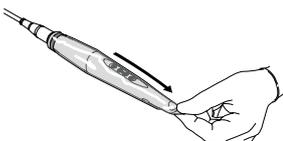
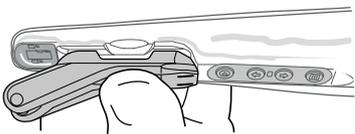
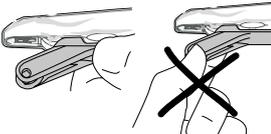
Brevi istruzioni per l'uso - DIAGNOcam Vision Full HD



DIAGNOcam Vision Full HD		
Installazione / Avvio del programma		► Per l'installazione e l'avvio del programma rispettare le Istruzioni per l'uso e le istruzioni per l'installazione del software utilizzato.
Accendere la videocamera		La videocamera può essere accesa mediante le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • all'avvio del sistema del software di imaging • premendo un tasto qualsiasi sul pannello di controllo • prelevandola dal ripiano del tavolo o dal supporto a parete
Ripresa di immagini Avviare / interrompere video		► Premere il pulsante di Scatto ① per scattare una foto o avviare / interrompere una registrazione video.
Cambiare modalità		► Premere il tasto Menu ④ per passare da una modalità all'altra (intraorale, fluorescenza e transilluminazione).
Navigazione nella nomenclatura dentale		► Premere i tasti di navigazione ② per navigare nella nomenclatura dentale (se disponibile nel software).
LED di stato		Il LED di stato ③ mostra lo stato corrente della videocamera: <ul style="list-style-type: none"> • Bianco = La videocamera è attiva • Blu = Modalità standby • Rosso = Errore
Spegnere la videocamera		La videocamera può essere spenta mediante le seguenti opzioni: <ul style="list-style-type: none"> • appoggiandola nel ripiano del tavolo o nel supporto a parete • prolungata inattività

Brevi istruzioni per l'uso - DIAGNOcam Vision Full HD



Utilizzare un involucro protettivo monouso		
Tirare l'involucro protettivo monouso		▶ Tirare lentamente l'involucro protettivo sulla fotocamera, in modo che l'aria possa fuoriuscire meglio.
		▶ Togliere la carta protettiva esterna.
		▶ Caricare la finestra trasparente davanti alla finestra di ripresa della fotocamera. ▶ La finestra trasparente dell'involucro protettivo monouso deve essere posizionata esattamente sulla finestra di ripresa della fotocamera.
Rimuovere l'involucro protettivo monouso		▶ Rimuovere con cura l'involucro protettivo monouso dalla videocamera dopo ogni trattamento e conferire allo smaltimento.
Innestare la punta e allentare		
Innestare la punta		▶ Agganciare la punta su un lato dell'alloggiamento e innestare delicatamente il lato opposto. ▶ Controllare che la punta tenga bene.
Allentare la punta		▶ Allentare con cautela la punta ruotando su un solo lato, contemporaneamente premere la punta contro l'incavo in dotazione evitando di tenerla contro i piedini morbidi in silicone. ▶ Ricondizionare la punta al termine di ogni utilizzo secondo le Istruzioni per l'uso.
Applicare il coperchio a fluorescenza e rimuovere		
Applicare il coperchio a fluorescenza		▶ Applicare il coperchio a fluorescenza sulla videocamera. ▶ Controllare che il coperchio a fluorescenza tenga bene.
Rimuovere il coperchio a fluorescenza		▶ Rimuovere con prudenza il coperchio a fluorescenza. ▶ Ricondizionare il coperchio a fluorescenza al termine di ogni utilizzo secondo le Istruzioni per l'uso.