
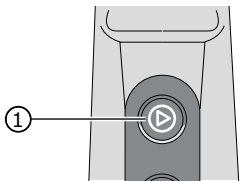
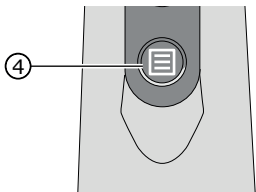
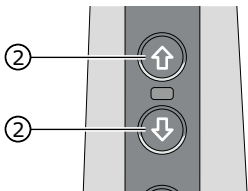
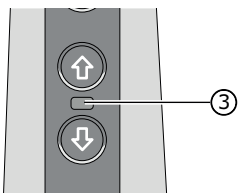






Krótką instrukcja obsługi - DIAGNOcam Vision Full HD





DIAGNOcam Vision Full HD		
Instalacja/uruchamianie programu		▶ Przy instalacji i uruchamianiu programu przestrzegać instrukcji obsługi i instrukcji instalacji używanego oprogramowania.
Włączanie kamery		Kamerę można włączyć następującymi sposobami: <ul style="list-style-type: none"> • przy starcie systemowym oprogramowania do obrazowania • nacisnąć dowolny przycisk na pulpicie obsługi • wyjąć kamerę z podstawki stołowej lub uchwytu ściennego
Rejestracja obrazów Zatrzymywanie/uruchamianie wideo		▶ Nacisnąć przycisk wyzwolenia ①, aby zarejestrować obraz lub aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie wideo.
Zmiana trybu		▶ Nacisnąć przycisk menu ④, aby przełączać między trybami (wewnętrzny, fluorescencja lub transiluminacja).
Nawigacja na schemacie zębów		▶ Nacisnąć przyciski nawigacji ②, aby nawigować na schemacie zębów (o ile opcja ta jest dostępna w oprogramowaniu).
LED statusu		LED statusu ③ wskazuje aktualny status kamery: <ul style="list-style-type: none"> • biały = kamera jest aktywna • niebieski = tryb Standby • czerwony = błąd
Wyłączanie kamery		Kamerę można wyłączyć następującymi sposobami: <ul style="list-style-type: none"> • odłożyć na podstawkę stołową lub uchwyt ścienny • nie używać przez dłuższy czas

Krótka instrukcja obsługi - DIAGNOcam Vision Full HD

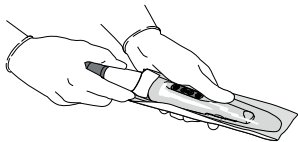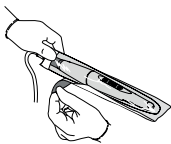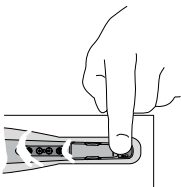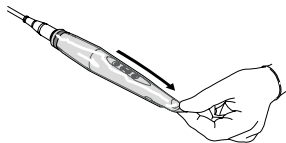

Używanie jednorazowej osłony		
Naciąganie jednorazowej osłony		▶ Jednorazowe osłony naciągnąć powoli na kamerę, aby ułatwić wydostawanie się powietrza.
		▶ Zdjąć zewnętrzny papier ochronny.
		▶ Przezroczyste okno jednorazowej osłony naciągnąć na okno nagrywania kamery. ▶ Przezroczyste okno jednorazowej osłony musi być położone dokładnie nad oknem nagrywania kamery.
Ściąganie jednorazowej osłony		▶ Po każdym zabiegu ostrożnie ściągnąć jednorazową osłonę z kamery i zutylizować.

Zatrzaskiwanie i luzowanie końcówki		
Zatrzaskiwanie końcówki		▶ Zaczepić jedną stronę końcówki w obudowie i ostrożnie zatrzasknąć przeciwległą. ▶ Sprawdzić stabilność końcówki.
Luzowanie końcówki		▶ Poprzez jednostronny obrót ostrożnie luzować końcówkę, wycisnąć ją przy tym na przewidzianym wycięciu i nie trzymać za miękkie nóżki silikonowe. ▶ Po każdym użyciu przygotować końcówkę zgodnie z instrukcją obsługi.

Nakładanie i ściąganie Fluorescence Cover		
Nakładanie Fluorescence Cover		▶ Nakładanie Fluorescence Cover na kamerę. ▶ Sprawdzić stabilność Fluorescence Cover.
Ściąganie Fluorescence Cover		▶ Ostrożnie ściągnąć Fluorescence Cover. ▶ Po każdym użyciu przygotować Fluorescence Cover zgodnie z instrukcją obsługi.