

DIAGNOdent® pen 2190

Istruzioni d'uso in breve

Selezione spazio di memoria sonda:



premere 2 volte



premere 1 volta

selezionare spazio memoria


Allineamento della sonda col riferimento :




Premere




Premere
(entro 3 sec.)

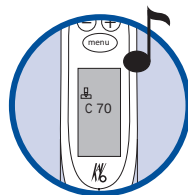

Attenzione al display fino alla visualizzazione del valore di riferimento e all'emissione del segnale acustico.

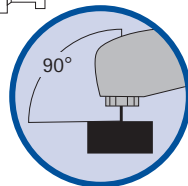


Tenere la sonda sul riferimento ...

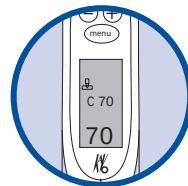


... fino alla cessazione del segnale acustico.
Taratura terminata.

Impostare individualmente per ciascun paziente:

Scegliere un punto senza carie – tener premuto l'interruttore per 3 sec.

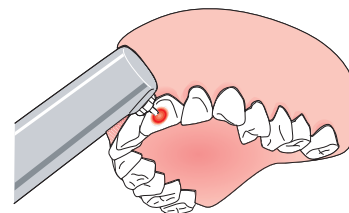

Sonda occlusale

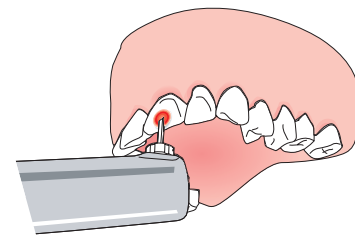

Sonda approssimale



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D 88400 Biberach/Riß
Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com



Le presenti istruzioni d'uso in breve contengono esclusivamente le funzioni principali. Alla prima messa in funzione e nel caso di utilizzo da parte di personale che non abbia ancora familiarizzato con questo prodotto medicale, è imperativa la presa di conoscenza delle istruzioni d'uso allegate all'apparecchio ed ai singoli strumenti.

① Pulizia professionale del dente

Eliminazione di tutti depositi e molli:

Scaling SONICflex, strumenti manuali, Air Polisher PROPHYflex + PROPHYpearls, DURAtec 2933

② Ispezione con DIAGNOdent pen 2190

carie fissurale

Valore: 0 – 12

Sostanza del dente sana

carie fissurale

Valore: 13 – 24

Demineralizzazione iniziale

carie fissurale

Valore: > 25

Demineralizzazione forte

Valore: 0 – 7
carie prossimale

Valore: 8 – 15
carie prossimale

Valore: > 16
carie prossimale

③ Diagnosi odontoiarica

esito negativo

monitoraggio

Radiografie, Testi batteri cariogeni, test salivare

④ Maßnahmen

misure standard di profilassi

misure intensive di profilassi terapie locali antibatteriche

Trattamento minimamente

Rischio minimo

Fluor Zahnpasta

Rischio alto

fluorizzazione, KaVo HealOzone, Chlorhexidin

KaVo HealOzone, RONDOflex, SONICflex micro, Materiali da otturazione in composito, misure intensive di profilassi