

DIAGNOdent® pen Paro Sonde

Kurzbedienungsanweisung



KaVo. Dental Excellence.


Mit der Paro Sonde (Mat.-Nr. 1.004.0370) können Konkrementen in Taschen bis zu 9 mm Tiefe erkannt werden.

! Die Sonde kann abbrechen und dann zu Verletzungen führen. Nicht mit der Sonde hebeln!

! Vor jeder Behandlung muß eine Wiederaufbereitung der Sonde durchgeführt werden. Befolgen Sie bitte dafür die Aufbereitungsanweisungen der Fissuren-Sonde in der Gebrauchsanweisung DIAGNOdent pen 2190.

Anwendung:


Paro Sonde parallel zur Zahnfläche in die PA-Tasche einführen.

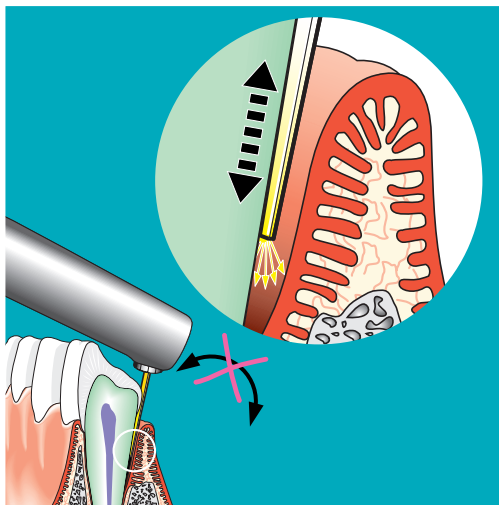

Anzeige DIAGNOdent pen 2190 mit Paro Sonde:

Wert	Bedeutung
>40	Konkremente in der PA-Tasche.
5-40	Sehr kleine Konkreme- nte in der Nähe der Sonde Evtl. Wurzelkaries
<5	Saubere PA-Tasche.

Technischer Abgleich:

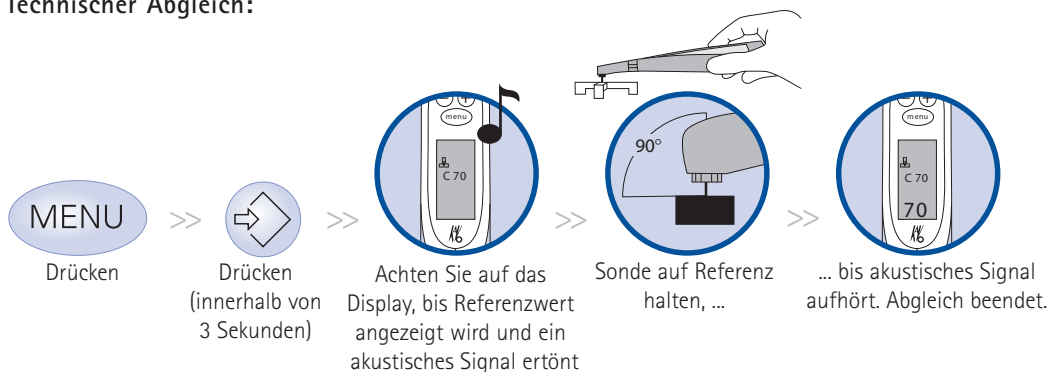

Diese Kurzbedienungsanweisung beinhaltet ausschließlich die wesentlichen Bedienungsfunktionen. Vor der ersten Inbetriebnahme sowie bei Bedienung durch Personen, die nicht im Umgang mit diesem Medizinprodukt vertraut sind, ist unbedingt die Gebrauchsanweisung DIAGNOdent pen 2190 zu beachten.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com