

DIAGNOdent® pen Paro sonda

Instrucciones de uso abreviadas



KaVo. Dental Excellence.


La sonda Paro (nº de mat. 1.004.0379) permite detectar concreciones en bolsas de hasta 9 mm de profundidad.

! La sonda puede romperse y provocar lesiones. No haga palanca con la misma.

! Antes de cada uso es preciso realizar un reprocesamiento de la sonda. Para ello, siga las instrucciones de preparación de la sonda de fisuras que se incluyen en el manual de instrucciones de DIAGNOdent pen 2190.

Aplicación:


Introduzca la sonda Paro en la bolsa paradontal en sentido paralelo a la superficie del diente.

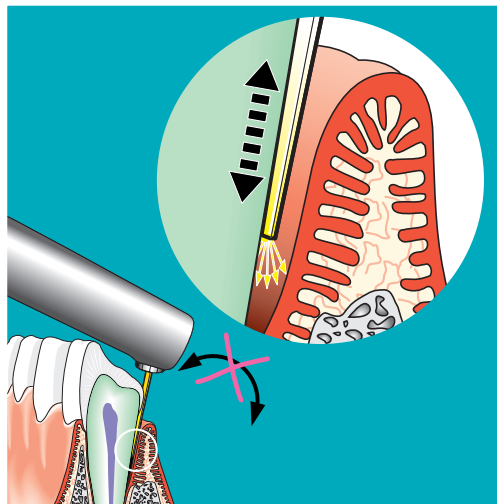

Vista de DIAGNOdent pen 2190 con sonda Paro:

Valor	Significado
>40	Concreciones en la bolsa paradontal
5-40	Concreciones muy pequeñas Concreciones cerca de la sonda Puede que haya caries radicular
<5	Bolsa paradontal limpia

Compensación técnica:

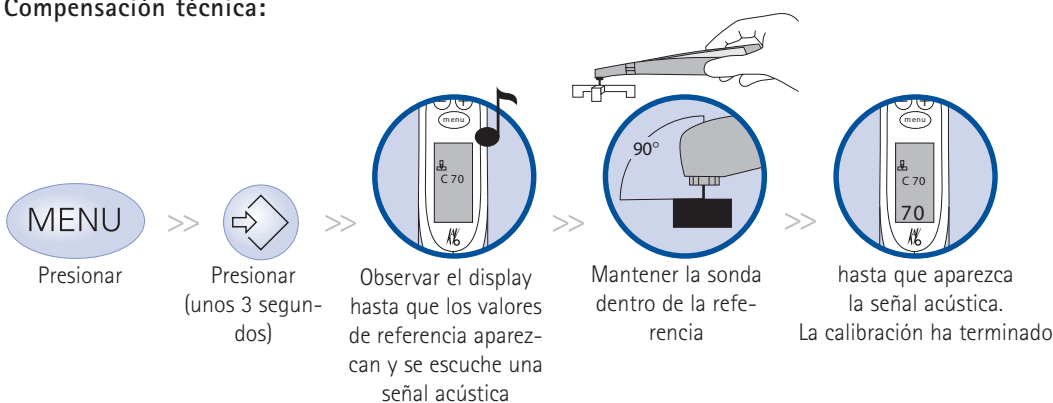

DIAGNOdent pen 2190.

Estas instrucciones de uso abreviadas incluyen exclusivamente las funciones de manejo esenciales. Antes de la primera puesta en servicio, así como en caso de un manejo por personas que no están familiarizadas con la aplicación de este producto médico, es imprescindible que tengan en cuenta las instrucciones de uso



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com