

DIAGNOdent® pen Paro sonda

Istruzioni d'uso in breve



KaVo. Dental Excellence.


Con la Paro Sonde (n° mat. 1.004.0370) è possibile individuare concrezioni nelle tasche gengivali fino a 9 mm di profondità.

! La sonda può spezzarsi e causare lesioni. Non usare la sonda come leva!

! Prima di ogni trattamento eseguire il ricondizionamento della sonda. Si prega di rispettare le istruzioni di condizionamento della sonda fissurale riportate nelle istruzioni per l'uso di DIAGNOdent pen 2190.

Impiego:


Introdurre la sonda nella tasca parallelamente alla superficie del dente.

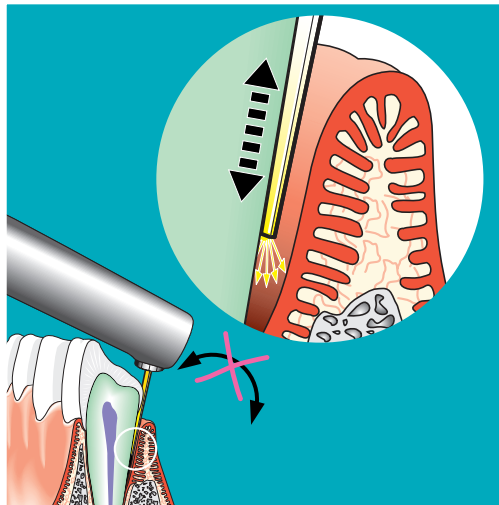

Visualizzazione DIAGNOdent pen 2190 con Paro Sonde:

Valore	Significato
>40	Concrezioni nella tasca gengivale
5-40	Piccolissime concrezioni Concrezioni vicino alla sonda Event. carie radicolare
<5	Tasca pulita.

Confronto tecnico:

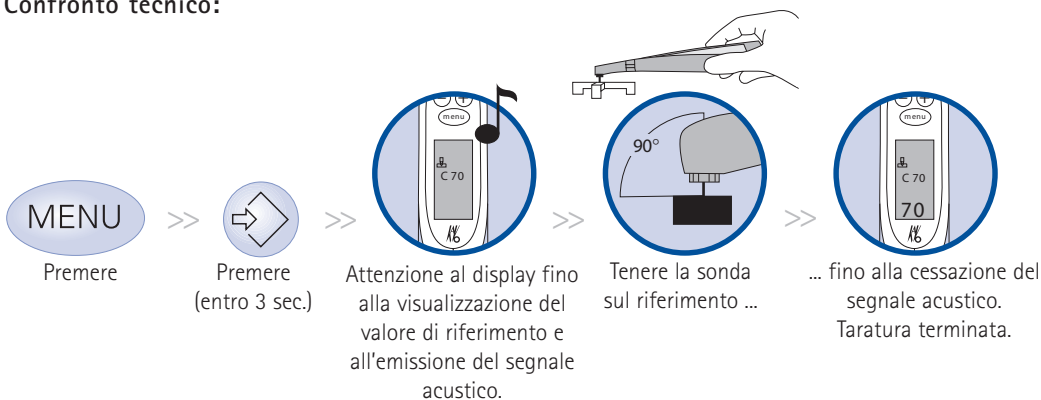

Le presenti istruzioni d'uso in breve contengono esclusivamente le funzioni principali. Alla prima messa in funzione e nel caso di utilizzo da parte di personale che non abbia ancora familiarizzato con questo prodotto medicale, è assolutamente necessario osservare delle istruzioni d'uso DIAGNOdent pen 2190.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com