



DIAGNOdent® pen Paro sonde

Korte gebruiksaanwijzing



KaVo. Dental Excellence.

Met de Paro sonde (Mat.-nr. 1.004.0370) kunnen concrenten in de pockets tot een diepte van 9 mm herkend worden.




De sonde kan afbreken en dan letsel veroorzaken. Niet met de sonde hevelen!



Vóór elke behandeling moet de sonde opnieuw gereed worden gemaakt voor gebruik. Volg daarvoor de aanwijzingen voor het gereedmaken van de fissuursonde in de gebruiksaanwijzing voor de DIAGNODENT-pen 2190.

Gebruik:

Paro sonde evenwijdig aan het tandvlak in de PA-pocket invoeren.

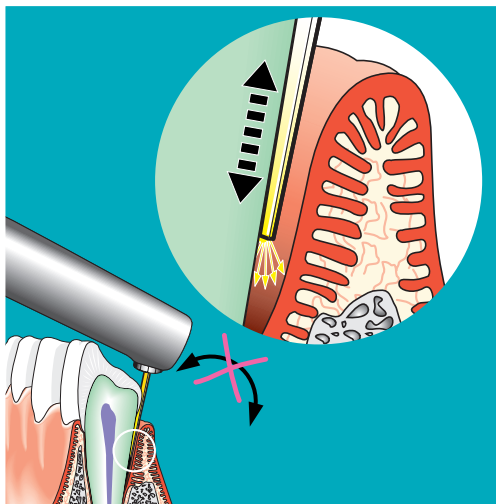

Aanduiding DIAGNOdent pen 2190 met Paro sonde:


Waarde Betekenis

>40 Concrenten in de PA-pocket.

5-40 Zeer kleine concrenten
Concrenten in de nabijheid van de sonde
Evtl. wortelcariës

<5 Schone PA-pocket.

Technischer afstelling:

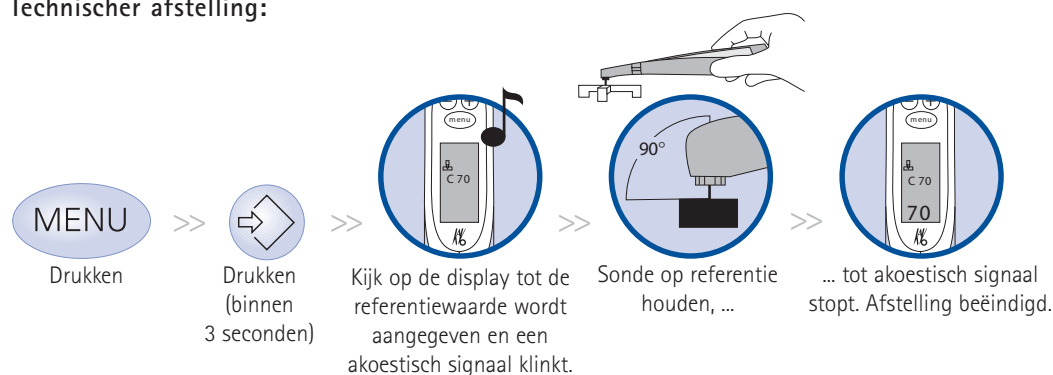

Deze korte gebruiksaanwijzing bevat uitsluitend de belangrijkste bedieningsfuncties. Voor de eerste ingebruikname alsmede bij bediening door personen, die niet vertrouwd zijn met het gebruik van dit medicijn, moet onherroepelijk de gebruiksaanwijzing DIAGNOdent pen 2190 worden nageleefd.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com