



Зонд DIAGNOdent® pen 2190

Краткие указания по обслуживанию



KaVo. Dental Excellence.

С помощью зонда Паро (арт. № 1.004.0370) можно обнаружить конкременты в карманах на глубине до 9 мм.




Зонд может оборваться и, тем самым, приводить к травмам. Не использовать зонд в качестве рычага!



Перед каждым использованием необходимо провести повторную подготовку зонда. Следуйте указаниям по подготовке фриссурного зонда, приведенные в инструкции по использованию DIAGNOdent pen 2190.

Применение:

Зонд Паро ввести в пародонтальный карман параллельно поверхности зуба.

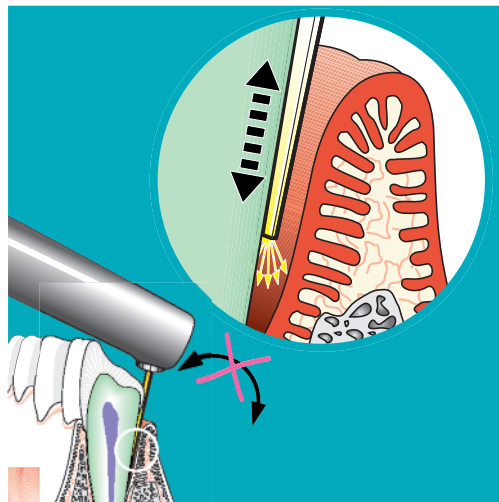

Индикация DIAGNOdent pen 2190 с зондом Паро:

Величина	Значение
>40	Конкременты в пародонтальном кармане.
5-40	Очень маленькие конкременты Конкременты вблизи зонда Вероятно, корневой кариес
<5	Чистый пародонтальный карман.

Техническая коррекция:



Эти краткие указания по обслуживанию содержат исчерпывающее описание наиболее важных функций по обслуживанию системы.

Перед первым использованием, а также перед использованием лицами, которые не знакомы с обращением с этим продуктом, необходимо прочесть и строго соблюдать инструкцию по использованию DIAGNOdent pen 2190.



KaVo. Dental Excellence.