

Technische Betriebsanleitung
Instructions of use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso



für / for / pour / per / para

DIPPY NT DIGITAL mit CPU

DIPPY NT LIGHT

DIPPY easy



info@yeti-dental.com www.yeti-dental.com

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestraße 3
D-78234 Engen / Germany
www.yeti-dental.com

Betriebsanleitung BA

1. Allgemein:

1.1. Produktbezeichnung: (A) Dippy NT Digital 405-9000 (A) Dippy NT Digital 115 V 405-9115
(B) Dippy Easy 402-1000 (B) Dippy Easy 115 V 402-1115
(C) Dippy NT Light 402-9000 (C) Dippy NT Light 115 V 402-9115

1.2. Lieferumfang: (A) (B) und (C)
- Tauchwachsgeräte mit Netzkabel und Tankschutzdeckel CPU Bodenplatte
- der Tank ist mit dem Tauchwachs DUO DIP Nr.741-0000 orange gefüllt

1.3. Herstelleranschrift: YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: +49-7733-9410-0; FAX: +49-7733-9410-22 info@yeti-dental .com
www.yeti-dental.com weitere BA und Konformitätserklärungen

1.4. Warenzeichen - Vermerke: DGBM

1.5. Leistungsmerkmale:

Netzspannung :	230V +/- 10%	I 115V
Netzfrequenz:	AC 50Hz	I AC 50/60Hz
Anschlußart /Netzstecker:	Schuko / deutsch	I US Schuko
Leistungsaufnahme:	54-58 W	I 54-58 W
Sicherung:	T 400 mA	I T 400 mA
Schutzart:	Schutzerdung	I Schutzerdung

1.6. Aufstellungsort- und Lagerbedingungen: - waagrecht, standsicher und rutschfest aufstellen
- trocken Lagern bei Zimmertemperatur
- Schutz vor Säuren und Laugen

2. Bestimmungsgemäße Verwendung:

Unsere DIPPY Tauchwachsdosen dienen **ausschließlich zum Erwärmen von Tauchwachsen für die Zahntechnik. Nicht zur Anwendung am Menschen zugelassen! Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlöschen sämtliche Garantie und Haftungsansprüche!**

3. Risiken und Gefahren in der Anwendung:

1. Sicherstellen , das sachunkundige Personen (z.B. Kinder) mit den Geräten nicht in Berührung kommen. Zur Arbeit mit unseren Geräten sind ausschließlich Zahntechniker oder vom Laborinhaber berechnigte und eingewiesene Personen befugt. Vor Inbetriebnahme des DIPPY muß der Techniker die Betriebsanleitung lesen und bei noch auftretenden Unklarheiten beim Hersteller rückfragen.
2. Geräte nur an trockenen Arbeitsplätzen betreiben, nur trocken reinigen und nicht in wassergefüllte Behältnisse legen.
3. Öffnen und Modifizieren der Geräte geschieht ausschließlich auf eigene Verantwortung des Betreibers und **entbinden den Hersteller von jeglichen Garantie und Haftungsansprüchen**
4. Vor Öffnen der Geräte unbedingt Netzstecker ziehen
5. Zur Reinigung der Geräte keine Lösungsmittel verwenden.
6. Gerät, bzw. Tank nur mit Tauchwachsen, die für die Zahntechnik bestimmt sind füllen.
7. Abstellen der Geräte nur auf standsicheren und rutschfesten Unterlagen. (Verbrennungsgefahr)
8. Bei Rücksendung z.B. zu Reparaturzwecken - bruchsichere Verpackung verwenden!

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	08.03.2013/ TB	05.10.2017/ST	0	05.10.2017/ TB	4

4. Bedienungsanleitung:

4.1. Vor Inbetriebnahme:

Unsere Tauchwachsgeräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, **trotzdem können bei nicht ordnungsgemäßer Handhabung Gefahren entstehen.**

- Gerät nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung betreiben!
- Anerkannte Regeln für Arbeitssicherheit beachten
- Verwendung nur durch qualifiziertes Fachpersonal
- Gerät auf technisch einwandfreien Zustand überprüfen, insbesondere die Kabel und Gehäuse
- Tank auf Füllmenge von Tauchwachs überprüfen -gegebenenfalls Tauchwachs nachfüllen (nicht überfüllen).

4.2. Betrieb:

1. Netzverbindung herstellen (nur an zugelassene Steckdosen anschließen siehe 1.5.)

2. Gerät einschalten - der Kippschalter befindet sich an der Rückseite des Gerätes

3. Klarsichtdeckel über dem Tank schließen

4. Beim Dippy Easy (B) und Dippy NT Light (C) lässt mit dem Drehregler die Temperatur verändern. Die am Display oben links befindliche Kontrolllampe signalisiert durch aufblinken ob sich das Gerät noch in der Heizphase befindet.

Beim Dippy NT digital (A) können mit den + und – Tasten (Sensoren) weitere Temperaturänderungen vorgenommen werden, was durch flächendeckendes Auflegen des Fingers auf die + und – Tasten und den direkt darunterliegenden Sensoren geschieht.

Der Kontakt auf die Sensoren erfolgt völlig ohne Druck. Der Sensor reagiert rein durch das großflächige Berühren mit dem Finger.

Zum schnelleren Abkühlen gegebenenfalls Klarsichtdeckel öffnen.

5. Das Gerät Dippy NT digital (A) bootet ähnlich einem Computer hoch und gibt Ihnen Namen des Herstellers und Versionsstand der Software an. Die Diebstahlsicherung mit Namensangabe des Eigentümers kann optional nachgerüstet werden.


Das Gerät wird mit den Sprachen Deutsch oder Englisch geliefert. In der deutschen Fassung werden die Temperaturangaben in °C und in der englischen in °F angezeigt. Siehe hierzu auch Punkt 4.

Die Digitalanzeige in °C zeigt die Soll- und Ist-Temperatur gleichzeitig an. Außerdem wird durch das Zeichen (1) hinter der Displayanzeige die Aufheizphase und durch das Zeichen (0) die Abkühl-/Ruhephase dargestellt. (sog. Phasenkontrollanzeige)


Die jeweils vor dem Ausschalten des Gerätes gespeicherten Temperaturen werden automatisch gespeichert und vom Prozessor für die nächste Anwendung übernommen.

Eine automatische Abschaltung erfolgt bei einer eventuellen Überhitzung des Gerätes.

Durch erneutes Einschalten kann jedoch sofort wieder wie gewohnt weitergearbeitet werden, da das Gerät die letzten Einstellungen unverändert übernommen hat.

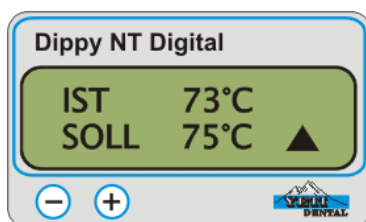

(A)

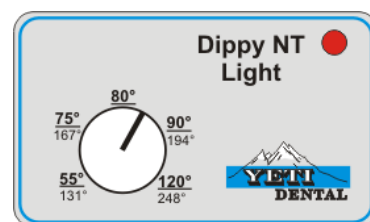

(C)

6. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur, den mit Yeti Lube Nr.550-0001 isolierten Stumpf, nun

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	08.03.2013/TB	05.10.2017/ST	0	08.03.2013/TB	Seite 2 von 4


schnell in das erhitzte Wachs (Duo Dip Nr. 741-0000) eintauchen und langsam über eine Ecke wieder herausziehen

(Vorsicht Verbrennungsgefahr durch Wachs und Metalltank).

7. Nach dem Abkühlen des Käppchens vorsichtig den Überschuß entfernen und Käppchen abheben:
 - den Überschuß nicht in den Tank zurückgeben, da dieser von Isoliermittel verunreinigt ist
8. Nach Beenden der Tagearbeit Gerät bitte immer ausschalten - Brandgefahr!
9. Endgültiges Einlagern oder Verpacken der Geräte erst nach vollständigem Abkühlen.

- Wachs nicht überhitzen - Brandgefahr!

- Vorsicht vor Beschädigung der Geräte oder Kabelleitungen durch offene Flamme am Arbeitsplatz.

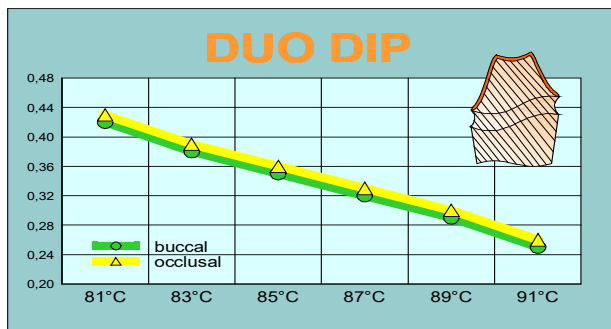

Temperaturabhängige Schichtstärken unter Verwendung von YETI Tauchwachs Duo Dip

Konstanten:

Raumtemperatur = 22°C

Stumpftemperatur = 22°C

Stumpfgewicht = 4g

Tauchvorgang = 3 Sekunden

Messintervall = 15 Minuten

4.3 Wechseln der CPU Bodenplatte bei einem Software-Upgrade

Software-Updates dienen der Programmaktualisierung, lassen individuell angefragte Leistungseinstellungen zu; z.B. die Erhöhung der Maximaltemperatur für lichterhärtende Modellierkunststoffe, Namensangabe des Besitzers (Diebstahlschutz) oder die Umrüstung eines Dippy NT in einen Dippy NT digital (Displayaustausch erforderlich) und umgekehrt.

Die CPU Bodenplatte (CPU Upgrade Kit) wird dem Labor kostenpflichtig zugesendet.

Nach Überprüfung auf äußere Transportschäden wird mit einem Messer zwischen die bisherige Bodenplatte und dem Gerätegehäuse gefahren und die Bodenplatte vorsichtig und gleichmäßig von allen Seiten her gelockert. Danach kann die gelockerte Bodenplatte **gleichmäßig nach unten herausgezogen** werden.

Auch dieser Vorgang kann und darf ausschließlich bei ausgeschaltetem und von der Netzversorgung getrenntem Gerät durchgeführt werden. Die neue CPU Bodenplatte wird mit den Kontaktstiften gleichmäßig in die Bodenbuchsen des vorhandenen Gerätes eingeführt. Sofern kein sichtbarer Spalt zwischen Bodenplatte und Gerätegehäuse zu sehen ist, ist der Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Das Gerät ist jetzt wieder einsatzbereit.

Achtung:

Ein Nachlesen der vorhandenen Betriebsanleitung bezüglich der technischen Veränderungen ist unbedingt zu empfehlen. Sollte die Betriebsanleitung nicht mehr vorhanden sein, so können Sie dies unter www.yeti-dental.com downloaden.

5. Entsorgung: Bei der Entsorgung sind die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	08.03.2013/TB	05.10.2017/ST	0	08.03.2013/TB	Seite 3 von 4

6. Garantie: Die Firma YETI setzt die Tauchwachsdosen 24 Monate ab Auslieferdatum kostenlos instand sofern es sich um Schäden durch Materialfehler oder Herstellungsmängel handelt!

7. Ersatzteil- und Zubehörteilliste:

- Tauchwachse je 150g	
740-1150 PRECI DIPgelb	750-0150 ELASTO DIP blau
740-2150 PRECI DIProt	750-2150 ELASTO DIP pink
	750-3150 ELASTO DIP rot
- 741-0000 Tauchwachs DUO DIP 80g	750-4150 ELASTO DIP braun

- 741-0100 Tauchwachs MASTER DIP 100g transparent

- 741-0110 Tauchwachs MASTER DIP 100g orange

- 400-0009 CPU Upgrade Kit (Bodenplatte)

Unsere Tauchwachse sind individuell mischbar. Empfehlung 80% Preci Dip zu 20% Elasto Dip.

8. Trouble Shooting List

Fehler

Gerät bootet nicht hoch und zeigt schwarzen Balken an

Geschmolzenes Wachs nicht ausreichend durchgemischt

Gerät meldet am Display „Überhitzung“

Gerät schaltet nach 10 Stunden Betriebszeit ab

Fehlerbehebung

Gerät aus- und erneut einschalten

In der Heizphase den Drehdeckel geschlossen halten

Gerät ausschalten, 10 min. warten und erneut einschalten

Bei mehrfacher Wiederholung der Meldung muß das Gerät zur Überprüfung eingesendet werden

Gerät erneut einschalten

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	08.03.2013/TB	05.10.2017/ST	0	08.03.2013/TB	Seite 4 von 4