



Instrucciones de manejo abreviadas

- ① **Tecla de velocidad:** Arrancar el motor / Incrementar la velocidad.
- ① **Tecla de medio de refrigeración:** Para la tecla de medio de refrigeración pueden ajustarse dos modos operativos. Dependiendo del modo operativo configurado, la tecla de refrigerante tiene las siguientes funciones:
 Pulsar brevemente - conectar/desconectar cantidad de transporte de refrigerante o
 Pulsar brevemente - ajustar la cantidad de refrigerante a suministrar de 0 ml/s a 110 ml/s (4 niveles).
 Pulsación larga - activación manual de la función de enjuague.
- ③ **Tecla de programación:** Pulsar brevemente, paso de programa hacia delante Pulsación larga, paso de programa hacia atrás.
- ④ **Tecla de sentido de giro del motor:** Ajustar el sentido de giro del motor.

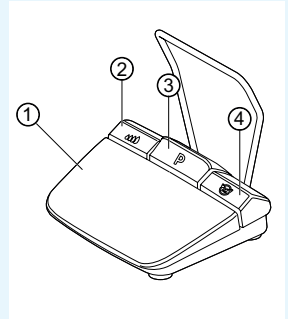

Conectar el juego de mangueras

1. Cerrar la pinza de la manguera ⑦.
2. Fijar la manguera del refrigerante ① a la pieza de mano o al contra-ángulo.
3. Fijar los clips ② de forma ajustada al cable del motor.
4. Encajar el adaptador de manguera ③.
5. Introducir la manguera en la bomba (aprox. 1 cm de distancia entre el conector y la entrada de la bomba).
6. Introducir la aguja de perforar ⑥.
7. Abrir la pinza de la manguera ⑦.

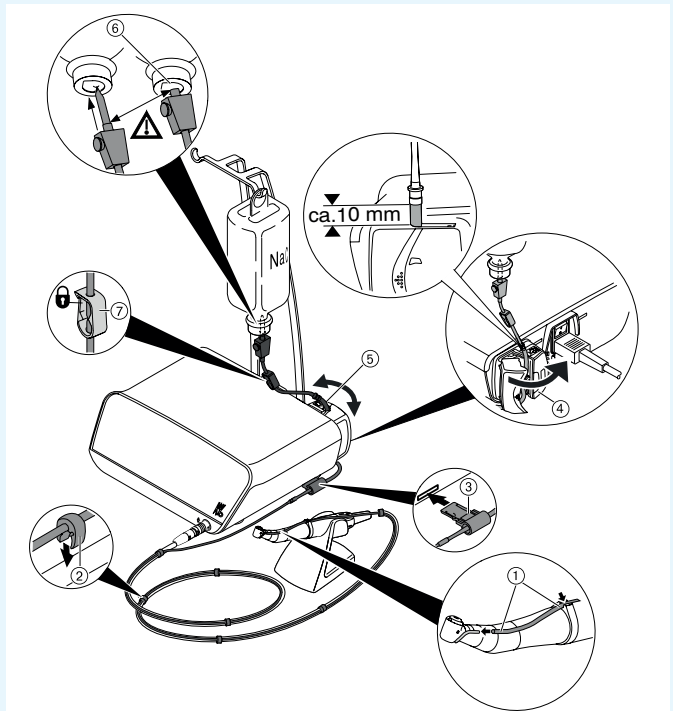

Nota


Si se utiliza una botella de cristal, abra el dispositivo de purga de la aguja ⑥.



CUIDADO

Estas instrucciones de manejo abreviadas contienen sólo las funciones de manejo esenciales. Siempre se deberán tener en cuenta las instrucciones de uso contenidas en el volumen de suministro antes de la primera puesta en funcionamiento así como cuando el manejo corra a cargo de personas no familiarizadas con este producto sanitario.



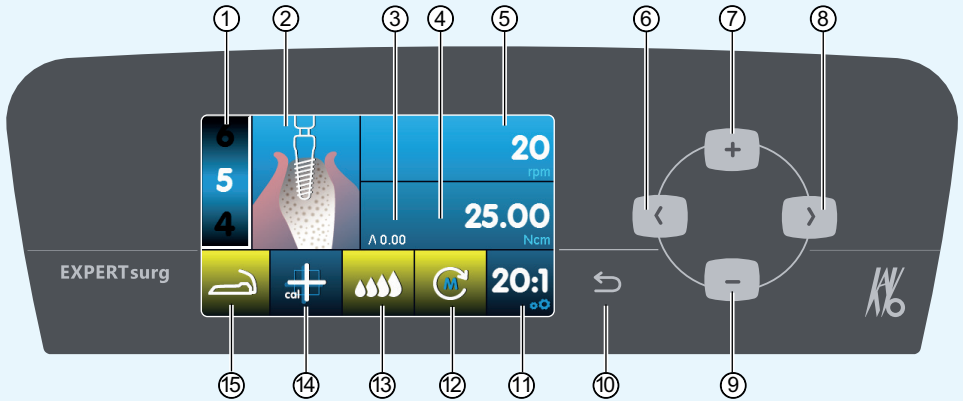

- ① Paso de programa (de 1 hasta máx. 10)
- ② Representación de la actividad (seleccionable por separado para cada uno de los pasos del programa)
- ③ Par de giro máximo producido
- ④ Limitación del par de giro
- ⑤ Velocidad de giro
- ⑥ Tecla de flecha a la izquierda
- ⑦ Tecla Más, aumentar valor
- ⑧ Tecla de flecha a la derecha
- ⑨ Tecla Menos, reducir valor
- ⑩ Tecla de retroceso (presionar brevemente: retroceder) (presionar durante más tiempo: ajustes del aparato)
- ⑪ Multiplicación
- ⑫ Sentido de giro del motor
- ⑬ Ajuste de la bomba de refrigerante
- ⑭ Activación de la calibración One Touch (para la determinación exacta del par de giro)
- ⑮ Indicador de estado del reóstato de pie

Modificar parámetro y actividad

Seleccionar ajuste del aparato

Presionar la tecla de retroceso ⑩ brevemente, para acceder a la selección de los pasos del programa. Presionar durante más tiempo para acceder a los ajustes del aparato.

Seleccionar parámetro o actividad

(tecla de flecha a la izquierda ⑥ o tecla de flecha a la derecha ⑧)

Modificar parámetro o actividad

(tecla Más ⑦, tecla Menos ⑨ o teclas de pie)

El almacenamiento se realiza automáticamente al abandonar el parámetro o la actividad.

Limitar el número de pasos de programa

Seleccionar el paso del programa tras el último paso de programa deseado y seleccionar la actividad "Bandera".

Anular la limitación de pasos de programa

Marcar el paso de programa con actividad "Bandera" y seleccionar una nueva actividad.

