



Kort bruksanvisning

- ① **Varvtalsknapp:** Starta motorn/öka varvtalet.
- ② **Kylmedelsknapp:** För kylmedelsknappen kan 2 driftsätt ställas in. Beroende av de inställda driftsätten har Kylmedelsknappen följande funktioner:
Tryck kort – starta/avbryt kylmedelsflöde eller
tryck kort – ställ in kylmedelsflödet mellan 0 ml/s till 110 ml/s (fyra steg).
Tryck länge – aktivera manuell spolfunktion.
- ③ **Programknapp:** Tryck kort – programsteg framåt.
Tryck länge – programsteg bakåt.
- ④ **Knapp för motorns rotationsriktning:** Ställa in motorns rotationsriktning.

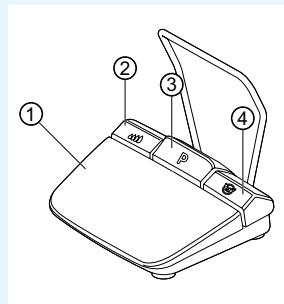

Ansluta slangset

1. Anslut slangklämma ⑦.
2. Fäst kylmedelsslangen ① i hand- eller vinkelstycket.
3. Fäst klämmor ② tätslutande mot motorledningen.
4. Haka fast slangadaptorn ③.
5. Lägg in slangen i pumpen (ca. 1 cm avstånd mellan konnektor och pumpgång).
6. Stick in insticksnålen ⑥.
7. Öppna slangklämman ⑦.

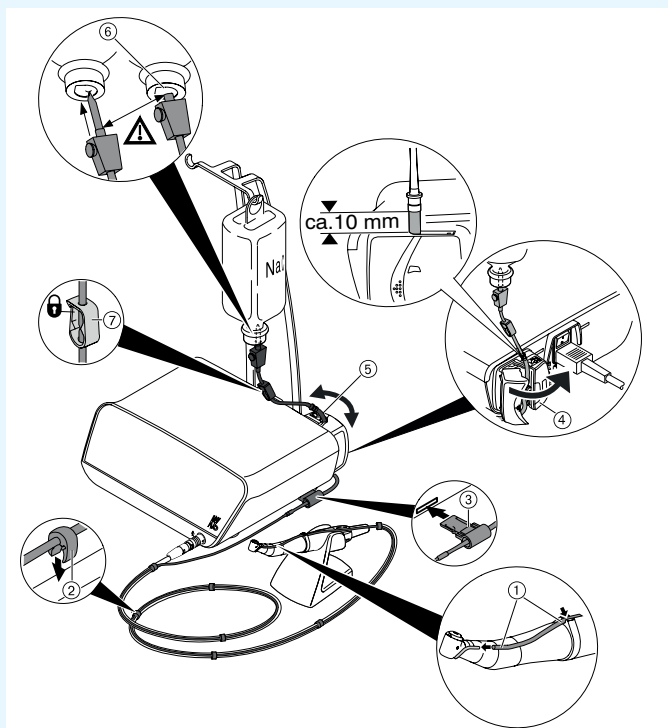

Information


Ventilationen vid insticksnålen ⑥ får endast öppnas vid glasflaskor.



FÖRSIKTIGHET

Den här snabbmanualen innehåller endast de viktiga betjäningfunktionerna. Före första idrifttagningen och vid betjäning genom personer som inte är förtrogna med användning av denna medicinska produkt, måste bruksanvisningen som hör till leveransomfånget ovillkorligen beaktas.



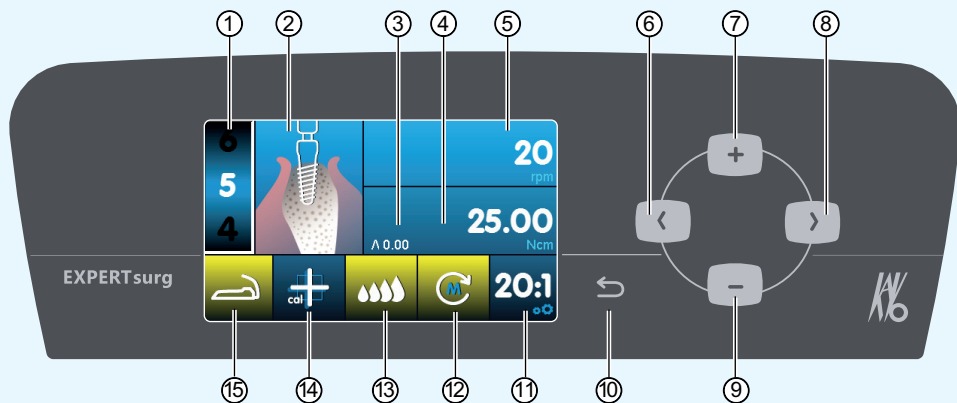

- ① Programsteg
(1 till max. 10)
- ② Visning av aktiviteten
(kan väljas separat för varje enskilt programsteg)
- ③ Maximalt inträffat vridmoment
- ④ Vridmomentsbegränsning
- ⑤ Varvtal
- ⑥ Vänster pilknapp
- ⑦ Plusknapp, öka värdet
- ⑧ Pilknapp höger
- ⑨ Minusknapp, minska värdet
- ⑩ Tillbakaknapp
(tryck kort: tillbaka)
(tryck länge: apparatinställningar)
- ⑪ Utväxling
- ⑫ Motorns rotationsriktning
- ⑬ Inställning kylmedelspump
- ⑭ Aktivering One Touch-kalibrering
(till exakt vridmomentsbestämning)
- ⑮ Statusvisning fotstart

Ändra parameter och aktivitet

Välja apparatinställning

Tryck kort på bakåtknappen ⑩ för att komma till valet av programsteg.
Tryck länge för att aktivera apparatinställningarna.

Välj parameter eller aktivitet

(pilknapp vänster ⑥ eller pilknapp höger ⑧)

Ändra parameter eller aktivitet

(plusknapp ⑦, minusknapp ⑨ eller fotknappar)

Systemet sparar automatiskt när parametern eller aktiviteten lämnas.

Begränsa antalet programsteg

Välj programsteg efter det senast önskade programsteget och välj aktiviteten „Flagga“.

Upphäva programstegsbegränsning

Välj programsteg med aktiviteten „Flagga“ och ny aktivitet.

