

Produktinformation

Einwegfilter für Sauganlagen



0725-041-00 Einwegfilter (12 Stück)
0725-041-60 Einwegfilter (36 Stück)

Produktbeschreibung

Der Einwegfilter von DÜRR DENTAL soll Verunreinigungen und Partikel (bspw. Zahnstücke) zurückhalten.

Dadurch wird das nachfolgende Separier- und Absaugsystem, wie zum Beispiel CAS 1 und Saugmaschine, geschützt.

Um die volle Saugleistung und den Hygienestandard gewährleisten zu können, muss der Einwegfilter einmal wöchentlich durch ein DÜRR DENTAL Originalteil ausgetauscht werden.

Der Filter ist als Einwegfilter deklariert und darf nicht ausgewaschen und mehrfach verwendet werden, da dadurch das Filtergewebe geschädigt wird und damit der Schutz nachfolgender Komponenten nicht mehr gewährleistet wird.

Durch den Griff mit integrierter Filterstange ist ein einfacher Filterwechsel möglich.

Die Abholung und Entsorgung der benutzten Einwegfilter muss von einem lizenzierten Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Einbauort

- Schlauchablage
- Vorfilter in der Saugleitung (in der Behandlungseinheit)

Materialien

- Filter: HDPE
- Gewebe: PA
- Filterstange: PP

Maschenweite

0,35 x 0,75 mm

Wechselintervall

Wöchentlich

