



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Ultradent Products

Endo-Eze™ MTAFlow White

Produkteinführung
März 2022

ENDO-EZE™
MTAFLOW™
WHITE





Vergleich

Original MTAFlow™ und MTAFlow™ White

- Beide Artikel vereinen dieselben einzigartigen Eigenschaften, jedoch zeichnet sich das neue Produkt durch seine *nicht*-färbende Formel aus.
 - Das Material kann in gewünschter Menge und Konsistenz schnell angemischt werden.
 - Die Applikation mit NaviTip™ Tips 29 ga gewährleistet eine präzise Platzierung bei der Apexifikation, beim apikalen Verschluss und bei der Resorption.

Funktion

Vorteile & Besonderheiten

- Endo-Eze MTAFlow™ White ist ideal für Anwendungen oberhalb des gingivalen Rands, da es aus einer röntgenopaken Substanz besteht, welche *nicht* zu Verfärbungen des Zahns führt.
- Somit ist dieser Reparaturzement im ästhetischen Bereich des Zahns *nicht* sichtbar (bei Pulpaüberkappung, Wurzelperforation, Pulpotomie vitaler Milchzähne, etc.)
- Pulver und Gel lassen sich simpel in der gewünschten Menge dosieren

Funktion

Indikationen

- Der vielseitige Reparaturzement eignet sich u.a. für die folgenden Indikationen:
 - Pulpotomie
 - Pulpaüberkappung
 - Retrograde Wurzelfüllung
 - Apexifikation
 - Verschluss von Wurzelperforationen
 - Reparatur von Wurzelresorptionen
- und kann zu verschiedenen Viskositäten vermischt werden – von einer Putty-Konsistenz bis hin zu einer dünnflüssigen Konsistenz, die mithilfe des 29 ga NaviTip™ Tips platziert wird.

Anleitung

Mischanleitung

**ENDO-EZE™
MTAFlow™**

**ENDO-EZE™
MTAFlow™
WHITE**


Technique Guide






Endo-Eze MTAFlow White

1. Entfernen Sie überschüssiges Pulver mit einem Zementspatel. Verwenden Sie das Pulver **NICHT**, ohne vorher die Löffelfüllung am Rand glatt zu streichen.

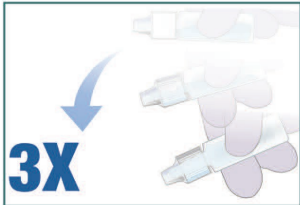

3X

2. Schütteln Sie den Inhalt 3 Mal von oben nach unten. Vergewissern Sie sich, dass sich das Gel am vorderen Spitzenende des Fläschchens befindet, bevor Sie das Gel ausbringen.

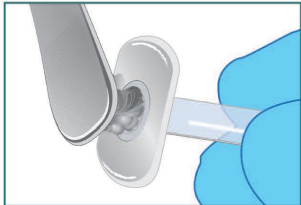

3. Nach dem Anmischen füllen Sie den gemischten Endo-Eze MTAFlow Zement in das hintere Ende der transparenten Skini Spritze ein.



4. Setzen Sie den Spritzenstempel ein und drücken Sie eine kleine Menge Material durch die Spitze heraus.



**15
minutes**

5. Der angemischte Endo-Eze MTAFlow Zement im Spritzeninneren ist bis zu 15 Minuten gebrauchsfähig.



6. Verwenden Sie die dünnflüssige Konsistenz und einen NaviTip™ 29 ga für die Applikation des Endo-Eze MTAFlow Zements in den Kanal.


Anleitung

Technische Anleitung



Indikation	Pulpaüberkappung, Perforation des Pulpakammerbodens, Pulpotomie	Resorption, Apexifikation, apikaler Verschluss	Retrograde Wurzelfüllung
Pulver (Messlöffel)	2x große Füllung (0,26 g)	1x große Füllung plus 1x kleine Füllung (0,19 g)	1x große Füllung plus 1x kleine Füllung (0,19 g)
Geltropfen	3 Tropfen	3 Tropfen	1 Tropfen*
Konsistenz	Dickflüssig	Dünnflüssig	Putty
Tip	Micro 20 ga Tip	NaviTip™ Tip (29 ga)	Applikation ohne Spritze

*Abhängig von der gewünschten Konsistenz.

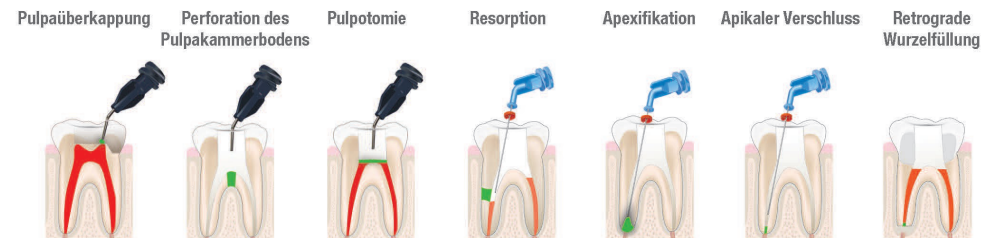

ULTRADENTPRODUCTS.COM
© 2022 Ultradent Products, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Alle Komponenten in einem Kit

Anwendung

- MTAFlow™ White enthält, wie das original MTAFlow™ Kit, alle notwendigen Komponenten zum Anmischen sowie für die präzise Applikation des Zements.
- Pulver und Gel reichen für 8-10 Anwendungen.

MTAFlow™ White Kit

8-10 Anwendungen pro Kit



- 1x Technische Anleitung
- 1x Gebrauchsanleitung
- 1x MTAFlow White Pulver (2g)
- 1x MTAFlow Gel (2ml)
- 1x Messlöffel
- 20x Micro Tips (20 ga)
- 10 x Skini Spritzen
- 10x Luer Lock Caps


Applikation

NaviTip™ 29 ga Tips

- Für die kontrollierte Applikation an jeder Stelle im Wurzelkanal empfehlen wir Ultradent NaviTip™ 29 ga Tips.

Artikelnummern:

Art.nr.	Produktbezeichnung	Inhalt	mm	Farbe
5112	NaviTip Tips 29 ga	20 St.	17 mm	weiß
1378	NaviTip Tips 29 ga	50 St.	17 mm	weiß
5113	NaviTip Tips 29 ga	20 St.	21 mm	gelb
1374	NaviTip Tips 29 ga	50 St.	21 mm	gelb
5114	NaviTip Tips 29 ga	20 St.	25 mm	blau
1376	NaviTip Tips 29 ga	50 St.	25 mm	blau
5115	NaviTip Tips 29 ga	20 St.	27 mm	grün
1377	NaviTip Tips 29 ga	50 St.	27 mm	grün
5116	NaviTip Tips 29 ga	20 St.	27 mm-17 mm	sortiert
1379	NaviTip Tips 29 ga	50 St.	27 mm-17 mm	sortiert

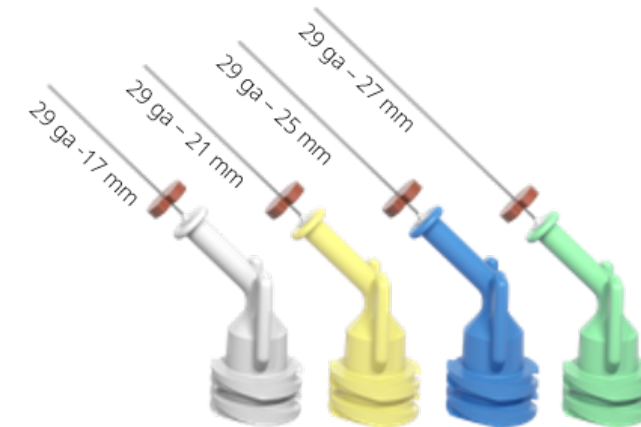

NaviTip™ Tips 29 ga

Preisgestaltung

Produkteinführung Endo-Eze MTAFlow™ White

Artikelnr.	Produktbeschreibung	Inhalt	EK	UVP	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
5980	Endo-Eze MTAFlow White Repair Cement Kit	1x Technik-Anleitung, 1x Gebrauchsanweisung, 1x MTAFlow White Pulver (2 g), 1x MTAFlow Gel (2 ml), 1x Messlöffel, 20x Micro Tips (20 ga), 10x Skini Spritzen, 10x Luer Lock Caps	98,28 EUR	163,80 EUR	152 mm	203 mm	44 mm	193 g

Dieser Artikel ist nicht in der Schweiz erhältlich

