

Brugsanvisning

PEOPLE HAVE PRIORITY

W&H



CE

assistina^{TWIN}

MB-302

Indholdsfortegnelse

Symboler	4
1. Indledning	7
2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	9
3. Udpakning	10
4. Leveringsomfang	11
5. Sikkerhedsanvisninger	12
6. Beskrivelse	14
Forside	14
LED-lamper	15
Adapter Quick ISO/Quick RM (valgfrit tilbehør)	16
Bagside	17
7. Ibrugtagning	18
Indsætning/udtagning af beholder	18
Isætning/udtagning af filteret	19
Påsætning/aftagning af lufttilslutningsslange	20
Tilslutning af strømforsyningen	20
Generelt	20
Tænd/sluk for Assistina Twin	21
Første påfyldning	22
Standby-tilstand	24
Testkørsel	25

Indholdsfortegnelse

8. Drift	26
Generelt	26
Påsætning/aftagning af overførselsinstrumenter med ISO-tilslutning	27 – 28
Påsætning/aftagning af overførselsinstrumenter eller adaptere med RM Fix-tilslutning	29
Vedligeholdelsesproces	30
Oliesmøring af fastspændingssystemet	32
9. Rengøring	35
Medicinsk udstyr	36
Skydevindue	36
Ibrugtagning efter rengøring	37
10. Vedligeholdelse	38
Udskiftning af o-ringe	38
Udskiftning af luftfiltre	39
11. Fejlmeddelelser	40
12. W&H-tilbehør og reservedele	45
13. Service	48
14. Tekniske data	49
15. Bortskaffelse	51
Garantibevis	52
Autoriseret W&H-servicepartner	53



ADVARSEL!
[Risiko for personskade]



OBS!
[Risiko for tingskade]



Almene oplysninger,
uden fare
for mennesker eller ting



CE-mærkning



Må ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet

Symboler

på det medicinske udstyr



Bemærk brugsanvisningen



Må ikke bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet



Varenummer



Produktionsdato



DataMatrix Code
til produktinformation
inklusive UDI (Unique Device
Identification)



Serienummer

V

Enhedens elektriske spænding



CE-mærkning



DC jævnstrøm



Producent



Medicinsk udstyr

Symboler

på emballagen/beholdere



Opad



Skrøbeligt



Skal beskyttes mod fugt




Varemærket "Der Grüne Punkt" –
Duales System Deutschland
GmbH




Varemærke fra RESY OfW GmbH
til markering af genanvendelig
transportemballage og sekundær
emballage af papir og pap.




Medicinsk udstyr

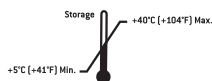

Tilladt
temperaturområde
under opbevaring

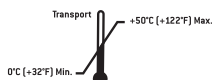

Tilladt
temperaturområde
under transport

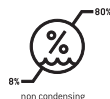

Luftfugtighed,
begrænsning



CE-mærkning



Skal beskyttes mod
varme



Skal anvendes inden



Forsigtig: I henhold til
amerikansk lovgivning er
salg af dette medicinske
udstyr kun tilladt af
eller på ordinerings af en
tandlæge, en læge eller
andet sundhedsfagligt
personale med en licens i den
amerikanske stat, hvor han
eller hun praktiserer, og hvor
det medicinske udstyr skal
anvendes.



Producent



Bemærk brugsanvisningen

1. Indledning

For din egen og dine patienters sikkerhed

Inden apparatet tages i brug første gang, bedes du læse brugsanvisningen. I den forklares det, hvordan du håndterer det medicinske udstyr, så du sikrer dig fejlfri funktion samt økonomisk og sikker behandling.



Følg sikkerhedsanvisningerne.

Anvendelsesområder

Anordning til rengøring af spraykanalerne og til smøring af bevægelige dele på tandlægetekniske overførselsinstrumenter, turbiner, luftmotorer og luftdrevne instrumenter til fjernelse af tandsten.



Enhver anden brug kan beskadige det medicinske udstyr og herved medføre risici og fare for brugeren og tredjemand.

Ved oparbejdningen af overførselsinstrumenterne med det medicinske udstyr sker der ingen desinfektion og ingen sterilisering.

Efter rengøring af spraykanalerne og oliesmøring af overførselsinstrumenterne med det medicinske udstyr, er det nødvendigt med en afsluttende desinfektion og sterilisering.

Brugerens kvalifikationer

Vi har udviklet og fremstillet W&H Assistina med henblik på målgruppen tandlæger, tandhygiejniskere og deres tandmedicinske fagassistenter.

Indledning



Produktion i henhold til EU-direktiv

Det medicinske udstyr opfylder kravene i forordningen (EU) 2017/745.

Producentens ansvar

Producenten kan kun tage ansvaret for påvirkningerne på det medicinske udstyrs sikkerhed, pålidelighed og ydeevne, når nedenstående anvisninger overholdes:

- > Det medicinske udstyr skal anvendes i overensstemmelse med denne brugsanvisning.
- > Det medicinske udstyr har ingen dele, der kan repareres af brugeren (med undtagelse af udskiftning af o-ringe, beholdere, filtre og luftfiltre). Ændringer eller reparationer må kun udføres af en autoriseret W&H-servicepartner (se side 53).
- > De elektriske installationer i rummet skal opfylde kravene i IEC 60364-7-710 ("Indretning af elektriske anlæg i rum der bruges til medicinske formål") eller de gældende forskrifter i det pågældende land.
- > Ved utilladelig åbning af det medicinske udstyr bortfalder kvalitetsgarantien eller øvrige krav.

Usagkyndig brug

Usagkyndig brug samt ikke tilladt montering, ændringer, hhv. reparation af det medicinske udstyr eller tilsidesættelse af vores anvisninger, fritager os fra enhver form for garantiydelse eller andre krav!



Alle alvorlige hændelser, der er forekommet i forbindelse med det medicinske udstyr, skal indberettes til producenten og de ansvarlige myndigheder!

2. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)




Medicinske, elektriske anordninger skal opfylde særlige forsigtighedskrav i forbindelse med EMC og skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med de medfølgende EMC-anvisninger.

W&H garanterer kun apparatets overensstemmelse med EMC-direktiverne, hvis der anvendes originalt W&H-tilbehør og originale W&H-reservedele. Anvendelse af tilbehør og reservedele, som ikke er godkendt af W&H, kan medføre øget udsendelse af elektromagnetiske forstyrrelser eller reduceret modstandsevne mod elektromagnetiske forstyrrelser.


3. Udpakning



- ❶ Tag beholderen med Twin Care SET ud.

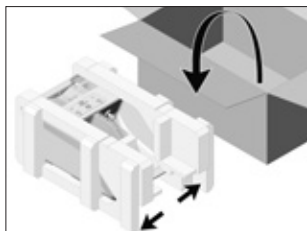

- ❷ Tag det medicinske udstyr ud.

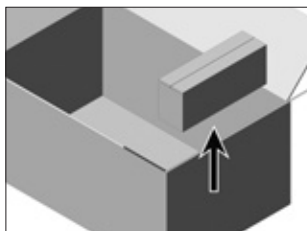

- ❸ Tag æsken med
> lufttilslutningsslangen
> netdelen ud.

W&H-emballagen er miljøvenlig og kan anvendes til genbrug.

Vi anbefaler at du opbevarer originalemballagen.

4. Leveringsomfang

REF	Betegnelse
REF 30310 REF 02697000 REF 07477500 REF 07484000	W&H Assistina Twin (MB-302) Lufttilslutningsslange Netdel MB-302 Twin Care SET MB-302: > Beholder W&H Activefluid, MC-302, 200 ml > Beholder W&H Service Oil F1, MD-302, 200 ml > Filter
valgfrit tilbehør REF 06422600 REF 06395100	Adapter Quick ISO Adapter Quick RM

5. Sikkerhedsanvisninger



Overhold altid følgende henvisninger

- > Opbevar det medicinske udstyr ved stuetemperatur i 24 timer inden første ibrugtagning.
- > Det medicinske udstyr må kun stilles op i rum med tilstrækkelig udluftning!
- > Sørg altid for at arbejde med korrekte driftsbetingelser.
- > Kontrollér altid det medicinske udstyr for beskadigelse, utæthed og løse dele (f.eks. adapter, filterrummets dæksel) før hver anvendelse.
- > Før hver ibrugtagning skal skydevinduet lukkes!
- > Hold det medicinske udstyr lukket under vedligeholdelsesprocessen!

Netdel

- > Anvend kun den medfølgende netdel.
- > Sørg for, at det medicinske udstyr til enhver tid kan kobles fra el-nettet.
- > Kobl det medicinske udstyr fra el-nettet i farlige situationer! Træk netdelens stik ud af stikkontakten!



Stil det medicinske udstyr på en plan, vandret overflade.

Sikkerhedsanvisninger

Medicinsk udstyr

Det medicinske udstyr er klassificeret som "almindeligt apparat" (lukkede apparater uden beskyttelse mod vandindtrængning).

Procesvæsker



- > Efter indånding: Tilførsel af frisk luft. Søg læge ved ubehag.
- > Efter kontakt med huden: Vask med sæbe og rigeligt med vand.
- > Efter kontakt med øjnene: Skyl øjnene under rindende vand i flere minutter med åbnet øjenlåg. Søg læge hvis ubehaget varer ved.
- > Efter slugning: Søg læge hvis ubehaget varer ved.
- > Brug kun procesvæsker, der er godkendte af producenten.

Godkendte procesvæsker

- > W&H Activefluid, MC-302
- > W&H Service Oil F1, MD-302


Beholdere




- > Fejlbehæftede og/eller utætte beholdere skal udskiftes med det samme!
- > Beskyt beholderne mod direkte sollys!



Beholderspidsen i det medicinske udstyr er skarp.
Vær opmærksom på faren for personskade på grund af den udstikkende spids!

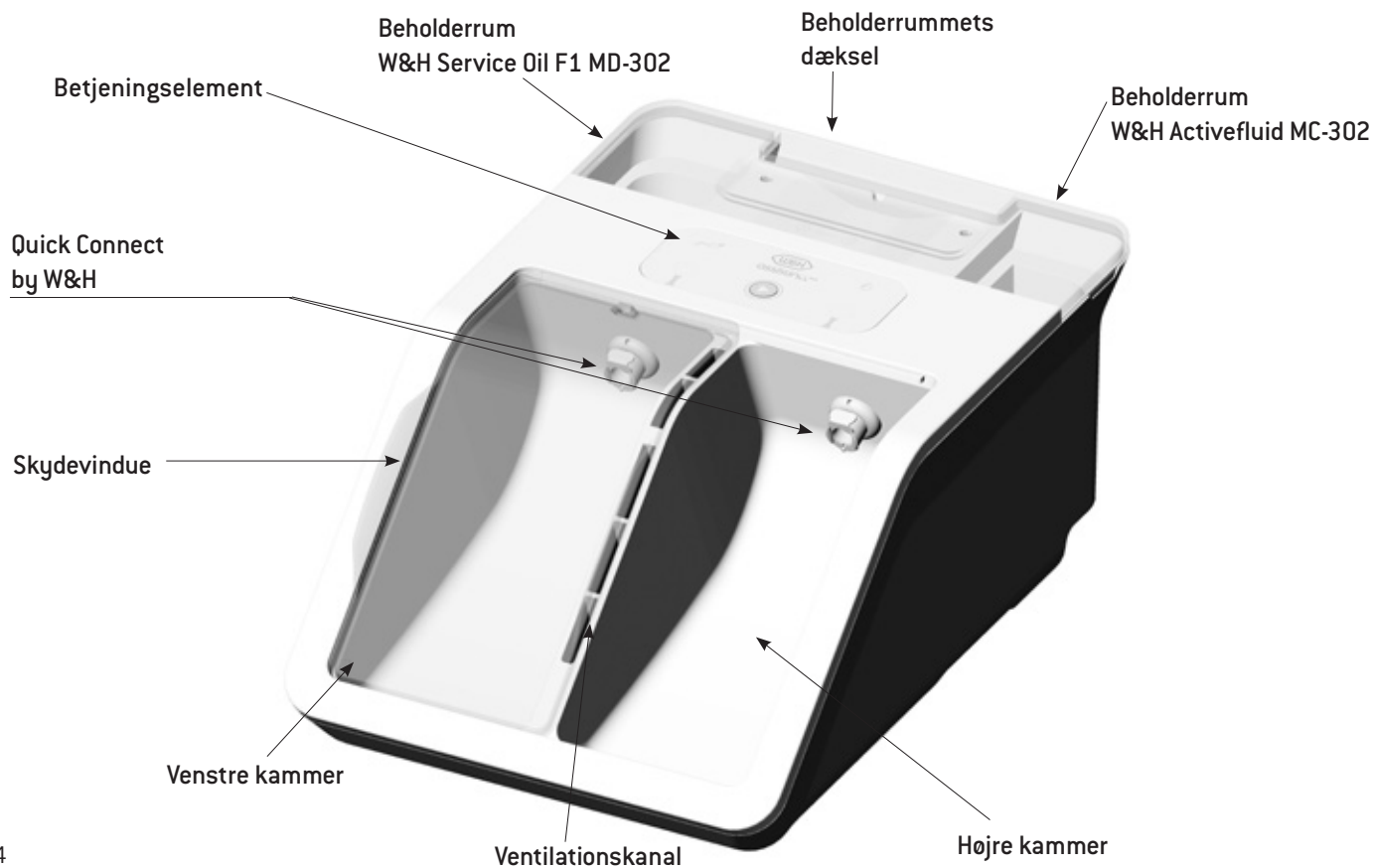


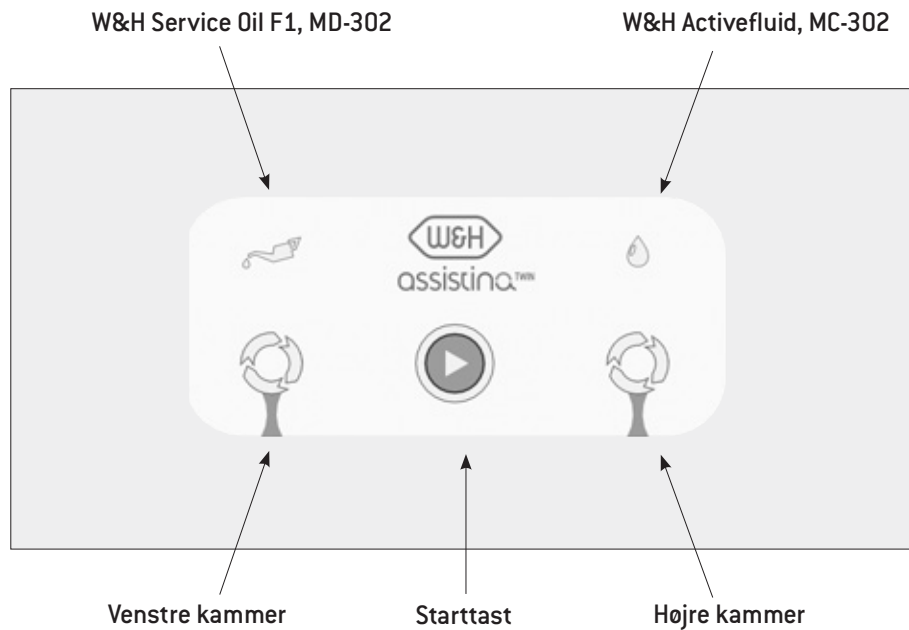


Beskrivelse


Adapter Quick ISO/Quick RM (valgfrit tilbehør)

Adapter Quick ISO

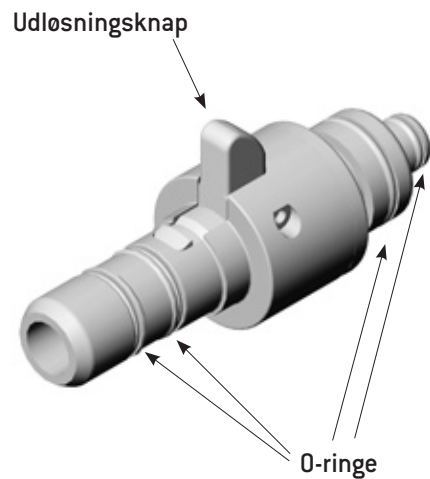

Adapter Quick RM

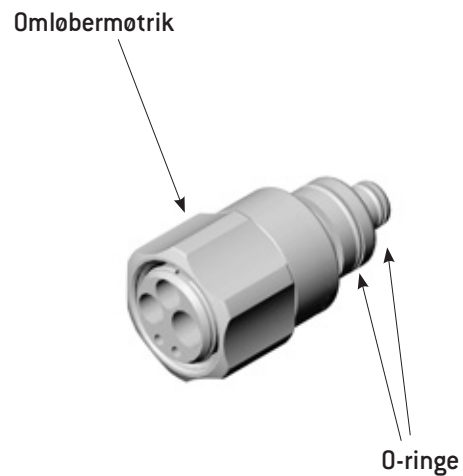

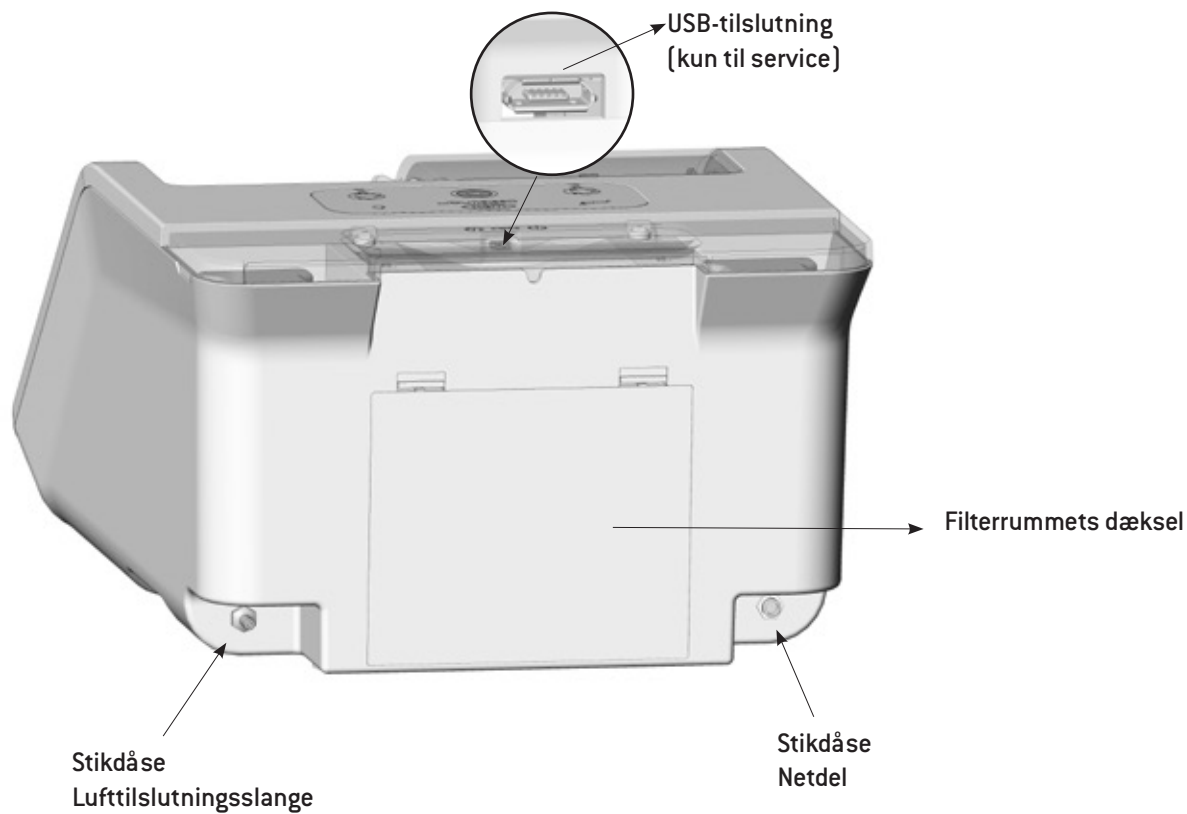

7. Ibrugtagning

Indsætning/udtagning af beholder




Beholderne skal have rumtemperatur når de sættes i.



Beholderspidsen i det medicinske udstyr er skarp.


Vær opmærksom på faren for personskade på grund af den udstikkende spids!

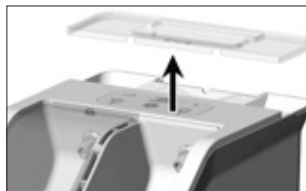


- 1 Tag beholderrummets dæksel af.**



- 3 Tag beholderen ud.**
> Træk beholderen ud.

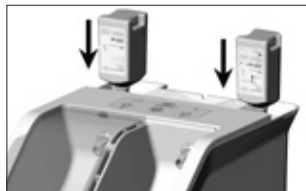

- 2 Sæt beholderen i.**
> Tryk beholderen i til anslaget.

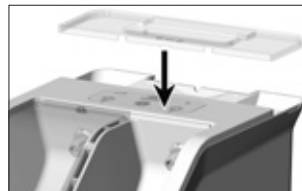


- 4 Sæt beholderrummets dæksel på.**




Ved hvert beholderskift

- > Gør beholderrummet rent.
- > Gennemfør første påfyldning.


Vær opmærksom på producentens anvisninger ved anvendelse af desinfektionsmidler.

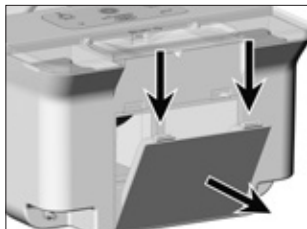

❶ Åbn filterrummets dæksel.

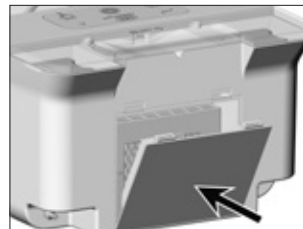

❸ Luk filterrummets dæksel.

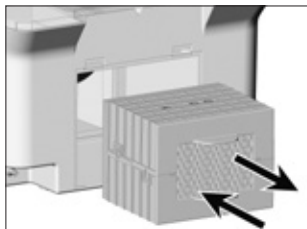

❷ Isæt/udtag filteret.

- > Tryk filteret ind til anslaget.
- > Træk filteret ud.



Gør filterrummet rent ved hvert filterskift.


Vær opmærksom på producentens anvisninger ved anvendelse af desinfektionsmidler.



Brug kun ikke-forurenet, oliefri, tør og filtreret trykluft i henhold til ISO 7494-2.

> Hvis der er meget snavs skal filteret udskiftes.


Påsætning/aftagning af lufttilslutningsslange

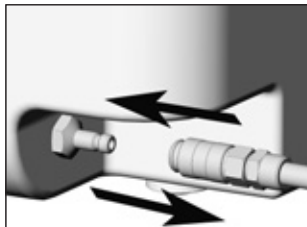


❶ Sæt lufttilslutningsslangen på.

❷ Tag lufttilslutningsslangen af.

Tilslutning af strømforsyningen

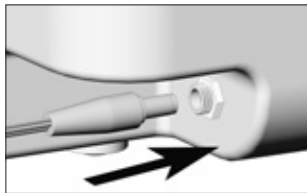

❸ Slut netdelen til det medicinske udstyr.

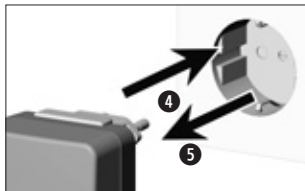

④ Sæt netdelen i en stikkontakt.

⑤ Træk netdelen ud af stikkontakten.



- > Gennemfør første påfyldning uden overførselsinstrument.
- > Start med et valgfrit kammer.



- ❶ Luk det ene kammer med skydevinduet.



- ❷ Tryk på starttasten i ca. 5 sekunder.



Første påfyldning af det 1. kammer tager ca. 1 minut.



- > LED'en for kammeret blinker grønt.
- > LED'en for W&H Service Oil og W&H Activefluid lyser grønt.



Første påfyldning af det 1. kammer er afsluttet korrekt.



- > LED'en for det 1. kammer lyser grønt.
- > LED'en for det 2. kammer lyser orange.
- > LED'en for W&H Service Oil og W&H Activefluid lyser grønt.



3 Luk det andet kammer med skydevinduet.



Den første påfyldning fortsættes automatisk.



Første påfyldning af det 2. kammer tager ca. 1 minut.



- > LED'en for kammeret blinker grønt.
- > LED'en for W&H Service Oil og W&H Activefluid lyser grønt.



Den første påfyldning er afsluttet korrekt.



LED'erne for begge kamre lyser grønt.



Efter den første påfyldning rengøres begge kamre med en fugtig klud.



Efter

- > isætning af netdelen i stikkontakten eller
- > 15 minutter hvor apparatet ikke bruges, skifter det medicinske udstyr automatisk til standby-tilstand.



Ingen LED lyser.



Aktivering af Assistina Twin

- > Tryk på starttasten.



Alle LED'er lyser hvidt i 1 sekund.
Der høres en signallyd.

Driftsklar



Starttasten lyser grønt.

- > Sæt et foruddesinficeret overførselsinstrument på Quick Connect by W&H (se side 27 – 29).
- > Start Assistina Twin'en (se side 30).



Ved udtagningen er overførselsinstrumentet en smule fugtigt.
Derefter følger den manuelle desinfektion og sterilisering.



I tilfælde af driftsfejl (f.eks. vibrationer, unormale lyde, hvis instrumentet bliver varmt eller i tilfælde af utæthed) skal det medicinske udstyr straks tages ud af drift, og du skal så henvende dig til en autoriseret W&H-servicepartner (se side 53).



> Brug beskyttelsespåklædning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.


> Vær opmærksom på instruktionerne omkring "Hygiejne og vedligeholdelse" i brugsanvisningen til overførselsinstrumenterne.



Beskadigede eller utætte o-ringe skal udskiftes med det samme (se side 37).

Påsætning/aftagning af overførselsinstrumenter med ISO-tilslutning

Påsætning af overførselsinstrumenter med ISO-tilslutning

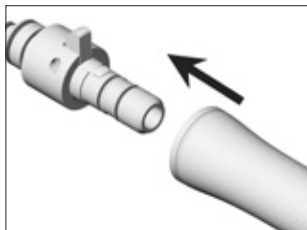


- 1 Sæt overførselsinstrumentet på adapteren med udgangsåbningen vendt nedad.
 Indstil luftmotorens drejering til venstre- eller højredrejning.
Der sker ingen vedligeholdelse i stillingen "0".




- 2 Sæt overførselsinstrumentet med adapter på.

Aftagning af overførselsinstrumenter med ISO-tilslutning

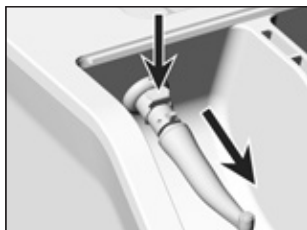


- 1 Tryk på udløsningsknappen, og træk overførselsinstrumentet med adapter af.

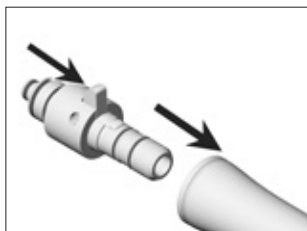

- 2 Klap udløsningsknappen fremad, og træk overførselsinstrumentet af.

Påsætning af overførselsinstrumenter eller adaptere med RM Fix-tilslutning

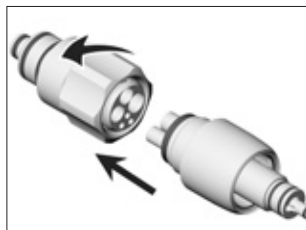


- 1 Sæt overførselsinstrumentet eller adapteren på Quick RM-adapteren, og stram omløbermøtrikken mod venstre med håndkraft.




- 2 Sæt Quick RM-adapteren med overførselsinstrumentet eller adapteren med overførselsinstrumentet på.

Aftagning af overførselsinstrumenter eller adaptere med RM Fix-tilslutning

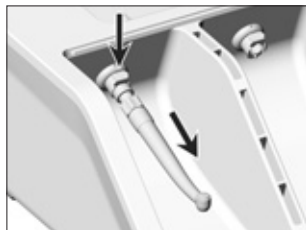

- 1 Tryk på udløsningsknappen, og træk Quick RM-adapteren med overførselsinstrumentet eller adapteren med overførselsinstrumentet af.

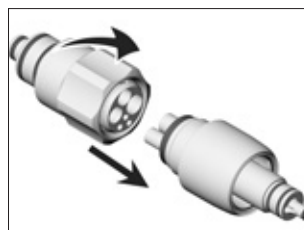

- 2 Skru omløbermøtrikken af mod højre med håndkraft, og træk den af overførselsinstrumentet/adapteren.



- > Mængden af W&H Activefluid, MC-302 og W&H Service Oil F1, MD-302 er doseret nøjagtigt til vedligeholdelsesprocessen.
- > Vedligeholdelsesprocessen kører automatisk og identisk i begge kamre.



❶ Luk skydevinduet.



❷ Tryk på starttasten.



Vedligeholdelsesprocessen gennemføres.



- > LED'en blinker grønt.
- > Vedligeholdelsesprocessen afsluttes automatisk efter ca. 10 sekunder.



Vedligeholdelsesprocessen er afsluttet korrekt.




- > LED'en for kammeret lyser grønt.
- > Der høres en signallyd.



- > Tag det roterende instrument af.
- > Anvend adapterne Quick ISO REF 06422600 og REF 02693000.
- > Oliesmøring af fastspændingssystemet kan udføres i begge kamre.



❶ Luk skydevinduet.

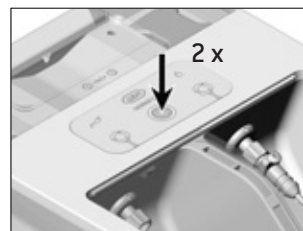


❸ Tryk to gange på starttasten.



❷ Sæt adapteren på med udgangsåbningen vendt nedad.



Starttasten lyser lilla.

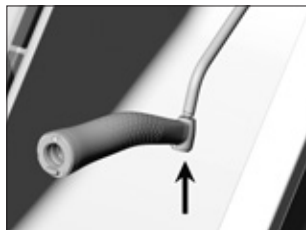

- ④ Ret instrumentet ind efter udgangsåbningen.



- ⑤ Tryk på starttasten.



Oliesmøringen gennemføres.

- > LED'en blinker lilla.
- > Oliesmøringen afsluttes automatisk efter ca. 5 sekunder.



Brug beskyttelsespåklædning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.
Der strømmer spraytåge ud.




Oliesmøringen er afsluttet korrekt.



- > LED'en for kammeret og starttasten lyser lilla.
- > Der høres en signallyd.

Fortsæt med oliesmøringen.

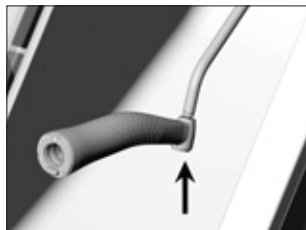

- ⑥ Ret instrumentet ind efter udgangsåbningen.



- ⑦ Tryk på starttasten.

Afslut oliesmøringen.



- ⑧ Åbn og luk skydevinduet.
LED'en i starttasten lyser grønt.



- ⑨ Tag adapteren af.



- > Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for rengøring og desinfektion.
- > W&H anbefaler rengøring og desinfektion af det medicinske udstyr en gang om dagen eller efter behov.



Brug beskyttelsespåklædning, beskyttelsesbriller, beskyttelsesmaske og handsker.



Rengøringsmidler

Brug kun vaske- og rengøringsmidler, som er beregnet til rengøring af medicinsk udstyr af metal og plastic.



- ❶ Slukning
Kobl det medicinske udstyr fra el-nettet.



- ❷ Tag skydevinduet af.

Medicinsk udstyr

Manuel rengøring, indvendigt og udvendigt



- Gør kamrene rene med en tør klud.
Den udvendige overflade og kamrene skal desinficeres ved aftørring.


> Aftøringsdesinfektion anbefales.

Skydevindue


Manuel rengøring og desinfektion indvendigt og udvendigt

> Skydevinduet skal skylles med demineraliseret vand (<35 °C/<95 °F) og desinficeres ved aftørring.

Ibrugtagning efter rengøring

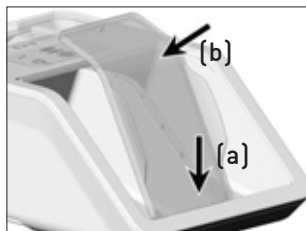

- 1 Isæt skydevinduet.

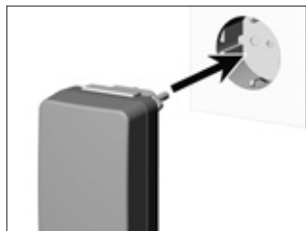


- 2 Tænding
Tilslut det medicinske udstyr til el-nettet.

10. Vedligeholdelse


Udskiftning af o-ringe




Udskift straks beskadigede eller utætte o-ringe.
Brug ikke skarpt værktøj!

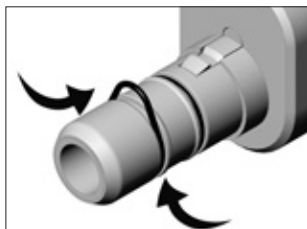

❶ Tryk o-ring fast sammen med tommel- og pegefinger, så den danner en løkke.

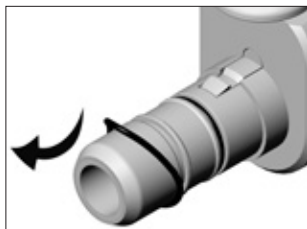

❷ Træk o-ring af.

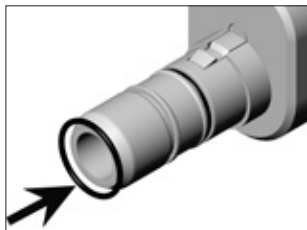


❸ Sæt en ny o-ring på.




Inden luftfiltret udskiftes, skal den centrale lufttilførsel lukkes.




- > Udskift luftfiltret ved tilsmudsning eller mindst én gang om året.
- > Brug kun ren filtreret trykluft!

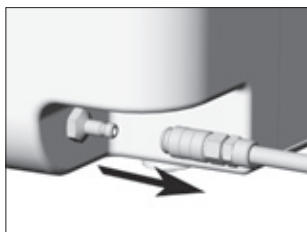


1 Tag lufttilslutningsslangen af.

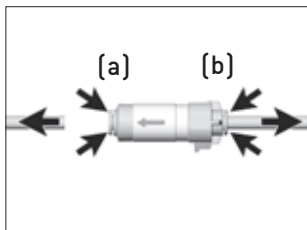

2 Skub ringen [a, b] hen til luftfiltret, og træk lufttilslutningsslangen af.

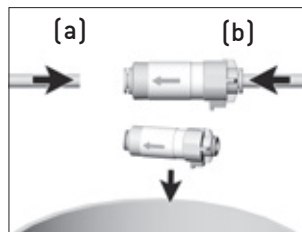

3 Udskift luftfiltret, og sæt lufttilslutningsslangen [a, b] på.

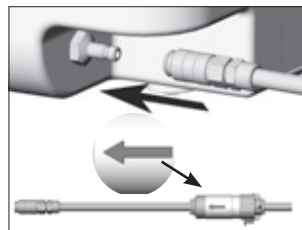

4 Sæt lufttilslutningsslangen på.



Vær opmærksom på luftfiltrets gennemstrømningsretning.

11. Fejlmeddelelser

LED-lamper	Beskrivelse	Afhjælpning
 Ingen LED lyser.	Det medicinske udstyr er i standby-tilstand eller det medicinske udstyr er ikke tilsluttet til el-nettet	> Tryk på starttasten. > Øpret strømforsyning.
 LED'erne for kamrene og starttasten lyser rødt.	Fejl i elektronikken	> Kobl det medicinske udstyr fra og slut det til igen. > Tryk på starttasten. Fejlen forekommer igen: > Send hele det medicinske udstyr til en autoriseret W&H-servicepartner.
 LED'erne for kamrene lyser orange.	Åbent skydevindue.	> Luk skydevinduet.

Fejlmeddelelser

LED-lamper	Beskrivelse	Afhjælpning
 LED'en i starttasten lyser blå.	Manglende luft	> Genopret luftforsyningen.
 LED'en for højre <u>eller</u> venstre kammer lyser rødt. LED'en i starttasten lyser grønt.	Vedligeholdelsesprocessen er ikke afsluttet korrekt.	> Tryk på starttasten. > Gentag vedligeholdelsesprocessen.
 LED'en for højre <u>eller</u> venstre kammer lyser rødt. LED'en i starttasten lyser blå.	Vedligeholdelsesprocessen er ikke afsluttet korrekt – manglende luft	> Genopret luftforsyningen. > Tryk på starttasten. > Gentag vedligeholdelsesprocessen.

Fejlmeddelelser

LED-lamper	Beskrivelse	Afhjælpning
 LED'en for højre <u>eller</u> venstre kammer, LED'en for W&H Service Oil <u>og</u> W&H Activefluid lyser rødt. LED'en i starttasten lyser grønt.	Første påfyldning er ikke afsluttet korrekt.	> Kontrollér beholderne: > isæt dem korrekt. > tom (udskift beholderen). > Tryk på starttasten. > Gentag første påfyldning.
 LED'en for højre <u>eller</u> venstre kammer, W&H Service Oil <u>og</u> W&H Activefluid lyser rødt. LED'en i starttasten lyser blå.	Første påfyldning er ikke afsluttet korrekt. Manglende luft	> Genopret luftforsyningen. > Tryk på starttasten. > Gentag første påfyldning.

Fejlmeddelelser

LED-lamper	Beskrivelse	Afhjælpning
 W&H Service Oil og W&H Activefluid lyser orange.	Lavt væskeniveau i beholderen	> Udskift beholderen så hurtigt som muligt.
 W&H Service Oil og W&H Activefluid lyser rødt.	Beholderne er tomme	> Udskift beholderne. > Gennemfør første påfyldning.

Fejlmeddelelser

LED-lamper	Beskrivelse	Afhjælpning
 LED'en for højre <u>eller</u> venstre kammer lyser rødt. LED'en i starttasten lyser lilla.	Oliesmøringen af fastspændingssystemet er ikke afsluttet korrekt.	> Tryk på starttasten. > Gentag oliesmøringen.
 LED'en for højre <u>eller</u> venstre kammer lyser rødt. LED'en i starttasten lyser blå.	Oliesmøringen af fastspændingssystemet er ikke afsluttet korrekt. Manglende luft	> Genopret luftforsyningen. > Tryk på starttasten. > Gentag oliesmøringen.

Hvis en af de beskrevne fejl ikke kan afhjælpes med ovennævnte afhjælpning, er det nødvendigt at få det kontrolleret af en autoriseret W&H-servicepartner (se side 53).

- > Kobl det medicinske udstyr fra lufttilslutningsslangen og netdelen.
- > Tag instrumenterne og beholderne ud af det medicinske udstyr.

12. W&H-tilbehør og reservedele



Brug kun originalt tilbehør og originale reservedele fra W&H eller tilbehør, der er godkendt af W&H!



06395100

Adapter Quick RM



06422600

Adapter Quick ISO



02679000

Adapter til aftagelige
vinkelstykkehoveder



02690400

Adapter til alle
W&H produkter
med Roto Quick-system



02083500

Borden 2/3-huls adapter
til turbiner med fast tilslutning

W&H-tilbehør og reservedele



02691000

Adapter, der passer til
overførselsinstrumenterne T1 CLASSIC fra
firmaet Sirona Dental Systems



02692000

Adapter, der passer til turbiner
fra serierne T1, T2, T3 fra
firmaet Sirona Dental Systems



04713200

Adapter, der passer til Multiflex-tilslutningen
fra firmaet Kaltenbach & Voigt



05204600

Adapter til Entran-
vinkelstykkestud



02693000

Adapter til oliesmøring
af fastspændingssystemet



02675200


Luftfilter

W&H-tilbehør og reservedele



07484000

Twin Care SET
MB-302

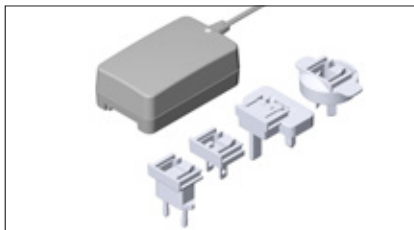


07477500

Netdel MB-302



02697000

Lufttilslutningsslange 2 m

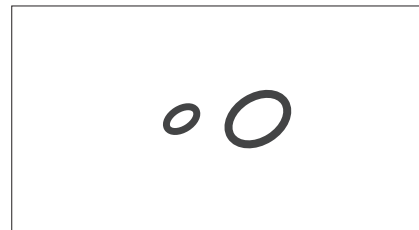

02060100

O-ring, Roto Quick-adapter, stor

02060200

O-ring, Roto Quick-adapter, lille

03006100

O-ring, adapter Quick RM og
Quick ISO, stor

01208300

O-ring, adapter Quick RM og
Quick ISO, lille

02695700

O-ring, adapter Quick ISO

13. Service

Reparation

Hvis der opstår defekter, skal hele det medicinske udstyr indsendes.

Ved returforsendelse

Henvend dig hos en autoriseret W&H-servicepartner ved eventuelle spørgsmål (se side 53).



Returvarer skal returneres i originalemballagen!

14. Tekniske data

Assistina Twin	MB-302
Netspænding:	100 – 240 V AC
Tilladt spændingsfluktuation:	± 10 %
Nominel strøm:	0,4 – 0,2 A
Frekvens:	50 – 60 Hz
Maks. effektforbrug:	18 VA
Luftforbrug:	ca. 40 l/min.
Driftstryk:	5 – 10 bar (regulering foregår med indbygget automatisk trykregulator)
Lydstyrke:	60 dB
Mål (BxDxH):	297 x 435 x 190 mm
Vægt:	3,8 kg
Påfyldningsmængde:	200 ml W&H Activefluid, MC-302 200 ml W&H Service Oil F1, MD-302

Tekniske data

Omgivelsesbetingelser

Temperatur under transport:	0 °C til +50 °C (+32 °F til +122 °F)
Temperatur under opbevaring:	+5 °C til +40 °C (+41 °F til +104 °F)
Luftfugtighed under opbevaring og transport:	8 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende
Temperatur under brug:	+10 °C til +40 °C (+50 °F til +104 °F)
Luftfugtighed under brug:	15 % til 80 % (relativ), ikke kondenserende
Forureningsgrad (pollution level):	2
Overspændingskategori (overvoltage category):	II
Indsatshøjde:	op til 3.000 m over havets overflade

15. Bortskaffelse



Sørg for, at delene ikke er kontaminerede, når de bortskaffes.



Vær opmærksom på dine lokale og nationale lovgivning, retningslinier, normer og bestemmelser for bortskaffelse.

- > Medicinsk udstyr
- > Gamle elektroapparater
- > Emballage

Garantibevis

Dette medicinske udstyr er fremstillet med stor omhu af højt kvalificerede fagfolk. En lang række forskellige tests og kontroller garanterer problemfri funktion. Du bedes være opmærksom på, at garantikravene kun gælder, når alle anvisninger i den vedlagte brugsanvisning bliver overholdt.

W&H påtager sig som producent ansvaret for materiale- eller produktionsfejl fra købsdatoen inden for en garantiperiode på 12 måneder.

Vi kan ikke påtage os noget ansvar for skader som følge af usagkyndig behandling eller i tilfælde af reparationer udført af tredjemand, der ikke er autoriseret af W&H.

Garantikrav skal rettes til leverandørerne eller en autoriseret W&H-servicepartner og købsnotaen skal vedlægges. I tilfælde af at der ydes garanti, vil dette hverken forlænge garantien eller en eventuel forældelsesfrist for mangelsbeføjelser.

12 måneders garanti

Autoriseret W&H-servicepartner

Besøg W&H på internettet på <http://wh.com>

Under menupunktet "Service" finder du nærmeste autoriserede W&H-servicepartner.

Eller scan QR-koden.



Producent

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, **Austria**

t + 43 6274 6236-0, **f** + 43 6274 6236-55
office@wh.com wh.com

Form-Nr. 50927 ADK
Rev. 003 / 21.04.2020
Ret til ændringer forbeholdes