

kreativ

HeraCeram® cre-active®

Arbeiten Sie kreativ – mit HeraCeram cre-active, die Lösung für die ästhetische Veredelung von Keramik-Restaurationen.

Produktinformation



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

HeraCeram® cre-active®

Die Lösung für die ästhetische Veredelung von Keramik-Restorationen.

In einer Welt, in der Perfektion und Effizienz Hand in Hand gehen müssen, bildet HeraCeram cre-active die nächste Stufe der ästhetischen Veredelung für Keramik-Restorationen. HeraCeram cre-active wurde von und für Zahntechniker entwickelt, die eine einfache, aber hocheffektive und ästhetische Lösung für die Individualisierung und Finalisierung von Keramik-Restorationen suchen. Mit HeraCeram cre-active bekommen Zahntechniker ein konzeptionell aufgebautes Produktportfolio an die Hand, mit dem sie ihr Talent vollständig entfalten können.

Arbeiten Sie kreativ – mit HeraCeram cre-active.



Micro-Layering-Restoration von Rüdiger Neugebauer, Zahntechniker, Portugal. Verblendet und finalisiert in der hybriden Technik mit HeraCeram cre-active 2D-Massen (Internal-Staining) und HeraCeram Zirkonia 750 (Minimal-Schichtung) in 3 Bränden.



Ahmadreza Maleki

Zahntechnikermeister & Anwendungstechniker bei Kulzer Deutschland

„Mit unserem HeraCeram cre-active Produktsortiment bieten wir Zahntechnikern eine moderne Lösung, die den Anforderungen des anspruchsvollen Laboralltags gerecht wird. Durch eine fortschrittliche Herstellungstechnologie verfügen alle 2D- und 3D-Massen über eine anwenderfreundliche Verarbeitungskonsistenz, sind einfach in der Handhabung und leicht Workflow-kompatibel. Lassen Sie sich von den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und ästhetischen Ergebnissen überzeugen!“



Die Vorteile auf einen Blick

- **Technisch perfekt:** Hohe Farbstabilität, optimierte Verarbeitungskonsistenz sowie vergleichbare Ergebnisse vor und nach dem Brand stellen eine komfortable und kontrollierbare Anwendung der Komponenten, z. B. in der Nass-in-Nass-Technik, sicher.
- **Optisch perfekt:** Natürliche Ästhetik durch kontrollierbare Reproduktion von lichtdynamischen Eigenschaften, wie Opaleszenz und Fluoreszenz, selbst in dünnen Schichtstärken.
- **Einfach perfekt:** Flexible und reproduzierbare Anwendungskonzepte für die Rot-Weiße-Ästhetik, von der standardisierten Bemalung bis zur hybriden Technik, wie dem Micro-Layering.
- **Nahtlose Integration:** Identische Massenbezeichnungen und vergleichbare Farbwirkungen über alle HeraCeram-Linien hinweg ermöglichen eine perfekte Integration der Finishing-Konzepte in die bewährte HeraCeram-Philosophie.

HeraCeram cre-active 2D- und 3D-Massen zur ästhetischen Veredelung





„What you see is what you get!“

Rüdiger Neugebauer
Zahntechniker, Portugal

„Alle 2D- und 3D-Massen des HeraCeram cre-active Produktportfolios sind sehr einfach in der Handhabung. Ich kann mit allen Materialien sehr detailgetreu individualisieren und selbst bei der Nass-in-Nass-Anwendung sehr feine Nuancen setzen, ohne dass sich die Massen unkontrolliert vermischen. Und besonders beeindruckend für mich: What you see is what you get! Die hohe Farb- und Formstabilität der Materialien ermöglicht es mir ein verlässliches und nahezu identisches Ergebnis vor wie auch nach dem Brand zu erzielen.“



Individualisierte Gingiva-Restoration von Rüdiger Neugebauer, Zahntechniker, Portugal. Erarbeitet mit den HeraCeram cre-active 2D- und 3D-Massen des Gingiva-Produktsortiments. In 3 Bränden veredelt.

Technisch perfekt

Die 2D- und 3D-Massen sind optimal für die ästhetische Veredelung von monolithischen Vollkeramik-Restaurationen auf Zirkoniumdioxid oder Lithiumdisilikat sowie zur Verarbeitung in Kombination mit allen HeraCeram-Keramiklinien geeignet.

Durch eine anwenderfreundliche Verarbeitungskonsistenz lassen sich die Massen nass-in-nass auftragen ohne dabei zu verlaufen oder sich zu vermischen. Die hohe Farb- und Formstabilität der pastösen Materialien garantiert vergleichbare Ergebnisse vor und nach dem Brand, und stellt somit insbesondere bei der Rekonstruktion von Gingiva eine effiziente Anwendung durch kontrollierbares Arbeiten und reproduzierbare Arbeitsabläufe sicher.



Zahn 11: ZrO-Gerüst vor der Veredlung. Zahn 21: vor dem Brand: Die anwenderfreundlichen Verarbeitungskonsistenzen ermöglichen einen einfachen Nass-in-Nass-Auftrag ohne die Bildung von Pfützen oder Wolken.




Zahn 21 nach dem Brand: Die hohe Farb- und Formstabilität der pastösen Materialien garantiert vergleichbare Ergebnisse vor und nach dem Brand.



Abdelhalim Fares
Zahntechnik Spezialist, Ägypten

„HeraCeram cre-active hat meine Herangehensweise an die ästhetische Veredelung völlig neu definiert. Die Möglichkeit, Tiefe und natürliche Transluzenz ohne eine komplexe Schichtung zu erreichen – und das selbst auf opaken Basismaterialien – ist ein echter Durchbruch. Die Handhabung der Massen ist außergewöhnlich und ermöglicht eine präzise Anwendung mit minimalem Aufwand. Diese Produktinnovation verbessert nicht nur die Ästhetik, sondern macht komplexe Arbeiten effizienter, planbar und reproduzierbar.“

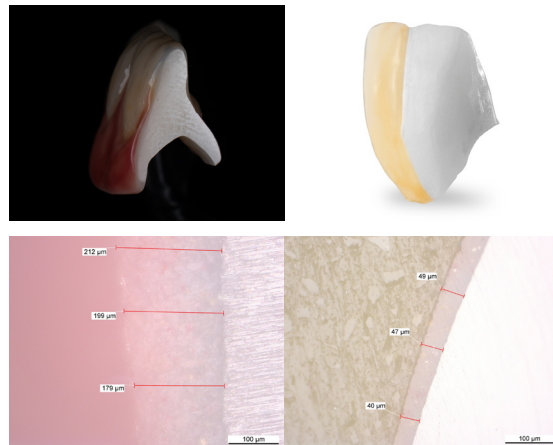

Mit den 2D- und 3D-Massen lassen sich intuitiv dynamische Ergebnisse in der Rot-Weiß-Ästhetik erzielen – dank der beeindruckenden Farbstabilität und -deckkraft bereits in extrem dünnen Schichtstärken. (2D Malfarben: ~ 40 µm, 3D Strukturpasten: ~ 212 µm, Quelle: Kulzer R&D).

Schauarbeiten von Ahmadreza Maleki und Thomas Backscheider.

Optisch perfekt

HeraCeram cre-active wurde in enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Zahntechnikern entwickelt. Diese Expertise spiegelt sich vor allem in der Ästhetik der Massen wider, die eine umfassende Individualisierung und Farbgestaltung von Gingiva sowie den zahnfarbenen Anteilen einer Keramik-Restaurationen ermöglichen.

Die integrierte Matrix-Philosophie sorgt für dynamische lichtoptische Eigenschaften, wie natürlich wirkende Fluoreszenz, Opaleszenz und Transluzenz, die den natürlichen Zahn perfekt imitieren. Dies macht HeraCeram cre-active zur optimalen Wahl für eine ästhetische Veredelung von Keramik-Restaurationen.



Die Matrix-Massen ermöglichen dynamische lichtoptische Eigenschaften selbst in extrem dünnen Schichten.




Vollkeramik-Restaurations im Durchlicht: Zirkoniumdioxid-Krone unbearbeitet (21) vs. ästhetisch veredelt mit HeraCeram cre-active 2D- und 3D-Massen (11).




Paul Fiechter
Zahntechnikermeister, Schweiz

„Die perfekte Ästhetik einer Restauration entsteht durch das richtige Zusammenspiel von Farbe, Licht und Struktur. Mit der Matrix-Philosophie lassen sich Helligkeit, Transparenz, Fluoreszenz und Opaleszenz gezielt steuern – genau wie in der natürlichen Zahnschubstanz. HeraCeram cre-active ermöglicht mir eine individuelle Charakterisierung, die das natürliche Erscheinungsbild optimal nachbildet und auch vollmonolithische Restauration auf ein neues ästhetisches Niveau hebt.“

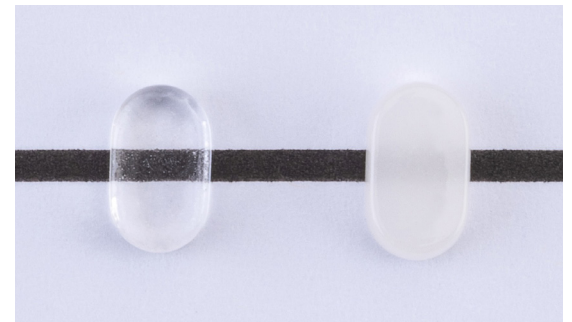

Das Produktsortiment von HeraCeram cre-active bietet eine Vielzahl an 2D- und 3D-Massen mit denen die Fluoreszenz aktiv gesteuert werden kann, wie beispielsweise die beiden Glasuren Glaze (links) und Glaze Fluo (rechts) unter UV-Licht zeigen.

Schauarbeiten von Ahmadreza Maleki und Thomas Backscheider.

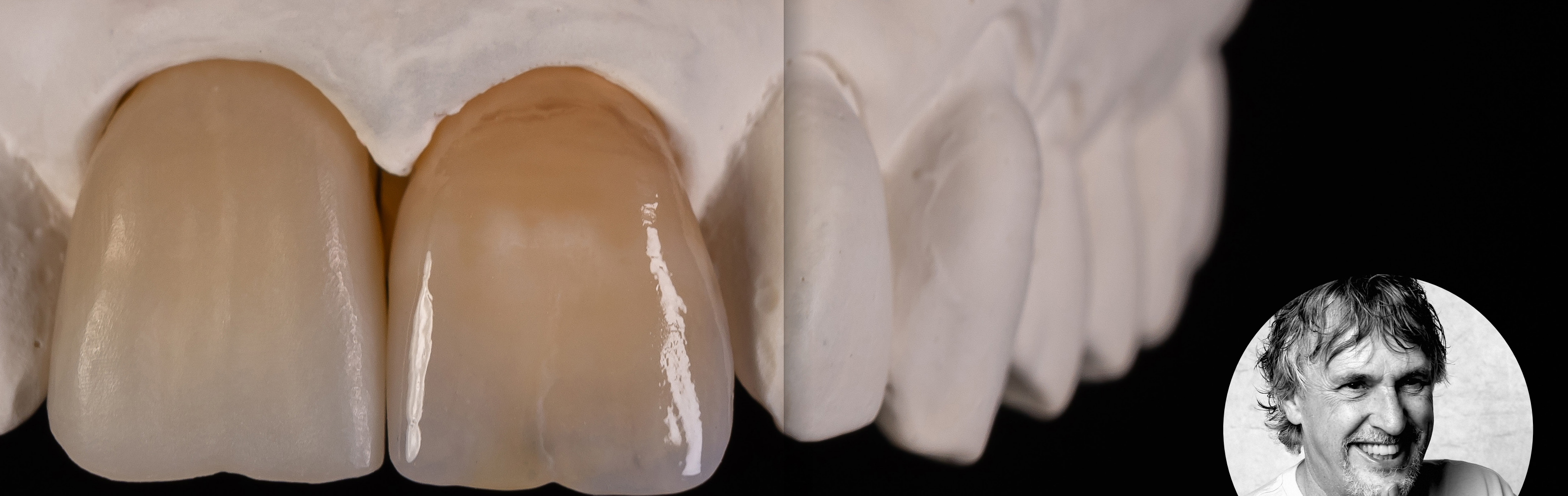

„Mit Leichtigkeit eine naturgetreue Ästhetik!“

Thomas Backscheider
Zahntechniker, Deutschland

„Es ist beeindruckend, welche lichteptischen Eigenschaften selbst in geringen Schichtstärken mit den 2D- und 3D-Massen von HeraCeram cre-active auf vollkeramischen Restaurationen erzielt werden können. Mit dieser brillanten Opaleszenz erreiche ich mit Leichtigkeit eine naturgetreue Ästhetik.“

Zahn 11: ZrO-Krone vor der Veredelung.
Zahn 21: Individuelle Veredelung nach dem Matrix-Konzept von Thomas Backscheider, Zahntechniker, Deutschland. Erarbeitet mit HeraCeram cre-active 2D- und 3D-Massen, in 2 Bränden realisiert.

Einfach perfekt

Mit HeraCeram cre-active erweitern wir unser Spektrum an Anwendungskonzepten um Optionen für die ästhetische Veredelung. Anwender der HeraCeram Verblendkeramiklinien finden sich direkt im Sortiment und der Philosophie von HeraCeram cre-active zurecht. Identische Massenbezeichnungen und vergleichbare Farbwirkungen über alle HeraCeram-Linien hinweg ermöglichen einen nahtlosen Wechsel zwischen den Anwendungsgebieten und sorgen für eine unkomplizierte Technikanpassung. Einfach. Effizient. Perfekt.

Ästhetisch flexibel

Von der standardisierten Bemalung mit 2D-Massen bis hin zu hybriden Techniken, z. B. dem Micro-Layering mit 2D- und 3D-Massen in Kombination mit HeraCeram Verblendkeramiken, wie der HeraCeram Zirkonia 750: Arbeiten Sie kreativ mit HeraCeram cre-active!



Julia Krebs

Zahntechnikermeisterin, Deutschland

„Mit HeraCeram cre-active erlebe ich ein hohes Maß an kreativer und gestalterischer Freiheit im Bereich Veneering! Die nahtlose Integration in die bestehenden Produktlinien der HeraCeram Verblendkeramiken ist die perfekte Ergänzung, um beeindruckend natürliche Ergebnisse zu erreichen. Dank der identischen Massenbezeichnungen und Farbwirkungen wird die Anwendung mit HeraCeram cre-active erleichtert und ebnet den Weg zum vollständigen ästhetischen Gesamtergebnis.“

Anwendungskonzepte der ästhetischen Veredelung



**Standard Staining /
standardisierte Bemalung**



**Finishing /
individuelle Finalisierung**



**Ästhetische Veredelung nach
der Matrix-Philosophie**



**Hybride Techniken,
wie z.B. Micro-Layering**



Gingiva-Konzept




Bleach-Konzept

HeraCeram cre-active Produktsortiment

HeraCeram cre-active: Opak (2D)



HeraCeram cre-active: Transluzent (2D/3D)

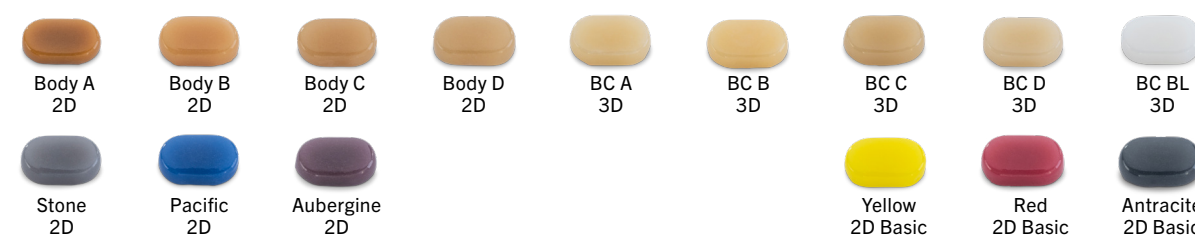

HeraCeram cre-active: Gingiva (2D/3D)



HeraCeram cre-active: Matrix (2D/3D)



Glaze



Produktsortiment

Glaze / Glaze Fluo Pulver und Pasten

2D Malfarben Basic

2D Malfarben Opak

2D Malfarben Transluzent

2D Mamelon-Dentine

2D Sekundär-Dentine

2D Value-Massen

2D Enhancer-Masse

2D Gingiva-Malfarben

3D Opal-Schneide-Massen

3D Opal-Transpa-Massen

3D Body-Correction-Massen

3D Gingiva-Massen

Artikel-Nr. Bezeichnung

Sets

66094145 HC cre-act. Basic-Set (2D/3D)


66094146 HC cre-act. Matrix-Set (2D/3D)

66094147 HC cre-act. 2D Stains/Glaze-Set (2D)

66094149 HC cre-act. Gingiva-Set (2D/3D)

Weitere Infos unter www.kulzer.de/hccreative
Und zur direkten Bestellung im Webshop:
<https://shop.kulzer.de>

Eine große Auswahl an Videoanleitungen für Anwendungskonzepte sowie Tipps und Tricks zu HeraCeram cre-active finden Sie unter: kulzer.de/hccreative-videos
Oder erleben Sie HeraCeram cre-active live in einem unserer Kurse: kulzer.de/kursprogramm

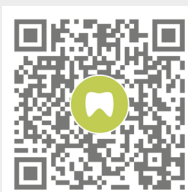

Bestell- und Service-Hotline (Deutschland):

Mo-Fr, 8-17 Uhr: 0800 4372 522 (gebührenfrei)

Rund um die Uhr einkaufen (Deutschland):

shop.kulzer.de

Technische Beratung (Deutschland):

Mo-Fr, 8-16 Uhr: 06181 413 9999

Kontakt in Österreich und der Schweiz:

Kulzer Austria GmbH
Andromeda Tower
Donau-City-Straße 6, Top 2.OG/1
A-1220 Wien
officeAT@kulzer-dental.com
www.kulzer.at

Kontakt in Deutschland:

Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2
63450 Hanau, Deutschland
info.lab@kulzer-dental.com
www.kulzer.de



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

