



ABFORMMATERIAL FÜR SITUATIONSABFORMUNGEN

HydroPrint Premium

Momente einfach festhalten

 **COLTENE**

HydroPrint Premium

Das Abformmaterial für Situationsabformungen



Bessere Präzision und Sichtbarkeit der Details auf der Oberfläche



Höhere Resistenz vor Druckverformungen



Pfefferminz Aroma und geringe Viskosität macht die Abformung für Patienten erträglicher



Staubfrei und einfach mischbar


HydroPrint Premium ist geeignet für Situationsabformungen. Situationsabformungen haben verschiedene Indikationen, dazu gehört die Herstellung von Studien-, Analyse-, Planungs-, Gegen- und Arbeitsmodellen. Wichtige Eigenschaften von Alginaten sind die Fließfähigkeit, Detailreproduktion, Dimensionsstabilität, elastische Eigenschaft und die Desinfektion.

Die elastischen Eigenschaften von HydroPrint Premium zeichnen sich vor allem durch die hohe Zugfestigkeit des Materials aus.


Klinische Arbeitszeiten (bei 23° C / 73° F)

Gesamte Abbindezeit 2:45 min

Gesamte Verarbeitungszeit 1:10 min

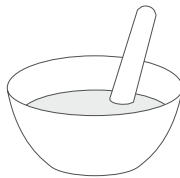

Mischzeit 45 sec

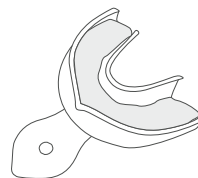

Verarbeitungszeit 25 sec



Mundverweildauer 1:35 min

Bestellinformation

60023007 HydroPrint Premium Regular Set
1x Beutel HydroPrint 454g

Zubehör

H00564 HYGENIC Flexibole Mittel
H00565 HYGENIC Flexibole Gross
H00566 HYGENIC Flexibole Extra Gross
H06012 HYGENIC Spatel



© COLTENE – www.coltene.com

Vigodent SA Indústria e Comércio
Rua Pesqueira 26 Bonsucesso
Rio de Janeiro CEP 21041-150 / Brazil
T + 5521 3865 5600
F + 5521 2280 8411
sac@vigodent.com.br

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau/Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

 **COLTENE**