

Produktinformation Hygopac Sealcheck

Hygopac Sealcheck REF 6022100027

Datum: _____
date

Gerätename: _____
device name/nom de l'appareil

Seriennummer: _____
serial number/numéro de série

Temp. und Geschw. [°C und m/min]:
temperature and speed [°C and m/min]
température et vitesse [°C et m/min]

Bewertung: _____
evaluation/évaluation

Die Siegelnaht muss ununterbrochen, vollständig und frei von Fehlern sein
The sealed seam has to be intact, uniform and free from defects
La joint de scellage doit être intact, complet et exempt de défauts

Freigabe: OK Nicht OK
for approval/ pour validation

Bemerkungen, Korrekturen, Service
remarks, adjustments, service

Unterschrift/Signature _____

DÜRR DENTAL SE
Tel.: 071 42/705-0, Fax: 071 42/705-500
info@duerrdental.com, www.duerrdental.com

6022100027 Hygopac Sealcheck 250 Stück

Produktbeschreibung

- Kontrollbogen zur Funktionsbeurteilung des Siegelprozesses und zur Überprüfung folgender Siegelqualitätseigenschaften:
 - o Intakte Siegelnaht über die gesamte Siegelnahtbreite
 - o Keine Kanalbildung oder offene Siegelnähte
 - o Keine Durchstiche oder Risse
 - o Keine Delaminierung oder Materialablösung
- Die blaue Farbe des Verbundbereiches schlägt unter dem versiegelten Bereich in ein dunkleres blau um
- Die werkseitigen Siegelungen des Hygopac Sealcheck dienen als Bezug für eine einwandfreie Siegelung
- Zur Dokumentation den Kontrollbogen ausfüllen, unterschreiben und ablegen
- Der Hygopac Sealcheck kann auch für die Durchführung des Peel- sowie des sog. „Tintentests“ genutzt werden
- Bei auftretenden Mängeln müssen Korrekturmaßnahmen durchgeführt und der Test wiederholt werden, bis ein annehmbares Ergebnis erreicht wird

Normen

- Nach ISO 11607-2

Informationen zur Siegeltemperatur

- Die Temperatur des Siegelgerätes auf 165 – 190°C einstellen

Technische Daten

- Der Hygopac Sealcheck besteht aus medizinischem Papier (70g/m²) und einer mehrlagigen Kunststoffverbundfolie aus PET/PP (12/40 micron)

Lagerung und Haltbarkeit

- Aufbewahrung im geschlossenen Originalkarton, trocken und staubfrei lagern
- Temperatur: + 15° C bis + 25° C
- Vor direkter Lichteinstrahlung und übermäßiger Luftfeuchtigkeit schützen
- Relative Luftfeuchtigkeit: 35% - 50% RH
- Das Herstellungsdatum sowie das Ablaufdatum sind auf dem Karton abzulesen
- Die Haltbarkeit ist abhängig von den Lagerbedingungen

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com