

Entspannte und effiziente Behandlungen

OptraGate® 2

Latexfreier
Lippen-Wangen-Halter

NEU mit
OptraGate®
Dry Control



Für mehr Komfort im Praxisalltag

OptraGate® 2 ist ein latexfreier Lippen-Wangen-Halter, der Sie in Ihrem Praxisalltag optimal unterstützt. OptraGate 2 ermöglicht einen grosszügigen Zugang zum Arbeitsfeld und unterstützt eine effektive und unkomplizierte relative Trockenlegung.

Durch den Einsatz dieses Lippen-Wangen-Halters können Sie als Behandler fokussierter arbeiten und die klinische Qualität und Effizienz Ihrer Behandlung steigern. Beobachten Sie, wie dank OptraGate 2 Patientinnen und Patienten ruhiger sind, seltener schlucken und weniger sprechen. Der dritte Ring sorgt für einen erhöhten Tragekomfort und ermöglicht ein entspanntes Offenhalten des Mundes auch bei längeren Behandlungen.

Ästhetik

Freie Sicht für ästhetische Restaurationen

In Kombination mit speichelreduzierenden Hilfsmitteln unterstützt OptraGate 2 das Arbeitsfeld sauber und trocken zu halten, was das Risiko von Kontaminationen reduziert. Dies kann die Haftung von Materialien verbessern^[1]. Zudem sorgt es für einen freien Zugang zum Behandlungsfeld, wodurch ästhetisches Modellieren erleichtert wird.

Qualität

Entspannte Behandlung für hochwertige Ergebnisse

Die Flexibilität und Beschaffenheit des Materials sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. OptraGate 2 unterstützt die Patientinnen und Patienten dabei, den Mund während der Behandlung offen zu halten. Dank des dritten Rings wird der Tragekomfort erhöht und Sie können fokussierter arbeiten.

Effizienz

Fokussiertes Arbeiten für effiziente Behandlungsabläufe

OptraGate 2 ermöglicht es dem Behandler, sich vollständig auf die Behandlung zu konzentrieren, da Lippen und Wangen nicht manuell zurückgehalten werden müssen. Weniger Unterbrechungen führen zu kürzeren Behandlungszeiten und einem angenehmeren Ablauf für alle Beteiligten.

Jede Sekunde

wird weltweit eine Behandlung mit OptraGate® durchgeführt*.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Relaxe Patientinnen und Patienten sowie effiziente Behandlungen
- ✓ Zugängliches und übersichtliches Behandlungsfeld
- ✓ Einfaches Einsetzen dank dreidimensionaler Flexibilität, weichem Material und drittem Ring
- ✓ Vielseitig anwendbar
- ✓ Latexfrei

[1] Daudt, Eduardo, Guilherme Carpena Lopes, and Luiz Clovis Cardoso Vieira. «Does operator field isolation influence the performance of direct adhesive restorations?» Journal of Adhesive Dentistry 151 (2013).


* Laut Ivoclar-Verkaufszahlen, gilt für OptraGate.

Verbesserter Komfort dank des dritten Rings

Die Integration eines zusätzlichen dritten Rings bei OptraGate 2 bewirkt eine Entlastung der Druckspannung am Kieferknochen (siehe blaue Pfeile).

Dadurch wird der Tragekomfort erhöht, Ihre Patientinnen und Patienten sind allgemein entspannter und es fällt ihnen leichter, den Mund während der Behandlung offen zu halten.

Ausserdem sorgt der dritte Ring für ein gefühlt erleichtertes Einsetzen in den Patientenmund.

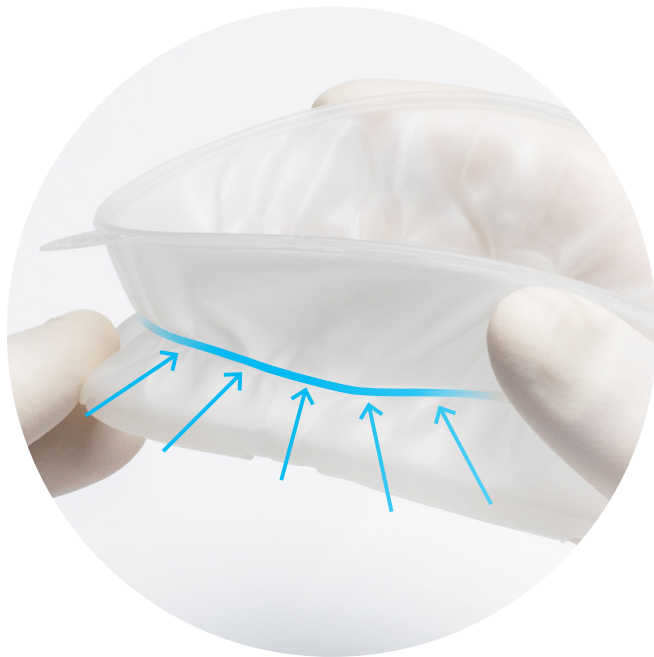

Tipp zur richtigen Grössenwahl:

Zur Bestimmung der richtigen Grösse orientieren Sie sich bitte an der aufgedruckten Orientierungsskala auf der Verpackung. Ermitteln Sie den Mundwinkelabstand, indem Sie dem Lippenverlauf folgen und die Orientierungsskala auf dem Folienbeutel verwenden. Wählen Sie anhand der Markierungen die korrekte Grösse aus.

 **Jetzt Video-Tutorial ansehen!**
Alles Wissenswerte zu Grössenwahl, Einsetzen und Okklusionskontrolle.

Flexibles Material – flexibel einsetzbar

Angenehmer Tragekomfort, gute Verträglichkeit und ein breites Einsatzspektrum – OptraGate 2 überzeugt in unterschiedlichen klinischen Situationen durch **relative Trockenlegung**:

- ✓ Direkte Füllungstherapie
- ✓ Digitale Zahnheilkunde
- ✓ Kieferorthopädie
- ✓ Prothetik
- ✓ Diagnostik
- ✓ Prävention
- ✓ Bleaching
- ✓ Kinderzahnheilkunde

Lieferformen:

OptraGate 2

757915WW	OptraGate 2 Assortment
757912WW	OptraGate 2 Regular Refill / 80
757914WW	OptraGate 2 Small Refill / 80

OptraGate – das Original

577275WW	OptraGate Assortment
590850WW	OptraGate Regular Refill / 80
590851WW	OptraGate Small Refill / 80
591451WW	OptraGate Junior Refill / 80
669088WW	OptraGate Assortment Small, pink/blau
669089WW	OptraGate Assortment Junior, pink/blau



Effiziente Trockenlegung, die mehr kann.

OptraGate® Dry Control ist ein innovativer Speichelsauger mit integriertem Zungenhalter. Insbesondere in Kombination mit OptraGate 2 sorgt er für eine effektive relative Trockenlegung und reduziert unerwünschte Unterbrechungen auf ein Minimum - für spürbar mehr Effizienz während der Behandlung.



«OptraGate® Dry Control schützt die Zunge und bietet eine zuverlässige Absaugleistung. Dank des selbsthaltenden Designs sitzt er sicher und stabil, sodass ich nicht ständig nachjustieren muss und dadurch entspannter und konzentrierter arbeiten kann.»


Dr. Dan Lazar, Rumänien

Ihre Vorteile im Überblick

NEU

Effektive Feuchtigkeitskontrolle
für ein konstant trockenes Arbeitsfeld

270-Grad-Absaugung
Mehrere Öffnungen rund um das Saug-element ermöglichen eine grossflächige Feuchtigkeitskontrolle

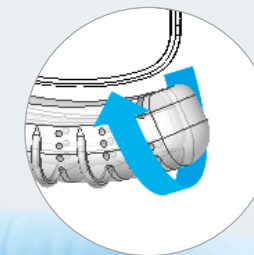

Freier Zugang zum Behandlungsfeld und **zusätzlicher Schutz** der Zunge dank des praktischen Zungenhalters

Hands-free Workflow ermöglicht autonome Behandlungen dank des selbsthaltenden Designs für einen sicheren Sitz am Unterkiefer

Einfache Anwendung: Sofort einsatzbereit und mit allen gängigen Behandlungseinheiten kompatibel

Tipp

OptraGate Dry Control lässt sich bei Bedarf individuell an verschiedene Mundgrössen anpassen:

- ✓ Kürzbares Saugelement
- ✓ Adaptierbarer Zungenhalter
- ✓ Flexibel biegbare Schlauch

Ein starkes Team für die relative Trockenlegung

OptraGate® Dry Control and OptraGate® 2 sind optimal aufeinander abgestimmt und sorgen in Kombination für eine besonders effiziente relative Trockenlegung.

Das Weichgewebe wird effektiv abgehalten und das Arbeitsfeld zuverlässig vor Kontamination mit Feuchtigkeit geschützt.

Das Ergebnis:

- ✓ Effiziente Behandlungsabläufe
- ✓ Klarer Fokus auf das Arbeitsfeld
- ✓ Hoher Patientenkomfort

Gemeinsam
effizienter

So gelingt die Trockenlegung mühelos:



Sehen Sie sich jetzt
das Video-Tutorial an!



Lieferformen:

OptraGate Dry Control

768788	OptraGate Dry Control / 60
768787	OptraGate Dry Control / 30
768789	OptraGate Dry Test Pack / 2

OptraDam Plus – zur absoluten Trockenlegung

OptraDam Plus ist ein drei-
dimensionaler Kofferdam mit
flexiblen Kunststoffringen und
anatomischer Formgebung:
für eine absolute Trockenlegung
des Operationsfeldes mit einer
innovativen, dreidimensionalen
Isolationstechnik.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Erleichtertes Einsetzen dank
flexibler Kunststoffringe und
ohne Metallrahmen
- ✓ Höherer Patientenkomfort,
da auf einen Metallrahmen
verzichtet werden kann
- ✓ Reduzierte Verbreitung von
Aerosolen in der Praxis ^[2]

[2] P. Samaranayake, J. Reid, N. Evans, The efficacy of rubber dam isolation in reducing
atmospheric bacterial contamination, ASDC Dent. Child., 1989, 56, 442–444.

Kennen Sie schon unsere klinischen Accessoires?



OptraGloss®
Hochglanzpolitur von Composites
in nur einem Schritt
www.ivoclar.com/optragloss

OptraSculpt®
Effizientes Modellieren dank Antihafteffekt
www.ivoclar.com/optrasculpt



Mehr zu den
klinischen
Ivoclar-Produkten:
ivoclar.com/direct-restoratives

Direkte Füllungstherapie für effiziente Ästhetik

Mit unseren aufeinander abgestimmten Produkten für die direkte Füllungstherapie können Sie hochqualitative, ästhetische Restaurationen effizient herstellen.



Isolieren

Entspannte und effiziente Behandlungen mit OptraGate 2



Bonden

Universelle Haftung mit Adhese 2 im effizienten VivaPen



Restaurieren

Zählen Sie auf Tetric plus – das neue Simplified Universal Composite



Aushärten

Leistungsstarke Performance mit Bluephase PowerCure



Polieren

Glänzende Oberflächen mit OptraGloss



Schützen

Wirksame Prävention mit Fluor Protector S