

VOCO Perfect **Protect**®

DESENSIBILISIERUNGSGEL ZUR ANWENDUNG
BEI DER ZAHNAUFHELLUNG

Erweiterung der Perfect Bleach-Familie

Viele Menschen wünschen sich helle Zähne ohne Verfärbungen, die z.B. durch Kaffee- oder Tabakkonsum entstehen können. VOCO bietet zur Zahnaufhellung schon seit Jahren die bewährten und qualitativ sehr hochwertigen Produkte der Perfect Bleach-Familie an. Insbesondere das Home-Bleaching erfreut sich großer Beliebtheit, da es sich optimal in den Alltag der Anwender integrieren lässt. Was aber, wenn es zu Hause zu bleachingbedingten Überempfindlichkeiten kommt?

Die perfekte Ergänzung zum Home-Bleaching!

VOCO Perfect Protect ist ein Desensibilisierungsgel für die Heimanwendung, das speziell auf die Bedingungen des Home-Bleachings abgestimmt ist. Es enthält 3 % Kaliumnitrat (\triangleq 11.600 ppm Kalium) und 0,11 % Fluorid (\triangleq 1.130 ppm Fluorid) und trägt so zuverlässig zur Desensibilisierung empfindlicher Zähne bei. Während das Kaliumnitrat eine Schmerzlinderung der überempfindlichen Zähne begünstigt, unterstützt das Fluorid den Verschluss offener Dentintubuli und geht somit die Ursache der Überempfindlichkeit an.

Die Anwendung des transparenten und geschmacksneutralen Materials ist denkbar einfach und intuitiv: Es wird mit der gleichen Schiene wie beim Home-Bleaching für 15 bis 60 Minuten getragen und kann sowohl vor als auch nach der Zahnaufhellung verwendet werden.

Universell einsetzbar

VOCO Perfect Protect ist mit allen auf dem Markt erhältlichen Materialien für das Home-Bleaching kombinierbar. Sie müssen also kein Perfect Bleach-Kunde sein, um die Vorteile von VOCO Perfect Protect genießen zu können.

Gewohnt stark im Effekt

VOCO Perfect Protect unterstreicht erneut die gewohnt starke Performance der VOCO-Produkte. Messungen von Dr. Dimitrios Dionysopoulos vom Department of Operative Dentistry der Aristotle University of Thessaloniki (Griechenland) ergaben, dass VOCO Perfect Protect Testsieger beim Verschluss offener Dentintubuli im Bereich der für Patientennutzung indizierten Desensibilisierungsmittel ist. Dies bedeutet, dass VOCO Perfect Protect mit etwa 80 % verschlossenen Dentintubuli (nach der Anwendung) am effektivsten gegen bleachingbedingte Überempfindlichkeiten wirkt (s. Grafik rechts).

Anwendung



Zähne reinigen und Material in die Schiene füllen



Schiene einsetzen und Überschuss entfernen



15–60 Minuten Schiene tragen



Schiene und Zähne reinigen

Indikation

Versiegelung von freiliegendem Dentin


Vorteile

- Zuverlässige Desensibilisierung
- Kurze und variable Tragedauer der Schiene
- Geschmacksneutral
- Angenehme Konsistenz
- Einfaches Befüllen der Schiene

Handelsformen

REF 1019 Spritze 2 x 2 ml

Menge verschlossener Dentintubuli

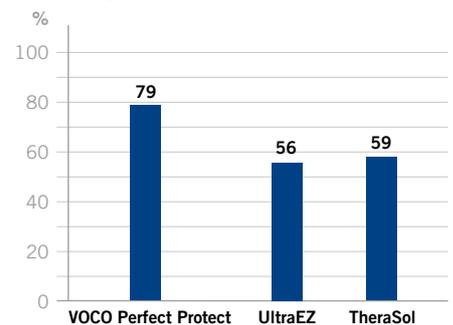

Quelle: Dr. Dimitrios Dionysopoulos, Department of Operative Dentistry, Aristotle University of Thessaloniki / Griechenland

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
www.voco.dental

VOCO-Kundenservice
FreeCall: 00 800 44 444 555
Fax: +49 (0) 4721 719 2931
service@voco.de

