

EU konform:
 $\leq 6 \% \text{H}_2\text{O}_2$

Perfect Bleach®

Perfect Bleach®

SYSTEM ZUR AUFHELLUNG VERFÄRBTER ZÄHNE

VOCO
DIE DENTALISTEN

Perfect Bleach®

NATURAL WHITE

Das ästhetische Erscheinungsbild der Zähne gewinnt für immer mehr Menschen an Bedeutung. Verfärbungen der Zähne beeinträchtigen nicht nur das Aussehen, sondern haben Einfluss auf das gesamte Erscheinungsbild und wecken beim Patienten den Wunsch nach einer geeigneten Behandlung zur Zahnaufhellung. Das Aufhellen der Zähne mit Bleaching-Gel bietet eine ebenso effektive wie schonende Möglichkeit, die Zahnästhetik wiederherzustellen.

Je nach Präferenz können Sie zwischen Perfect Bleach in der Variante mit 10 oder 16 % Carbamidperoxid (entspricht 3,5 % bzw. 6 % H_2O_2) wählen. Mit der Entscheidung für Perfect Bleach wählen Sie ein System, das der gewohnten VOCO-Qualität entspricht und damit sowohl Ihren als auch den Ästhetikansprüchen Ihrer Patienten gerecht wird.

Verfärbungen

Grundsätzlich lassen sich innere und äußere Zahnverfärbungen unterscheiden. Ist die Ursache der Verfärbung bekannt, können Sie Ihren Patienten eine geeignete Behandlungsmethode vorstellen.

Ursachen äußerer Verfärbungen können Farbstoffe in Lebensmitteln und Getränken wie z. B. Curry, Kaffee, Rotwein und Tee, Tabakkonsum, Farbeinlagerungen in Schmelzrisen sowie Altersverfärbungen sein. Innere Verfärbungen entstehen oft während der Zahnentwicklung. Ursachen können Nebenwirkungen von Medikamenten wie z. B. Tetracyclin sowie Verfärbungen durch eine Pulpennekrose sein. Da solche Verfärbungen in Schmelz und Dentin angesiedelt sind, können diese mechanisch, z.B. durch eine professionelle Zahnreinigung, nicht entfernt werden.

In diesen Fällen eignet sich eine Aufhellungsbehandlung.

Perfect Bleach® 10 % / 16 % – in praktischen Sets

Perfect Bleach ist ein auf Carbamidperoxid basierendes Aufhellungsmaterial. Je nach Umfang der Verfärbung kann zwischen 10 %iger und 16 %iger Konzentration gewählt werden (entspricht 3,5 % bzw. 6 % H_2O_2). Nach Erstbehandlung in der Praxis kann der Patient Perfect Bleach im Anschluss zu Hause weiter anwenden.

Perfect Bleach wird u.a. in zwei verschiedenen Sets angeboten. Das Mini Set beinhaltet neben den Carbamidperoxid-Spritzen eine Aufbewahrungsbox für die Zahnschienen sowie eine praktische Kosmetiktasche. Das Set umfasst dagegen die Carbamidperoxid-Spritzen, eine Farbskala zum Überprüfen des Behandlungserfolges sowie die Aufbewahrungsbox für die Zahnschienen. Zusätzlich zu den Patientenutensilien

finden Sie alle Materialien, die für die Herstellung der Schienen benötigt werden. Dazu gehören zwei Tiefziehfolien, das Block Out Gel LC sowie die Gebrauchsinformation sowohl für den Zahntechniker als auch für den Behandler.

Perfect Bleach® – Schonend und effektiv zugleich

Studien belegen, dass hochdosierte Aufhellungsgele nicht zu einer signifikant besseren Aufhellwirkung führen [A. Braun et al, Dent Mater 2007; 23: 165 - 169]. Bereits mit niedrig konzentrierten Gelen lassen sich deutliche Aufhellungserfolge erzielen, bei gleichzeitig schonender Behandlung der Zahnhartsubstanz. Perfect Bleach verfügt über eine ausreichend hohe Carbamidperoxid-Konzentration, um dabei effektiv und gleichzeitig schonend für den Patienten gegen Verfärbungen vorzugehen. Das in Perfect Bleach enthaltene Fluorid und Kalium sorgen dafür, dass während und nach der Behandlung Hypersensibilitäten vorgebeugt wird.

Vorteile für Ihre Patienten

Die Handhabung von Perfect Bleach ist sehr einfach und anwenderfreundlich. Die Konsistenz des Gels verhindert Gingivairritationen, da es nicht aus der Schiene läuft. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine kurze Tragezeit genügt. Das Gel entfaltet seine volle Wirkung innerhalb der ersten zwei Stunden nach dem Einsetzen der Schiene. Der erste Behandlungserfolg stellt sich bereits ab der zweiten Anwendung ein. Auch das frische Minzaroma des Gels ist angenehm für den Patienten.

Perfect Bleach®


KLINISCHE ANWENDUNG



ZÄ Doreen Knebel, Berlin: „Wir verwenden Perfect Bleach von VOCO seit gut sieben Jahren in unserer Praxis und sind sehr zufrieden. Die Patienten sind begeistert von der guten Aufhellwirkung und freuen sich über das einfache Handling. Auch für uns in der Praxis ist die Applikation leicht zu erklären. Wir bestellen die Patienten immer nach zwei Wochen erneut ein, um einen Farbvergleich anzustellen. Aufgrund der Verwendung einer laborgefertigten Schiene treten so gut wie nie Probleme mit der Gingiva auf. Außerdem bleibt die gesamte Bleachingtherapie unter zahnärztlicher Beobachtung.“



Quelle: PD Dr. Felix Krause, Universität Bonn

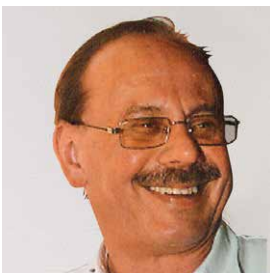

Dr. med. dent. Franz Bschorer, Dinkelsbühl: „Mit Perfect Bleach machen wir bereits seit fünf Jahren sehr gute Erfahrungen. Perfect Bleach überzeugt schon in seiner 10 %igen Konzentration mit einem deutlichen Aufhellungserfolg. Dabei ist es besonders schonend zur Zahnhartsubstanz. Und dank der individuell angefertigten Bleichschiene wird auch die Gingiva geschützt. Komplikationen und Hypersensibilitäten sind mit Perfect Bleach 10 % noch nie aufgetreten. Die Handhabung des Sets ist sowohl für das Praxispersonal als auch für die Patienten denkbar einfach. Die im Set enthaltenen Tiefziehfolien zur Erstellung der Zahnschiene lassen sich leicht bearbeiten, perfekt anpassen und einfach mit dem Bleichgel versehen. So sind die Schienen von den Patienten auch zu Hause bequem zu tragen.“

Perfect Bleach®

SYSTEM ZUR AUFHELLUNG VERFÄRBTER ZÄHNE

Indikationen

Schonende und dauerhafte Aufhellung vitaler und devitaler Zähne z. B. bei Verfärbungen durch Medikamente, Fluorose, ernährungsbedingten Ablagerungen, Traumata, altersbedingten Zahnverfärbungen, u. ä.



Vorteile

- Zwei Konzentrationen 10 % und 16 % Carbamidperoxid (entspricht 3,5 % bzw. 6 % H₂O₂)
- Einfache und anwenderfreundliche Handhabung
- Alle Materialien im Komplettset enthalten:
 - Zwei Tiefziehfolien und Block Out Gel LC zur Herstellung der individuellen Zahnschienen
 - 6 x 2,4 ml Bleaching Gel
 - Aufbewahrungsdose für die Zahnschienen
 - Farbskala zum Nachvollziehen des Behandlungserfolgs
 - Patientenfreundliches Piktogramm und Gebrauchsinformation
- Angenehmes Minzaroma

Handelsformen 10 %

- REF 1658 Mini Set 10 % – Bleaching Gel Spritze
4 x 2,4 ml mit 10 % Carbamidperoxid,
Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche
- REF 1662 Bleaching Gel Spritze 3 x 2,4 ml
10 % Carbamidperoxid

Handelsformen 16 %

- REF 1659 Mini Set 16 % – Bleaching Gel Spritze
4 x 2,4 ml mit 16 % Carbamidperoxid,
Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche
- REF 1664 Set 16 % – Bleaching Gel Spritze 6 x 2,4 ml
mit 16 % Carbamidperoxid, Block Out Gel LC
Spritze 1,2 ml, Tiefziehschienen für 2 Trays,
Aufbewahrungsbox, Kosmetiktasche, Farbskala
- REF 1665 Bleaching Gel Spritze 3 x 2,4 ml
16 % Carbamidperoxid

EU-Richtlinie zur Anwendung von Bleichprodukten (2011 / 84 / EU)

Durch die EU-Verordnung wird sichergestellt, dass Bleichgele mit einem Gehalt an Wasserstoffperoxid von 0,1 % bis zu 6 % ausschließlich an Zahnärzte abgegeben werden dürfen. In jedem Anwendungszyklus muss die erste Anwendung durch den Zahnarzt oder unter dessen direkter Aufsicht erfolgen. Im Anschluss dürfen diese Produkte dem Patienten für die häusliche Weiterbehandlung mitgegeben werden. Auch dürfen diese Präparate nicht bei Patienten unter 18 Jahren angewendet werden.

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Deutschland

Tel.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-109

info@voco.de
www.voco.de

Zu beziehen durch: