

Perfect Bleach®

ANWENDUNG




Perfect Bleach®

VORHER-NACHHER-BILDER



Perfect Bleach® Office+

SCHNELL IN NUR EINER SITZUNG IN DER PRAXIS

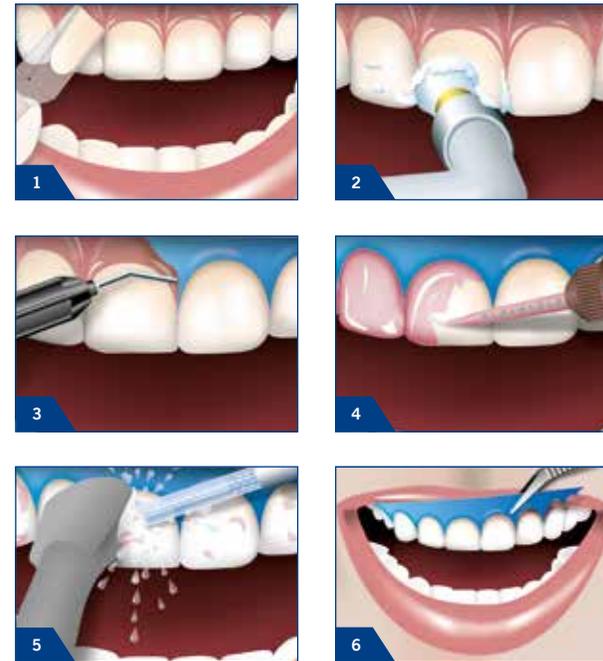

Perfect Bleach® Office+

VORHER-NACHHER-BILDER



VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven · www.voco.dental
VOCO-Kundenservice
 Freecall: 00 800 44 444 555
 Fax: +49 (0) 4721-719-2931
 service@voco.de



Perfect Bleach®

PATIENTENINFORMATION



Welche Verfärbungen gibt es?

Bei Zahnverfärbungen kann grundsätzlich zwischen äußeren und inneren Verfärbungen unterschieden werden.

Äußere Verfärbungen befinden sich oberflächlich auf dem Zahn und werden durch Farbstoffe in Lebensmitteln (z. B. Curry, Rote Beete) und Getränken (z. B. Kaffee, Tee und Rotwein), sowie durch das Rauchen verursacht.

Innere Verfärbungen haben ihren Ursprung oft während des Wachstums der bleibenden Zähne. Man hat kaum Möglichkeiten diese zu vermeiden. Ursache innerer Verfärbungen kann unter anderem die Einnahme von Medikamenten wie z. B. Tetracyclin sein. Weitere Ursachen innerer Verfärbungen sind eingelagerte Blut-Farbstoffe, die in Folge eines Nervtodes, z. B. durch einen Unfall (Trauma), im Zahn sichtbar werden. Auch genetisch bedingte Verfärbungen der Zähne zählen zu inneren Verfärbungen.

Wie können Verfärbungen behandelt werden?

Ihr Zahnarzt wird vor der Zahnaufhellung die Ursache der Verfärbung feststellen und Ihnen eine geeignete Behandlungsmethode vorstellen, um die Verfärbung zu entfernen.

Oberflächlich angesiedelte Verfärbungen werden häufig schon im Rahmen der professionellen Zahnreinigung, die vor jeder Bleachingbehandlung durchgeführt werden muss, entfernt.

Bei inneren Verfärbungen können die Zähne mit Hilfe der professionellen Zahnreinigung nicht aufgehellt werden. Diese im Zahn angesiedelten Verfärbungen lassen sich jedoch erfolgreich im Rahmen der Bleaching-Behandlung entfernen. Um ein strahlend weißes Lächeln zu erzielen haben Sie zwei Möglichkeiten:

Perfect Bleach®

Einfache Anwendung zu Hause nach zahnärztlicher Anleitung und Erstanwendung in der Praxis

Perfect Bleach® Office+

Schnell in nur einer Sitzung in der Praxis

Schonend und effektiv

Eine Methode, Zähne – auch wurzelbehandelte Zähne – aufzuhellen, ist das Home Bleaching. Mit Perfect Bleach von VOCO bietet Ihnen Ihr Zahnarzt die Möglichkeit, Ihre Zähne einfach zu Hause in kürzester Zeit aufzuhellen. Die erste Anwendung erfolgt hierbei in der Praxis durch den Zahnarzt oder unter dessen direkter Aufsicht.

Nach einer professionellen Zahnreinigung nimmt der Zahnarzt zunächst einen Abdruck und stellt daraus für Sie eine individuelle Schiene her. Diese wird mit Perfect Bleach befüllt. Das Gel entfaltet seine maximale Wirkung innerhalb der ersten zwei Stunden. Diese Anwendungsmethode kann sowohl täglich als auch in unregelmäßigen Abständen wiederholt werden. Erste Erfolge zeigen sich bereits ab der zweiten Anwendung.

Schnell in nur einer Sitzung in der Praxis

Im Rahmen der Zahnaufhellung in der Praxis wird vor der eigentlichen Aufhellung eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt. Nach der Bestimmung der Zahnfarbe wird das Bleichgel direkt auf die Zähne aufgetragen. Die gewünschte Aufhellung erhalten Sie nach nur einmaliger Behandlung mit Perfect Bleach Office+.

Ist Bleaching schädlich für die Zähne?

Unter Aufsicht eines Zahnarztes ist sowohl die Home- als auch die Office-Bleaching-Behandlung absolut unschädlich für die Zähne.



Perfect Bleach® – Natural white

Neben der Individualprophylaxe, die eine Grundvoraussetzung gesunder Zähne ist, nimmt für viele Menschen die Bedeutung der Zahnästhetik immer mehr zu. Schöne, strahlend weiße Zähne sorgen für ein sympathisches Lächeln und ein gesundes, gepflegtes Erscheinungsbild. Sie vermitteln Selbstbewusstsein und symbolisieren Jugend, Vitalität und Erfolg.

Dunkle, fleckige Zähne wirken nicht nur unästhetisch, sondern werden meistens auch mit schlechter Mundhygiene verbunden. Neben der regelmäßigen professionellen Zahnreinigung sorgt hier das Aufhellen der Zähne mit Bleachinggel für Abhilfe.