

# STRATA-G™


Teilmatrixsystem

NEU!



**Garrison**  
Dental Solutions

## Warum sollten Sie ein Teilmatrixsystem verwenden?

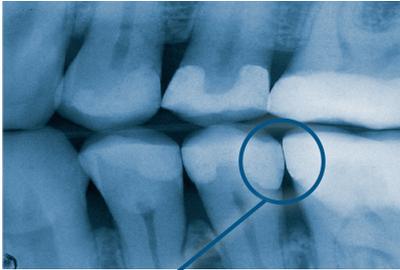

### Strata-G™ Teilmatrixsystem


- + Eine optimale Separierung der Zähne für einen festen Kontakt
- + Bänder mit ausgeprägter Krümmung orientieren sich an der Anatomie des Zahns
- + Anatomisch korrekte Kontakte auf der richtigen Höhe
- + Benutzerfreundliches System
- + Keine Nachbearbeitung notwendig
- + 26 Jahre Erfahrung im Bereich der Teilmatrixsysteme vereint im Strata-G™ Teilmatrixsystem

NEU!

# STRATA-G™

Teilmatrizensystem

Jetzt noch schneller und zuverlässiger!

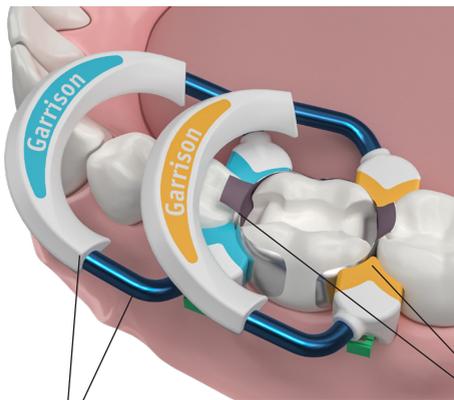

## Zuverlässig, dichte Kontakte

Ringe aus einem gezogenen Nickel-Titan Draht sind stark, elastisch und leichter zu öffnen. Die Rückenverstärkung aus ultrastrapazierfähigem PEEK erhöht den Zahnseparationsdruck und die Langlebigkeit.

## Noch schnellere Klasse II Restaurationen

Kombinieren Sie die Strata-G™ Ringe, Bänder und Keile für eine 270° Abdichtung und eine ultimative Überschussreduzierung.

Die Ringe springen dank der Retentionsspitzen nicht vom Zahn und der grüne Ring für weite Kavitäten vereinfacht schwierige breite Präparationen.

## Leichtere und vorhersagbarere Konturen

Die in den Matrizenbändern UND Ringen integrierte Randleistenunterstützung sorgt für den letzten Schliff!

Strata-G™ mit 270° Abdichtung & Überschussreduzierung

# STRATA-G™

## Teilmatrixsystem

Ideal für Zahnärzte, die eine komplette Ausstattung erhalten möchten.

### SG-KSH-11



SG-KSH-11

Alle Strata-G™ Sets verfügen über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.\*\*

Art.-Nr.	Inhalt
<b>SG-KSH-11</b>	1x Strata-G™ Ring kurz blau,
<b>Professional Set</b>	1x Strata-G™ Ring lang orange, 1x Strata-G™ Ring breit grün, 50x Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihafbeschichtung, 5 Größen (je 10x SG050, SG100, SG175, SG200, SG300), 50x Strata-G™ Firm Matrizenbänder, 5 Größen (je 10x FXH100, FXH150, FXH175, FXH200, FXH300), 80x Strata-G™ Keile, 4 Größen (je 20x SGYL, SGBL, SGOR, SGGR), 1x Ringseparierzange FXP01, 1x Matrizenbandhalter BFA-1, 1x 5-in-1 Multifunktions-Instrument TN009, 10x VariStrip™, 5x Margin Elevation Matrizenbänder

3

\*\*Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift

# STRATA-G™

## Teilmatrixsystem



SG-KS-00

NEU!

Genug Bänder/Keile im Set enthalten,  
um die 60 tägige Geld-zurück-Garantie  
optimal zu nutzen.

SG-KS-00

Alle Strata-G™ Sets verfügen über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.\*\*

Art.-Nr.	Inhalt
<b>SG-KS-00</b> <b>Starter Set</b>	1x Strata-G™ Ring kurz blau, 1x Strata-G™ Ring lang orange, 1x Strata-G™ Ring breit grün, 100x Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihafbeschichtung, 5 Größen (je 20x SG050, SG100, SG175, SG200, SG300), 80x Strata-G™ Keile, 4 Größen (je 20x SGYL, SGBL, SGOR, SGGR), 1x Ringseparierzange FXP01

# STRATA-G™

Teilmatrixsystem

NEU!

Ideal für begeisterte Anwender  
der vorherigen Produkte von  
Garrison Dental Solutions.

SG-KS-40



SG-KS-40

Alle Strata-G™ Sets verfügen über eine 60 tägige Geld-zurück-Garantie.\*\*

Art.-Nr.	Inhalt
<b>SG-KS-40</b>	1x Strata-G™ Ring kurz blau,
<b>Standard Set</b>	1x Strata-G™ Ring lang orange,
	1x Strata-G™ Ring breit grün,
	50x Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihaftbeschichtung,
	5 Größen (je 10x SG050, SG100, SG175, SG200, SG300),
	40x Strata-G™ Keile, 4 Größen (je 10x SGYL, SGBL, SGOR, SGGR),
	1x Ringseparierzange FXP01

5

\*\*Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift



### Entscheiden Sie sich für ein Strata-G™ Teilmatrixsystem-Set und ...

... erhalten Sie Ihr Strata-G™ Set inklusive der 60 tägigen Geld-Zurück-Garantie.

In dieser Zeit können Sie alle Bestandteile des Sets testen. Bei Nichtgefallen senden Sie das Set einfach über Ihr Depot an uns zurück und Sie erhalten eine Komplettgutschrift.

... profitieren Sie von mehr als 26 Jahren weltweit führender Innovationen im Bereich der Teilmatrixsysteme.

### Ringe jetzt beidseitig platzierbar!

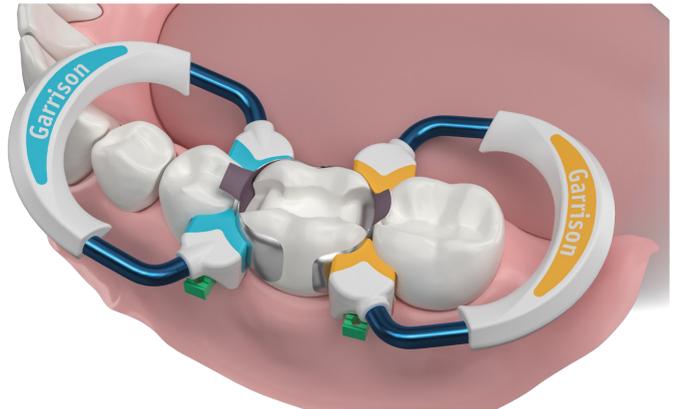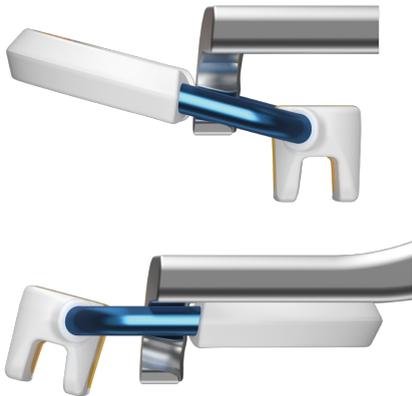

# STRATA-G™

## Teilmatrizen-Ringe



### Der grüne Strata-G™ Ring für weite Kavitäten

- Hält selbst bei fehlenden Höckern.
- Besonders gut für ausgedehnte, große Kavitäten.
- Die breiten Silikonfüßchen verhindern das Eindrücken der Matrize in die Kavität.

Art.Nr. SG600 (2 Stück / Pack)



### Der orange Strata-G™ Ring - Ringmetall jetzt aus Nitinol

- Gezogener Nickel-Titan Draht - gleichzeitig stark und elastisch.
- Ultra-Grip™ Retentionsspitzen verhindern ein Abrutschen aller Strata-G™ Ringe.
- Hält auch an großen Molaren.

Art.Nr. SG500 (2 Stück / Pack)



### Der blaue Strata-G™ Ring ist jetzt noch leichter zu öffnen

- Optimale Anpassung an die Randleiste durch verbessertes StrataBond™-Silikon.
- Besonders geeignet bei kurzen/schiefstehenden Zähnen und in der Kinderzahnheilkunde.
- Hält auch über einer Kofferdammklammer oder am Eckzahn distal.

Art.Nr. SG400 (2 Stück / Pack)



Art.-Nr.	Inhalt
SG600	Strata-G™ Ring breit grün 2 Stück/Pack
SG500	Strata-G™ Ring lang orange 2 Stück/Pack
SG400	Strata-G™ Ring kurz blau 2 Stück/Pack
SGR01	Strata-G™ Ring Set (1x grün, 1x orange, 1x blau)
FXP01	Ringseparierzange aus geschmiedetem Edelstahl

NEU!

# STRATA-G™

## Teilmatrixen-Ringe

### Langlebigeres Design

Fortschrittliche Materialien ergeben zusammen mit dem Design unseren bislang langlebigsten und zuverlässigsten Separiering.



### Starke Separationskraft - dennoch einfacher zu öffnen

Gezogener Nitinol-Draht, für den Nickel und Titan auf molekularer Ebene verbunden werden, bietet erstklassige Leistung, erfordert jedoch weniger Kraftaufwand zum Öffnen. Die von Garrison eigenentwickelte StrataSet™-Behandlung des Nickel-Titan Drahts maximiert die Langlebigkeit dieses fortschrittlichen Materials. Die Ringe sind leichter zu öffnen und halten ihre Spannung länger.

### Mehr Einsätze


Dank der ultra-haltbaren PEEK-Verstärkung auf der Rückseite des Rings kann Strata-G™ einen höheren Prozentsatz an Anfangsfestigkeit über einen längeren Zeitraum beibehalten, als nicht-verstärkte Ringe. Die eigenentwickelten StrataBond™-Silikon/PEEK-Spitzen halten Hunderten von Anwendungen stand.

### Verbesserte Anatomie - unschlagbarer Halt

Verbesserte Randleistengestaltungen führen und stützen die Matrizenbänder.


StrataBond™ Silikon für unübertroffene Überschussvermeidung.

Ultra-Grip™ Retentionsspitzen bieten einen festen Halt und sind sanfter zur Papille.

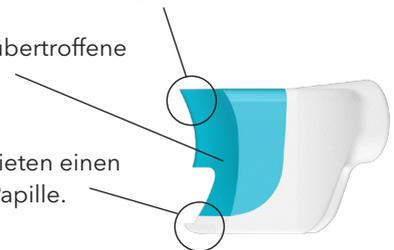

# STRATA-G™

## Teilmatrizen-Bänder

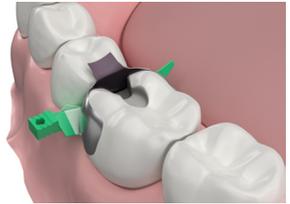

	Prämolar	klein-zervikal	Prämolar und kleine Molare	Molar	Molar groß-zervikal
Strata-G™ Matrizenbänder mit Antihftbeschichtung					
0,038 mm dünn					
Höhe	3,5 mm	4,5 mm	5,5 mm	6,5 mm	7,5 mm
Artikel.nr.	<b>SG050</b>	<b>SG100</b>	<b>SG175</b>	<b>SG200</b>	<b>SG300</b>
Inhalt	100/Pck.	100/Pck.	100/Pck.	100/Pck.	100/Pck.

Einfaches Entnehmen der Matrizenbänder dank der Antihftbeschichtung, welche eine Anhaftung am Kompositum um eindrucksvolle 92 % verringert.


Alle Bändergrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 400 Bändern (je 80x SG050, SG100, SG175, SG200, SG300) für

### SGB01

Alle Bändergrößen auch als Nachfüllpack in einem Set mit 200 Bändern (je 40x SG050, SG100, SG175, SG200, SG300) für

### SGB02

Verbesserte Randleistengestaltung durch stärkere Vorkonturierung am okklusalen Bandrand.

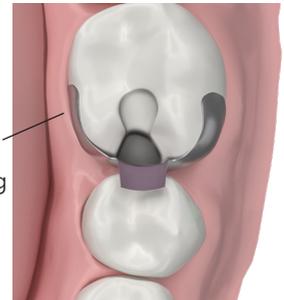

**NEU!**

# STRATA-G™

## Teilmatrizen-Bänder

### Komplette Anatomie

Fünf Bandgrößen in superdünnem rostfreien Stahl (bleitot) gewährleisten, dass Sie in jedem Fall das beste Matrizenband zur Restauration haben.



### Optimierte Randleistengestaltung

Die stärker konturierte okklusale Seite der Strata-G™-Bänder dient zur Formung und Führung der Randleistengestaltung von Klasse II Restaurationen, ohne dabei die Sicht oder den Zugang zu blockieren.



### ProfileBooster™ subgingivale Lasche

Ein natürliches Erscheinungsbild in schwierigen zervikalen Bereichen ist mit Strata-G™ Bändern einfach zu erreichen - es ist bereits integriert!



- Mit einer farbigen Antihafbeschichtung
- Dreidimensional vorkonturiert, ultradünn und bleitot
- Einfache Platzierung durch Greiflasche
- Neue Größe für Kinderzahnheilkunde

# STRATA-G™

## Teilmatrizen-Keile

Ultrafein,  
gelb ●

Klein,  
blau ●

Mittel,  
orange ●

Groß,  
grün ●



Strata-G™ Keile



Artikel.nr.  
Inhalt

**SGYL**  
100/Pck.

**SGBL**  
100/Pck.

**SGOR**  
100/Pck.

**SGGR**  
100/Pck.


Alle Keilgrößen auch als Nachfüllpack  
in einem Set mit 400 Keilen  
(je 100x SGYL, SGBL, SGOR, SGGR) für

### SGK4

Alle Keilgrößen auch als Nachfüllpack  
in einem Set mit 200 Keilen  
(je 50x SGYL, SGBL, SGOR, SGGR) für

### SGK4-M

Das glatte Hohlraum-Design  
und die abgerundeten  
Kanten gleiten mit weniger  
Trauma über die Papille.

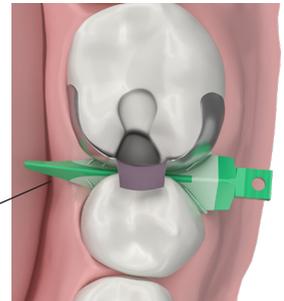

NEU!

# STRATA-G™


## Teilmatrizen-Keile

### Flexibilität für eine bessere zervikale Abdichtung

Strata-G™-Keile nutzen Soft-Face™ Materialien und fortschrittliches Design, um eine bessere Anpassung zu gewährleisten.


### Kein Herausrutschen

Weiche, retentive Lamellen klappen beim Einsetzen der Keile sanft nach unten und federn zurück, sobald sie den Interproximalraum verlassen haben und fixieren die Strata-G™ Keile an ihrem Platz.

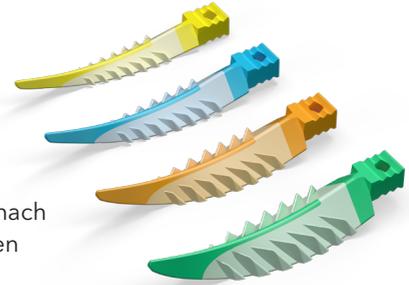

### Bessere Abdichtung durch Design

Die umgekehrte V-Form sitzt tiefer und die Abdichtungen sind interproximal tiefer, während die flexiblen Seitenwände und die Soft-Face™ TPE-Ummantelung den Strata-G™-Keilen ermöglichen, sich leicht an Konkavitäten und Unregelmäßigkeiten anzupassen.

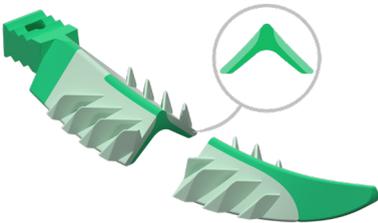

### Stapeln Sie die Keile aufeinander

Das glatte Hohlraum-Design ermöglicht das Stapeln von Strata-G™ Keilen. Diese Funktion ist äußerst hilfreich bei Zahnfleischrückgang oder wenn eine gleichzeitige Verkeilung von bukkal und lingual gewünscht ist.



## Anwendung bei Klasse II Restaurationen mit den Strata-G™ Soft Face™ Ringen

1. **Kofferdam platzieren.** Einschlüsse von Blut und Speichel werden verhindert.
2. **Präparieren Sie mit der klassischen Klasse II Methode.**
3. **Strata-G™ Matrizenband platzieren.** Wählen Sie das Matrizenband aus, das der Höhe des Zahnes entspricht und formen Sie es mit den Fingern vor, damit es sich bukkolingual um den Zahn legt. Die Grab-Tab Lasche sollte in Richtung des okklusalen Rands ausgerichtet sein. (Bild 1)
4. **Strata-G™ Keil einsetzen.** Für die zervikale Abdichtung benutzen Sie einen Keil von Garrison. Fixieren Sie das Band mit den Fingern, damit es beim Einsetzen des Keils nicht verrutscht. (Bild 2)
5. **Strata-G™ Soft Face™ Ring platzieren.** Wählen Sie den Ring, der für die Kavitäten- und Zahngröße des zu restaurierenden Zahns geeignet ist. Öffnen Sie den Ring mit der Ringseparierzange und platzieren Sie ihn über dem Keil. (Bild 3)
6. **Adaptieren Sie das Band.** Drücken Sie das Band in der gewünschten Kontakthöhe gegen den angrenzenden Zahn.
7. **Benutzen Sie Ihr bevorzugtes Adhäsivsystem und Komposit** nach der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers.
8. **Entfernen Sie den Ring, den Keil und das Band.**
9. **Konturieren Sie die Restauration,** überprüfen Sie die Okklusion und führen Sie eine Hochglanzpolitur durch.



Bild 1



Bild 2



Bild 3

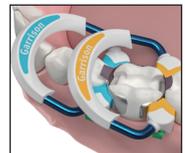


Bild 4

## Stapeln von Ringen und MOD-Restaurationen

Die Strata-G™ Soft-Face-Ringe mit orangefarbenen und blauen Spitzen sind angewinkelt, um das Stapeln von Ringen für die Durchführung von MODs und Mehrzahnrestaurationen zu ermöglichen. (Bild 4)

Alternativ ermöglicht die Premium Ringseparierzange (FXP01) von Garrison eine umgekehrte oder „Schmetterlings“-Platzierung des distalen Rings.



# Kontaktformular

Per Fax: +49 (0) 2451 971-410

Telefonisch: +49 (0) 2451 971-409

Österreich Tel. 0800 00 64 90

E-Mail: info@garrisondental.net

Online Katalog <http://catalogue.garrisondental.net/stratag>

**Bestellung:** (wird von Ihrem Dental Depot geliefert)

**NEU! Bestellen Sie jetzt über unseren Online**

**Bestellkatalog, einfach - sicher - schnell**

<https://catalogue.garrisondental.net/stratag/>

**Einfach den QR-Code scannen!**



Anzahl	Artikelnr.	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
	<b>SG-KSH-11</b> - Strata-G™ Professional Set		
	<b>SG-KS-00</b> - Strata-G™ Starter Set		
	<b>SG-KS-40</b> - Strata-G™ Standard Set		

Praxis \_\_\_\_\_

Dental Depot \_\_\_\_\_

Straße, Hausnr. \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift

PLZ \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

# Garrison

Dental Solutions

Garrison Dental Solutions  
Carlstrasse 50  
D-52531 Übach-Palenberg  
Tel. +49 (0)2451 971-409  
Österreich Tel. 0800 00 64 90  
Fax +49 (0)2451 971-410  
E-Mail: [info@garrisondental.net](mailto:info@garrisondental.net)  
Web: [www.garrisondental.com](http://www.garrisondental.com)



<https://catalogue.garrisondental.net/stratag/>

