



Traypurol®

BEWÄHRTES REINIGUNGSKONZENTRAT

Traypurol®

BEWÄHRTES REINIGUNGSKONZENTRAT

Was ist Traypurol®?

Traypurol ist der ideale Helfer für die tägliche Reinigung von Instrumenten und Abformlöffeln in Ihrer Praxis! Traypurol löst zuverlässig Reste von Alginaten, Glasionomer-, Carboxylat-, Phosphat- und Zinkoxid-Eugenol-Zementen und ist für alle nicht oxidierenden Metalle und Kunststoffe geeignet. Außerdem ist es biologisch abbaubar und sehr materialschonend.

Wie wird Traypurol® angewendet?

Die Anwendung ist denkbar einfach: Traypurol wird mit Wasser angesetzt und reinigt Löffel und Instrumente zuverlässig, indem diese in die Lösung gelegt werden. Die Materialreste werden durch die Traypurol-Lösung angelöst und lassen sich danach mühelos unter fließendem Wasser oder mit einer Bürste entfernen. Zudem ist Traypurol auch im Ultraschallgerät einsetzbar.

In welchen Handelsformen ist Traypurol® erhältlich?

Traypurol ist in einer bewährten 1 Liter Flasche sowie im ökonomischen 5 Liter Kanister für den erhöhten Bedarf erhältlich.

Ihre Vorteile

- Schnellere Wirkung
- Verbesserte Lösungseigenschaften
- Angenehm dezenter Geruch

Handelsformen

- REF 2289 Flasche 1 l
 REF 2290 Kanister 5 l
 REF 2304 Dosierpumpe – Kanister 5 l



VOCO GmbH
 Anton-Flettner-Straße 1-3
 27472 Cuxhaven
 www.voco.dental

VOCO-Kundenservice

Freecall: 00 800 44 444 555
 Fax: +49 (0) 4721-719-2931
 service@voco.de

Zu beziehen durch: