

VivaDent® Aerosol Reduction Gel


Zur Reduktion von Sprühnebel
und Aerosolen, für Ultraschallscaling

Unsere innovative
Weltneuheit mit
grosser Wirkung

Bis zu

99%

weniger Aerosole*

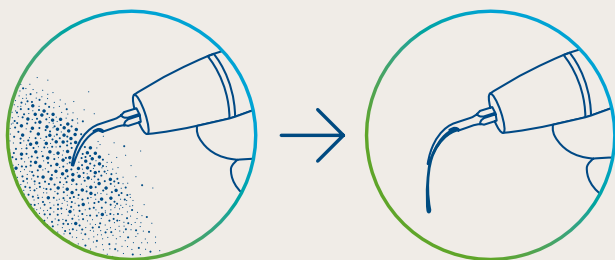

Ultraschallscaler **ohne**
Aerosol Reduction Gel

Ultraschallscaler **mit**
Aerosol Reduction Gel

Weniger Aerosole. Mehr Komfort.
Für Sie und Ihre Patientinnen
und Patienten.



Bessere Sicht

Durch die Verminderung der von Ultraschall-
scalern produzierten Aerosole verbessert sich
die Sicht auf den Behandlungsbereich.



Für

10 min

nach dem Anmischen stehen lassen.
Für ein noch besseres Ergebnis über Nacht.



Mehr Schutz

Die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten und
Kreuzkontaminationen, die durch die Luft
übertragen werden, wird durch die Reduk-
tion des Sprühnebels effektiv verringert.



Mehr Zufriedenheit

Der Wohlfühlfaktor während der Behand-
lung steigt, weil das Gesicht durch die Re-
duktion des Sprühnebels trockener bleibt.

*Das Gel reduziert die von Ultraschallscalern produzierten Aerosole um bis zu 99 Prozent.
Die Reduktion der Aerosole ist von der Amplitude der Scalerspitze abhängig. Beachten Sie bei der Verwendung
von Ultraschallscalern die lokalen und nationalen Hygienerichtlinien, sowie die Angaben des Herstellers.
Das Gerät muss nach Anwendung des Aerosol Reduction Gels mit Trinkwasser durchgespült werden.
Nur für Ultraschallscaler mit externem Kühlmittelbehälter geeignet. Nicht für Pulver-Wasser-Strahlgeräte geeignet.