

Produktinformation

WR 2000 Sprühreiniger



WR 2000 auf einen Blick

- Spezialreiniger zur Entfernung von Verkrustungen und Belägen auf Rollenpaketen und Transportracks.
- Entfernt auch hartnäckige Beläge.

Eigenschaften

WR 2000 ist ein spezieller Sprühreiniger für die Rollenpakete und Transportracks in Röntgenfilm-Entwicklungsautomaten von Dürr Dental wie z.B. XR 24 Pro, XR 24 Nova, XR 24-II, XR 24 sowie Periomat und Periomat Plus. Mit WR 2000 lassen sich auch hartnäckige Beläge auf Entwickler-, Fixierer- und Wässerungsrollenpaketen entfernen.

Produktzusammensetzung

WR 2000 basiert auf einer Kombination von speziellen Tensiden, alkalischen Reinigungskomponenten und Komplexbildnern in wässriger Lösung.

Anwendung

WR 2000 ist gebrauchsfertig. Zu reinigende Transportwalzen bzw. Racks vorsichtig aus der Maschine nehmen und unter fließendem Wasser abspülen. WR 2000 bis zur völligen Benetzung aufsprühen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Angelöste Beläge ggf. mit Schwamm entfernen. Bei hartnäckigen Belägen Schwamm besprühen und wischen. Gereinigte Rollenpakete gründlich mit Wasser abspülen.

Umweltverhalten

Die Verpackung ist aus Polyethylen und Polypropylen und somit stofflich und thermisch verwertbar. Für Recycling Flasche mit Wasser ausspülen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Physikalische Daten

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Dichte: $D = 1,00 \pm 0,15 \text{ g/ml (20 °C)}$

pH-Wert: $12,5 \pm 0,5$

Haltbarkeit

4 Jahre

Produktinformation

WR 2000 Sprühreiniger

Packungsgröße

Karton mit:

1 l-Flasche

1 Sprühkopf mit Adapter

4 Schwämme

Lagerung

Präparat zwischen 5 °C und 25 °C lagern.

Allgemeine Hinweise

Beim Herausnehmen der Rollenpakete darf es zu keiner Badvermischung kommen, d. h. die Fixierlösung darf nicht in die Entwicklerlösung gelangen. Die Reinigung der Transportracks (Rollenpakete) mit WR 2000 ersetzt nicht die jährlich notwendige Reinigung zur Entfernung von Silberniederschlägen und Oxidationsprodukten im Entwickler- und Wässerungstank mit dem Universalreiniger der Röntgenfilm-Entwicklungsmaschinen XR 24 Pro, XR Nova, XR 24-II, XR 24 oder der Transportracks des Periomat, Periomat Plus.

Gefahrenhinweise

WR 2000 Sprühreiniger ist nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

Vertrieb

Dürr Dental SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Hersteller

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de