

# Y-Adapter

Aerosol Reduktion & 11 auf 16 mm Adapter



Erhältlich in  $\varnothing$  11 mm und  $\varnothing$  16 mm

# Anwendungsoptionen

## 1 Aerosol Reduktion



Erhältlich in  $\varnothing$  11 mm oder  $\varnothing$  16 mm

Der Y-Adapter wurde speziell für Anwender entwickelt, die alleine ohne Assistenz arbeiten und daher eine freihändige Absauglösung benötigen. Der Zweck des Y-Adapters ist die Reduktion von Aerosolen bei zahnärztlichen Behandlungen, insbesondere mit hochtourigen Instrumenten, wenn die Verwendung einer intraoralen Spraynebelabsaugung nicht möglich ist (nur Arbeiten mit einem Speichelzieher). Der Y-Adapter ist in zwei Versionen erhältlich ( $\varnothing$  11 mm oder  $\varnothing$  16 mm).

Die mitgelieferte Aerosolkanüle und ein flexibler Speichelzieher werden mit dem Y-Adapter an einen Saugschlauch angeschlossen. Der Speichelzieher wird in der Mundhöhle positioniert. Die seitlich am Mund hängende Aerosolkanüle reduziert Aerosole.

## 2 11 auf 16 mm Adapter



Durch das Verschließen der Öffnung für den Speichelzieher mit dem beiliegenden Stopfen entsteht ein Adapter zum Anschluss aller 16 mm-Kanülen von Dürr Dental an 11 mm-Saughandstücke.

Der Y-Adapter kann entsprechend der Aufbereitungsinformation wieder aufbereitet werden.

### Versionen and Zubehör

- Y-Adapter Set inkl. Prophylaxekanüle und Stopfen,  $\varnothing$  11 mm (Bestellnummer 7600010040)
- Y-Adapter Set inkl. Prophylaxekanüle,  $\varnothing$  16 mm (Bestellnummer 7600010060)
- Y-Adapter,  $\varnothing$  11 mm, 5 Stück ohne Prophylaxekanüle und Stopfen (Bestellnummer 7600010041)
- Y-Adapter,  $\varnothing$  16 mm, 5 Stück ohne Prophylaxekanüle (Bestellnummer 7600010065)
- Aerosol Kanüle,  $\varnothing$  16 mm, 4 Stück (Bestellnummer 0700-058-50)
- Stopfen für Y-Adapter,  $\varnothing$  11 mm (Bestellnummer 7600010042)

DÜRR DENTAL SE  
Höfigheimer Str. 17  
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
www.duerrdental.com  
info@duerrdental.com

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM