

Das Einwegsystem – ein richtiger Zeitsparer!

Vorteile

- vorgefüllt mit einer Rolle Vliestücher
- Einwegsystem
- keine Wiederaufbereitung erforderlich
- in 15 Minuten einsatzbereit

PET-Vliestücher

- 100% PET
- saugfähig, fusselfrei
- geben den Desinfektionswirkstoff kontinuierlich an die Fläche ab

Vorbereitung

- Nach Zugabe des Desinfektionsmittels 15 Minuten tränken



Eigenschaften

- hochstabil
- Desinfektionsmittelstandsanzeige
- wieder verschließbar

Anwendungsbereiche

- Medizinprodukte und Oberflächen aller Art

Einweg-Wischtuchspender für B. Braun Desinfektionsmittel


In Kombination mit den unten aufgeführten Produkten können die Tücher bis zu 42 Tage angewendet werden.

Produkt	Wirksamkeiten									
	bakterizid	levurozid	begrenzt viruzid	begrenzt viruzid PLUS	Noro-viren	Rota-viren	Adeno-viren	viruzid	tuber-kulozid	mykobak-terizid
Hexaquant® pure	■	■	■		■					
Hexaquant® XL	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Meliseptol® pure	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Meliseptol® Foam pure	■	■	■	■	■	■			■	■
Meliseptol® acute	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Meliseptol® rapid	■	■	■	■	■	■	■		■	
Ethanol 70% denat.	■	■								

Anwendungsbereiche

Mit dem B. Braun Wipes Basic Bag Einwegtuchspendersystem können Vliestücher mit medizinischen Flächendesinfektionsmitteln getränkt, hygienisch gelagert und verwendet werden. Diese Tücher können zur Reinigung und Desinfektion von medizinischen Geräten und Flächen eingesetzt werden.

Einweg-Tuchspender zum Befüllen mit Desinfektionsmitteln

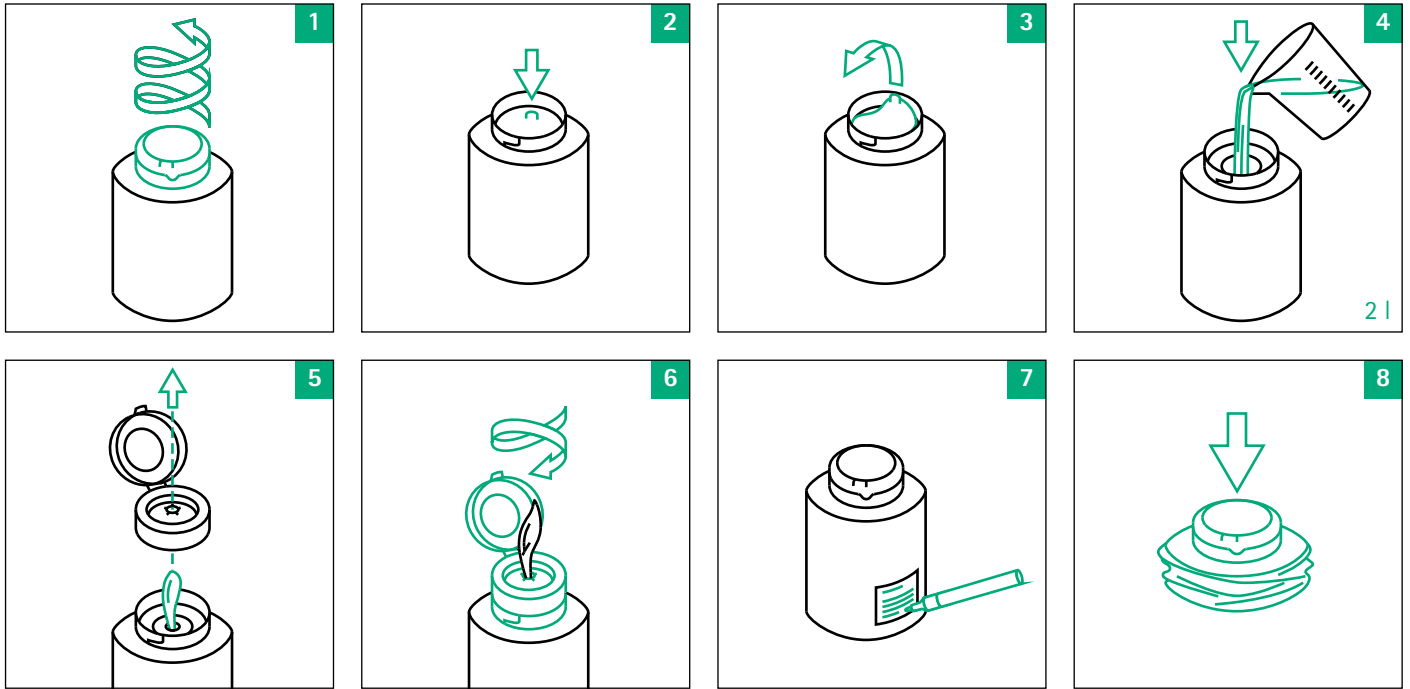

Gebrauchsanweisung

Der B. Braun Wipes Basic Bag wird mit einer trockenen Rolle Vliestücher geliefert. Bereiten Sie 2 Liter Anwendungslösung für das Desinfektionsmittel Ihrer Wahl vor (überprüfen Sie die Herstellerangaben zur Anwendungskonzentration und Einwirkzeit).

- 1 Schutzkappe des Vliestuchspenders öffnen
- 2 – 3 Entfernen der Schutzfolie
- 4 Vorbereitete Anwendungslösung einfüllen
- 5 Erstes Tuch aus der Mitte der Tuchrolle durch die Öffnung des Spenderdeckels führen
- 6 Tuch herausziehen und entsorgen
- 7 Alle Dokumentationsfelder auf dem Etikett ausfüllen

Nach 15 Minuten Tränkzeit ist das System einsatzbereit.

- 8 Nach der Verwendung des letzten Tuches kann der B. Braun Basic Bag komprimiert und entsorgt werden

Artikel	Tuchgrösse	VE*	Art. Nr.	PZN
B. Braun Wipes Basic Bag	17,5 x 36 cm	4 Packungen	180357	19192870

*Verkaufseinheit