

Instrucciones de uso Waxer tipo Easy



1. General:

- 1.1. Artículo:
- | | | | |
|--------------------|----------|------|----------|
| (A) easy Waxer duo | 415-0000 | 115V | 415-0115 |
| (B) easy Waxer | 413-0000 | 115V | 413-0115 |

1.2. Forma de suministro:

(A) easy Waxer duo

- 2 piezas de mano con cable de conexión
- 2 puntas para modelar PKT 1 & 2
- 2 pinzas para la pieza de mano

(B) easy Waxer

- 1 pieza de mano con cable
- 1 punta para modelar PKT 2
- 1 pinza para la pieza de mano

1.3. Dirección del fabricante:

YETI Dentalprodukte - Industriestraße 3 - D-78234 Engen
Tel.: +49-7733-9410-0 FAX: +49-7733-9410-22
www.yeti-dental.com para más instrucciones de uso y declaraciones de conformidad

1.4. Anotaciones de la marca depositada: DGBM

1.5. Datos técnicos:

voltaje:	230V +/- 10%	/ 115V
frecuencia:	AC 50Hz	/ AC 50/60Hz
conexión:	enchufe Schuko/ alemán	/ US Schuko
potencia absorbida:	9-12 W	/ 9-12 W
fusible:	T 400 mA	/ T 400 mA
protección de seguridad:	isolación protectora	/ isolación protectora

1.6. Condiciones para la colocación o depósito:

- poner horizontal
- depósito seco a temperatura de ambiente
- proteger ante contacto con ácidos y lejías

2. Instrucciones de uso:

Nuestras espátulas eléctricas Waxer deben de ser utilizadas solamente para el trabajo con cera de modelar para odontotécnica. No admitido para el uso en la boca del paciente. En el caso de utilización contra estas normas no asumimos ninguna garantía o responsabilidad por eventuales daños.

3. Riesgos y peligros durante el uso:

1. Tome las precauciones necesarias para asegurarse que personas indebidas (por ejemplo niños) no tengan contacto con el aparato que debe de ser utilizado solamente por odontotécnicos o personal instruido autorizado. Antes de poner en uso leer atentamente las instrucciones de uso. En caso de preguntas o dudas póngase en contacto con el fabricante.
2. Usar el aparato solamente en lugares de trabajo secos; limpiar solo en seco y no meter jamás en recipientes con agua.
3. Peligro de quemarse al tocar las puntas de modelar o la barra calentadora.
4. No tapar ni embalar el aparato cuando está caliente.
5. Cualquier manipulación de los aparatos, de las piezas de mano o de las puntas se efectúan exclusivamente bajo la responsabilidad del operador.
6. Intervenciones llevan a la pérdida de garantía y no asumimos ninguna responsabilidad.
7. Para la limpieza del aparato no utilizar disolventes.
8. En caso de envío (por ejemplo para reparación) asegurar embalaje de modo perfecto para evitar daños de transporte.

4. Instrucciones de uso:


Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	04.08.2010/TB	03.06.2019/CJ	1	03.06.2019/TB	Seite 1 von 3

Instrucciones de uso Waxer tipo Easy

4.1. Advertencia antes de poner en función:

Nuestras espátulas eléctricas Waxer han sido producidas según los últimos conocimientos técnicos y corresponden perfectamente a las normas de seguridad, no obstante pueden surgir peligros en caso de uso no debido a las normas.

- El aparato solamente puede ser usado en perfecto estado, observando de modo preciso las instrucciones de uso.
- Prestar atención a las reglas de seguridad en el puesto de trabajo
- El aparato debe de ser usado solo por personas cualificadas
- El aparato debe de ser examinado atentamente (sobre todo el cable de la corriente y la caja) y utilizado solamente en estado técnicamente perfecto.
- Colocar la(s) punta(s) necesaria(s) para los próximos procedimientos sobre la barra calentadora en la pieza de mano.
- Pegar la pinza art. 410-1002 en el aparato o en la mesa y posicionar la pieza de mano en la pinza siempre después del uso.

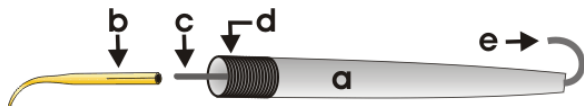

- a – pieza de mano b – punta para modelar c – barra calentadora
d – anillos de goma antiresbalo e – cable de pieza de mano

4.2. Puesta en funcionamiento:

1. Meter el enchufe (solamente a los enchufes de corriente permitidos, vea punto 1.5.)
2. Encender el aparato – el botón para encender la espátula se encuentra en la parte trasera del aparato.



(A)



(B)

3. Los aparatos de la serie Easy Waxer (A+B) están listos para el funcionamiento después de un corto tiempo de calentamiento. La regulación de la temperatura se efectúa a través de un regulador rotativo. En (A) la temperatura de las dos piezas de mano puede ser regulada independientemente. El Easy Waxer duo dispone de 3 LED que permiten una análisis de defectos rápida. Un simple cambio del componente posibilita el refuncionamiento del aparato en pocos minutos. Mientras tanto los LED están encendidos el aparato está completamente en función.
Si el LED rojo en el medio no brilla (Easy Waxer : LED rojo a la derecha arriba), se trata de un fallo del transformador.
Si el LED amarillo no brilla, se trata de un fallo del control de la pieza de mano izquierda o derecha.
Si todos los 3 LED están encendidos y las puntas de modelación no calentan tampoco, se trata de un fallo de la pieza de mano, que tiene que ser cambiado en este caso.
4. Coger la cera con la punta caliente y colocar la gota de cera en la corona de cera.
5. Para cambiar las puntas utilizar herramientas adecuadas – peligro de quemaduras!
6. Si no se utiliza el aparato por un periodo largo se aconseja de apagarlo y de insertar siempre la pieza de mano en la pinza – peligro de quemaduras!
La pinza puede ser colocada o en la mesa o en el aparato después de haber relevado la lámina de protección.
7. Cuando deje el puesto de trabajo apage el aparato – peligro de quemaduras!
8. Para embalar o almacenar el aparato se ruega de hacerlo después de dejar que se enfrie completamente.

5. Eliminación: Para la eliminación del aparato seguir las normas vigentes de la ley.

Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	04.08.2010/TB	03.06.2019/CJ	1	03.06.2019/TB	Seite 2 von 3

Instrucciones de uso Waxer tipo Easy

- 6. Garantía:** La garantía de nuestros aparatos es de 24 meses desde la fecha de compra. En este periodo YETI arregla los aparatos sin facturar gastos siempre y cuando se trate de un problema de material o de producción. Esto no es válido para las piezas de consumo, como por ejemplo las piezas de mano y las puntas para modelar.

7. Lista de piezas de recambio y accesorios:

Nuestro surtido en puntas de izquierda a derecha:

art. n° 411-0100 PKT1 fina

art. n° 411-0200 PKT 2

art. n° 411.0300 Hollenback


art. n° 411-0400 Forma de cuchillo

art. n° 411-0500 Forma de descorchador, fina

art. n° 411-0600 Forma de descorchador, gruesa



- 410-1002 Pinza para pieza de mano, para todos los Waxer incluida en el volumen de entrega

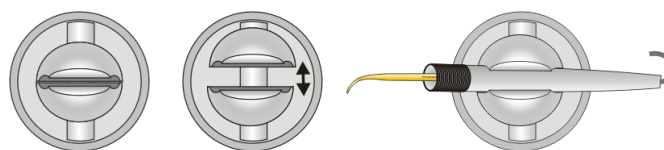

411-1001 Pieza de mano para todos los aparatos Easy / NT y light Waxer

Anillos de goma para la pieza de mano:

411-4000 Anillos "S" para la pieza de mano 25 pc/negro



Dokument:	Erstellt am/von:	geändert am/von:	Revision:	freigegeben am/von:	Seitenzahl:
BA	04.08.2010/TB	03.06.2019/CJ	1	03.06.2019/TB	Seite 3 von 3