



Gebrauchsfertige Tücher zur gering alkoholischen und materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen

mikroqid® universal p wipes premium

Unser Plus

- Schnell und umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren sowie einige unbehüllte Viren
- Norowirksam ab 30 Sekunden
- Begrenzt viruzid PLUS in 5 Minuten – gemäß den Anforderungen der EN 14885 für patientennahe Flächen
- Nach den neuesten Standards mikrobiologisch getestet – unter praxisnahen Bedingungen bei hoher Belastung
- Hohe Materialverträglichkeit selbst bei sensiblen Oberflächen wie Mobiltelefone und Displays
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt und auch ohne Handschuhe anwendbar*

Anwendungsgebiete

Das Produkt eignet sich zur materialschonenden, unkomplizierten Schnelldesinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Flächen aller Art inklusive der Patientenumgebung. Die gebrauchsfertigen und vielseitig einsetzbaren Tücher sind speziell für empfindliche Oberflächen entwickelt: Mobiltelefone, Touchscreens, Displays, Tastaturen, Kunstleder und Klinikmöbel werden materialschonend und verlässlich wirksam desinfiziert.

Anwendungshinweise

Dank ihrer Größe bieten die mikroqid® universal p wipes premium maxi eine zeitsparende Lösung für die Reinigung und Desinfektion größerer Flächen.

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Die Fläche mit getränktem Tuch gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Das Produkt ist ohne Handschuhe anwendbar, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Testmethode	Einwirkzeit
Bakterien, Hefen und Mykobakterien		
bakterizid	EN 13727; EN 16615; VAH	1 Min.**
levurozid	EN 13624; EN 16615; VAH	1 Min.**
mykobakterizid	EN 14348; EN 16615; (mod.)	5 Min.**
tuberkulozid	EN 14348; EN 16615 (mod.)	5 Min.**
Viren		
Norovirus	EN 14476; EN 16615 (mod.)	30 Sek.** 1 Min.**
begrenzt viruzid	EN 14476; EN 16615 (mod.)	1 Min.**
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476; EN 16615 (mod.)	5 Min.**

** hohe Belastung



Das Produkt befindet sich im Verfahren zur VAH-Zertifizierung und zur Aufnahme in die VAH-Liste

* Sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen.

mikrozid® universal p wipes premium

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:
22,5 g Propan-2-ol, 2,5 g Propan-1-ol, 1,54 g Glykolsäure

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:

< 5 % anionische Tenside

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen inklusive Acrylglas (PMMA-GS). Nicht auf alkoholempfindlichen Lacken einsetzen. Bitte beachten Sie den Brand- & Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der BR Regel „Desinfektionsarbeit im Gesundheitswesen“. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Schülke garantiert, bei entsprechender Handhabung, nach Anbruch der Verpackung eine Haltbarkeit von einem Monat.

Folgende Größen sind erhältlich:

- mikrozid® universal p wipes *premium*
(6 x 100 Tücher 20 x 20 cm)
- mikrozid® universal p wipes *premium maxi*
(6 x 80 Tücher 25 x 25 cm)

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter lagern. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Eignung des Wirkspektrums ist für den vorgesehenen Anwendungsbereich zu prüfen. Nicht geeignet zur viruziden Abschlussdesinfektion von semikritischen und kritischen Medizinprodukten! Nur kleine Flächen behandeln. Die Wischreichweite hängt von der Raumtemperatur und der Struktur der zu desinfizierenden Oberfläche ab. Keine direkte Behandlung von Lebens- und Futtermitteln. Nur glatte (nicht saugfähige/nicht poröse) Materialien behandeln. Weitere Angaben sind auf Anfrage erhältlich. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

BAuA-Nr.: N-117825



Bestellinformation

Artikel	Lieferform	GTIN	PZN	Art.-Nr.
mikrozid® universal p wipes <i>premium</i> (100 Tücher)	6 / Karton	4032651985999	19990034	70003751
mikrozid® universal p wipes <i>premium maxi</i> (80 Tücher)	6 / Karton	4032651986019	19990063	70003752

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Softpack-Halterung 1 ST	60000460
Softpack-Halterung <i>premium</i> 1 ST	70001496

Verwandte Produkte

- mikrozid® universal p wipes *free line*
- mikrozid® universal p liquid
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® PAA+ wipes


Umweltinformation

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie demnächst im Internet unter www.schuelke.com

Für individuelle Fragen:
Application Department
Telefon: +49 40 52100-666
E-Mail: info@schuelke.com

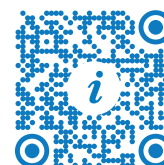

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt
Deutschland
+49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer
Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und
von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.