




neodisher® Alka 300

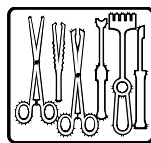

Alkalisches Reinigungsmittel
zur maschinellen Aufbereitung
von thermostabilen und
thermolabilen Instrumenten



Flüssigkonzentrat

Anwendungsbereich:

- Maschinelle Reinigung von Instrumentencontainern, chirurgischen Instrumenten und Anästhesie-Utensilien sowie von Käfigen in der Tierhaltung

Leistungsspektrum:

- Entfernt Blut- und Eiweißrückstände sowie organische Rückstände
- Geeignet für Instrumentenstahl, Chromnickelstahl, verchromtes und vernickeltes Material sowie Reinaluminium, Aluminium-Magnesium-Legierungen und übliche Kunststoffe
- Die Eignung für Spezialinstrumente, z.B. Instrumente mit Optiken oder Anästhesie- und Beatmungsutensilien sowie eloxiertes Aluminium ist jeweils vor dem Einsatz zu prüfen

Besondere Eigenschaften:

- Mit Aktivchlor für intensive Reinigungswirkung
- Mit oxidativer Zersetzungskraft für hartnäckige organische Rückstände
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar, in der Regel erfolgt der Einsatz jedoch mit enthärtetem oder vollentsalztem Wasser

Anwendung und Dosierung:

neodisher Alka 300 kann in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten eingesetzt werden. Die Dosiermenge beträgt 2 - 5 ml/l je nach Anwendungsbereich und Verschmutzungsgrad des Spülgutes.

Für die Dosierung sind geeignete Dosiergeräte zu verwenden.

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Die neodisher Alka 300-Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser (vorzugsweise vollentsalzt) abzuspülen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Medizinproduktegesetzgebung und den geltenden Regularien mit geeigneten validierten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukteherstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664, die Reinigungsempfehlungen der Tierkäfighersteller sowie die Empfehlungen des Arbeitskreises Käfigaufbereitung (AK KAB) in der aktuellen Ausgabe der AK KAB-Broschüre „Käfigaufbereitung in der Tierhaltung richtig gemacht“.
- Die Bedienungsanweisungen der Reinigungs- und Desinfektionsgerätehersteller sind zu beachten.

Technische Daten:

Dichte	ca. 1,4 g/cm ³ (20 °C)
pH-Bereich	11,1 - 11,9 (2 - 5 ml/l, bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C)
Viskosität	< 50 mPa s (Konzentrat, 20 °C)
Titrierfaktor	1,04 (nach neodisher Titrieranleitung)

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:



neodisher[®] Alka 300

< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis
15 - 30 % Phosphate

CE-Kennzeichnung:

neodisher Alka 300 erfüllt die Vorgaben
resultierend aus der europäischen
Medizinproduktegesetzgebung.

Wenn ein schwerwiegender Vorfall mit diesem
Produkt auftritt, ist dies dem Hersteller und der
zuständigen Behörde zu melden.

Lagerhinweise:

Bei der Lagerung ist eine Temperatur
zwischen -10 und 25 °C einzuhalten. Vor
Sonnenlicht schützen. Bei sachgemäßer
Lagerung 1 Jahr lagerfähig. Verwendbar bis:
siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem
Symbol .

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie
in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter
www.drweigert.de in der Rubrik „Service/
Downloads“ verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen
entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe
Sicherheitsdatenblatt.

MB 3103/3-2
Stand 04/2020

Die Angaben dieses Merkblattes basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.