

neodisher® Alka 300

Mild alkalisch reinigingsmiddel (medisch product) voor machinale toepassing
Vloeibaar concentraat



Belangrijkste toepassingsgebied:

Machinale reiniging van instrumentencontainers, chirurgisch instrumentarium en anesthesietoebehoren. Tevens geschikt voor proefdierkooien.

Eigenschappen:

neodisher Alka 300 is mildalkalisch verwijdert bloed- en eiwitresten alsmede organische vervuiling.

Bevat corrosie-inhibitoren waardoor geschikt voor:
Instrumentenstaal, chroomnikkelstaal, verchromde en vernikkelde materialen, aluminium, aluminium-magnesium legeringen en gangbare kunststoffen.

Geschiktheid tests moeten vóór gebruik worden uitgevoerd in het geval van speciale instrumenten, zoals optische instrumenten, anesthesie / ademhaling materialen en geanodiseerd aluminium.

neodisher Alka 300 is inzetbaar bij alle waterhardheden; in de praktijk verdient toepassing met onthard water de voorkeur.

Dosering en gebruik:

Aanbevolen dosering: 2 - 3 ml/l

De neodisher Alka 300 gebruiks-oplossing moet volledig met water afgespoeld worden.

Na gebruik ander product het doseersysteem inclusief bijbehorende aanzuigslangen met water doorspoelen.

Niet vermengen met andere producten. Alleen voor professioneel gebruik!

Productgegevens:

Soortelijkgewicht (20 °C): 1.4 g/cm³

pH-waarde (in demi water, 20 °C) 2 - 5 ml/l: 11.1 - 11.9

Viscositeit (concentraat, 20 °C): < 50 mPas

Geleidbaarheid (in demi water, 60 °C) 3 g/l: 3.9 mS/cm

Titratie factor: 1,04

Ingredienten:

Samenstelling conform EG detergenten richtlijn 648/2004:

< 5 % bleekmiddel op chloorbasis

15 - 30 % fosfaten

CE-markering:

neodisher Alka 300 voldoet aan de eisen van Richtlijn 93/42/EWG, bijlage I over medische producten.

Hantering en opslag:

Houdbaarheid bij correcte opslag: 12 maanden.

Bewaar op een koele plaats uit de buurt van direct zonlicht.

Gevoelig voor vorst bij een temperatuur onder - 10 °C.

Bijzondere gevaar en veiligheidsaanbevelingen:

Zie het Veiligheids Informatie Blad. Deze is verkrijgbaar op www.drweigert.nl onder het kopje "Downloads".

Lege verpakkingen (eventueel met productresten) afgesloten afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met algemeen wettelijke voorschriften en eventuele plaatselijke verordeningen. Lege en grondig omgespoelde verpakkingen kunnen als bedrijfsafval beschouwd worden en dienovereenkomstig afgevoerd worden. Zie ook het Veiligheids Informatie Blad (rubriek 13).

MB 3103 /2-3
Versie 10-2014
Vervangt 10-08-2011



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Nederland BV
Balkendwarsweg 3 9405 PT Assen

Tel: 0592-319393
Fax: 0592-310117

E-Mail: info@drweigert.nl
Internet: www.drweigert.nl

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing. Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.
Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website www.drweigert.nl