

neodisher® Alka 300

Płynny, lekko alkaliczny środek myjący do specjalnych myjni



Obszary zastosowania:

Maszynowe mycie pojemników na narzędzia medyczne, narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego i klatek w hodowlach zwierząt doświadczalnych.

Właściwości:

neodisher Alka 300 jest lekko alkalicznym środkiem. Usuwa białko, krew oraz inne zabrudzenia organiczne.

Ze względu na zawarte w produkcie inhibitory korozji, nadaje się do stalowych narzędzi, stali chromowanej, chromowanych i niklowanych materiałów, czystego aluminium, stopów aluminium i magnezu, tworzyw sztucznych.

Należy wstępnie sprawdzić działanie środka na anodowane aluminium oraz narzędzia optyczne, wyposażenie anestezjologiczne i aparaty oddechowe.

neodisher Alka 300 może być stosowany nawet w twardej wodzie, jednak z powodów ekonomicznych, zalecane jest użycie wody miękkiej.

Użycie i dozowanie:

Zastosowanie w specjalnych myjniach:

Mycie maszynowe: 2 – 3 ml/l

Roztwory neodisher Alka 300 muszą być całkowicie spłukane wodą (zalecana woda zdemineralizowana).

Nie mieszać z innymi produktami.

Przed zmianą produktu należy przepłukać wodą system dozujący włącznie z węzami zasysającymi.

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Dane techniczne:

Gęstość (20°C):	1,4 g/cm ³
Wartość pH (w wodzie zdemineralizowanej, 20°C):	2 – 5 ml/l: 11,1 – 11,9
Lepkość (koncentrat, 20°C):	<50 mPas
Przewodność (woda zdemineralizowana, 60°C):	3 g/l: 3,9 mS/cm
Współczynnik miareczkowania:	1,04

Skład:

Zawartość składników według Rozporządzenia WE 648/2004 w sprawie detergentów:
< 5% środki wybielające na bazie chloru, 15 – 30 % fosforany.

Oznakowanie CE:

neodisher Alka 300 spełnia wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG, załącznik I.

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturze powyżej -10°C w chłodnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

Przy prawidłowym magazynowaniu okres trwałości wynosi 1 rok od daty produkcji.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Producent: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85, 20539 Hamburg/Niemcy

MB 3103/2-3_10.2014

PL 4.0 / 07.2019



DR. WEIGERT

Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D • 01-531 Warszawa

tel.: +4822 616 02 23
faks: +4822 617 81 21

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.