



Fachinformation

ORBAT sensitive

Hersteller

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Postfach 60, D-72132 Dettenhausen
Breitwasenring 1, D-72135 Dettenhausen
Telefon +49 (0) 71 57 / 56 45 - 0
Fax +49 (0) 71 57 / 56 45 50
E-Mail: info@legeartis.de
www.legeartis.de



Bezeichnung

ORBAT sensitive
Flüssigkeit zur Zahnfleischretraktion

Zusammensetzung

Aluminiumsulfat-Lösung 25 %

Anwendungsgebiete

Zur Retraktion des Zahnfleisches.
Zum Zahnfleischmanagement bei direkten und indirekten Restaurationen.
Zur Stillung von Zahnfleischblutungen und Stoppen der Exsudation vor der Abdrucknahme.

Nebenwirkungen

Nicht anwenden bei Patienten mit einer Allergie gegen Aluminiumverbindungen.
Aluminiumsulfat kann zu leichten Abschilferungen am Schleimhautepithel führen.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Nicht mit imprägnierten Retraktionsfäden verwenden.
Falls stärkere Kapillarblutungen zu Stillen sind, sollte eher ORBAT forte zur Retraktion und zum Stoppen der Zahnfleischblutung angewandt werden.

Verschlucken vermeiden. Nach Verschlucken Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt behutsam mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung Arzt aufsuchen.
Bei Augenkontakt einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.legeartis.de heruntergeladen werden oder per E-Mail unter sicherheitsdatenblaetter@legeartis.de angefordert werden.

Art der Anwendung

Retraktion des Zahnfleisches

Zur Zahnfleischretraktion vor Abdrucknahme einen nicht imprägnierten Retraktionsfaden (-ring) mit ORBAT sensitive tränken. Nach ca. 1 - 3 Minuten (oder auch länger) Faden entfernen und bei Bedarf vorsichtig spülen.

Zahnfleischmanagement bei direkten und indirekten Restaurationen

Zur Retraktion und zum Stoppen der Exsudation einen mit ORBAT sensitive getränkten Retraktionsfaden (-ring) in den Sulkus legen oder ORBAT sensitive direkt mit einem geeigneten Applikator unter leichtem Druck auftragen.

Vor der Zementierung bzw. der adhäsiven Befestigung der Restauration muss sichergestellt sein, dass die Blutung und Exsudation gestoppt sind und überschüssiges Aluminiumsulfat mit viel Wasserspray gut entfernt wurde.

Exsudation und Zahnfleischbluten

Exsudat bzw. Blut abtupfen und ORBAT sensitive mit getränktem Wattepellet oder einem anderen geeigneten Applikator unter leichtem Druck auftragen.

Weitere Hinweise

Aluminiumsulfat hat eine gute adstringierende Wirkung. Es bewirkt eine lokale Blutstillung, indem es die obere Zahnfleischschicht zusammenzieht.

ORBAT sensitive kann auch direkt aus der Tropfflasche auf den Applikator oder geeignete Retraktionsfäden aufgebracht werden. Besser ist jedoch, aus der Flasche einige Tropfen in ein Dappenglas oder Ähnliches zugeben, um dort die zugeschnittenen Fäden gut zu tränken oder die Lösung mit dem Applikator von dort zu entnehmen.

Unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Nur für den professionellen zahnärztlichen Gebrauch.

Lösungsreste nicht zurück ins Gefäß geben.

Haltbarkeit

ORBAT sensitive soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Lager- und Aufbewahrungshinweise

Nach dem Gebrauch die Flasche sofort wieder verschließen.

Darreichungsform und Packungsgröße

20 ml Lösung in PE - Tropfflasche Artikel-Nr. 0032327


Stand der Information

2019-11

Symbol für „Verwendbar bis“



Symbol für „Chargenbezeichnung“

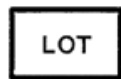

Symbol für „Gebrauchsanweisung beachten“



Symbol für „Hersteller“



Symbol für „Bestellnummer“

Zeigt die Artikelnummer des Herstellers an

