

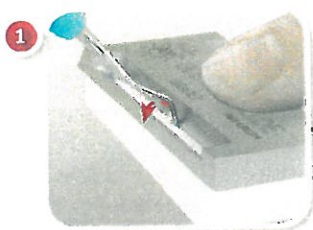



PDT Schleifset

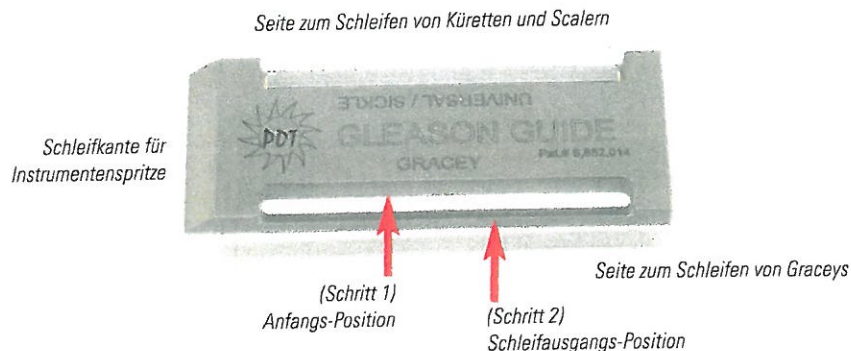

Legen Sie die patentierte PDT-Schleifschiene auf den Schleifstein. Nehmen Sie den Schleifstein nun in die Hand und halten Sie die Schiene mit dem Daumen fest, damit diese nicht verrutschen kann. Wählen Sie die Gracey oder Universal/Sichel Seite abhängig von dem Instrument das Sie schleifen möchten. Platzieren Sie die Rückseite der Klinge dort wo sich die Schleifschiene und der Schleifstein treffen (Schritt 1).

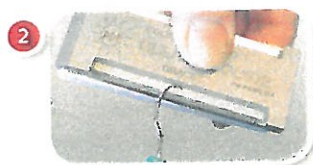


Legen Sie das Instrument auf der gegenüberliegenden Kante der Schleifschiene ab (Schritt 2). Dieses ist somit die optimale Schleif-Position. Behalten Sie diese Schleif-Position bei und bewegen Sie das Instrument auf dem Schleifstein vor und zurück und lassen es auf der Schiene entlang gleiten.

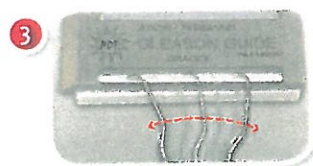

Um die Spitze des Instruments zu schärfen legen Sie die Instrumentenspitze an die Frontseite der Schleifschiene und lassen diese dann bis zum Schleifstein hin abgleiten. Drehen Sie das Instrument am Griff abwechselnd im Halbkreis von rechts nach links, so dass die Spitze am Stein geschärft wird.



Das Ultimate Edge Kit enthält zudem einen PingRing, um zu testen ob Sie Ihr Instrument richtig geschärft haben. Dieser schützt den Fingernagel und testet den Schärfeegrad des Instruments nach dem Schleifvorgang.

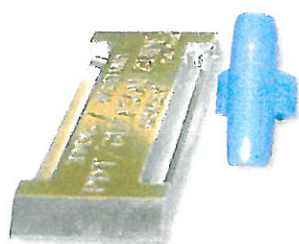

To66 „Ultimate Edge“ Sharpening Kit

**komplett
119 €**

zzgl. MwSt.

**komplett
159 €**

zzgl. MwSt.



To67 „Ultimate Edge“ Transformation Kit

Unser Service für Sie:



Individualisierung

Stellen Sie sich vor, Ihre Instrumente könnten Ihren Namen tragen.

Ab einer Bestellung von 50 gemischten Instrumenten individualisieren wir Ihnen diese ohne Zusatzkosten mit Ihrer Wunschaufschrift.

Ärzte ohne Grenzen

Besitzen Sie noch alte Instrumente die defekt sind, oder für die Sie keine Verwendung mehr finden?

Die Organisation Ärzte ohne Grenzen freut sich über jedes Instrument, dass Sie uns einschicken. Wir bereiten diese auf und leiten Sie für die Behandlung an bedürftige Patienten weiter.

Für jedes 12. Instrument, dass Sie spenden, erhalten Sie von uns ein neues PDT Instrument im Wert von
39,- €

Garantie

Lebenslange Garantie

Der Hersteller sagt Ihnen eine lebenslange Garantie auf die Haltbarkeit der Klingen zu. Sollte Ihnen ein PDT-Instrument, welches mindestens 70% seiner Klingensubstanz aufweist, brechen, ersetzt er Ihnen dieses nach Ein-sendung umgehend und ohne Kompromisse.



Bereits seit 2010 ist das Qualitätsmanagement der Zantomed GmbH nach DIN ISO 9001 zertifiziert. Wir werden internationalen Standards und Anforderungen gerecht und setzen alles daran, auch Ihre zu erfüllen und zu übertreffen.